

Cormedica



Toutes spécialités
DM non stériles &
équipements

Sommaire

- I. Coussins de protection & positionnement patient
- II. Evacuateurs de fumée
- III. Extracteurs de lames
- IV. Gants
- V. Générateur électrochirurgical et accessoires
- VI. Instrumentation chirurgicale
- VII. Micro-instrumentation
- VIII. Ouvre-ampoules SnapIT
- IX. Protections anti-radiations
- X. Rétracteurs autostatiques Bookwalter





Coussins de protection & positionnement patient

Cormedica



REDUCTION DES
PRESSIONS

&

POSITIONNEMENT
DU PATIENT



PREVENTION DES
ESCARRES :

OBJECTIF ZERO



Pressurecare

Coussin de protection pour table

COUSSINS AZURE PROFILE



Les coussins de table Azur combinent un silicone ultra-souple et léger à la base et un gel de silicone polymérisé sur le dessus, avec un profil quadrillé unique qui accueille confortablement le corps pendant l'opération. Ces coussins sont jusqu'à 20 % plus légers que des coussins en gel du même type.

Code	Description	Dimensions
AZ610	Coussin universel pour table d'opération	520 x 520 x 10 mm
AZ611	Coussin pour table d'opération 3/4	1150 x 520 x 10 mm

COUSSINS DE TABLE OASIS ELITE



Les coussins de table Oasis Elite sont utilisables pour protéger le corps dans toutes les positions chirurgicales. Ce coussin ultra-léger comporte une base en mousse et un dessus en gel, ce qui facilite son transport et sa manipulation par le personnel du bloc opératoire

Code	Description	Dimensions
EL030	Coussin universel pour table d'opération	520 x 520 x 30 mm
EL031	Coussin pour table d'opération 3/4	1150 x 520 x 20 mm

COUSSIN POUR TABLE D'OPÉRATION OASIS TORSO



Le coussin Oasis Torso est conçu pour être utilisé sur les tables à plusieurs segments. Le segment de torse présente une découpe périnéale. Le produit confère une bonne protection dans le cadre de diverses procédures chirurgicales, en particulier en orthopédie et en urologie.

Code	Description	Dimensions
OA037	Segment de torse	990 x 500 x 10 mm

COUSSINS STANDARD POUR TABLE D'OPÉRATION OASIS



Ces coussins pour table d'opération Oasis assurent une protection sur toute la surface de la table d'opération et sont utilisables pour toutes les positions. Les coussins sont souples, confortables et polyvalents et ils distribuent le poids de manière homogène sur toute la surface.



Code	Description	Dimensions
OA030	Coussin universel pour table d'opération	520 x 520 x 10 mm
OA031	Coussin pour table d'opération 3/4	1150 x 520 x 10 mm
OA032	Coussin pour table d'opération complet	1800 x 520 x 10 mm

COUSSIN DE TABLE PÉRINÉAL OASIS

COUSSIN POUR INCUBATEUR OASIS LONGUEUR COMPLÈTE



P

Ce coussin est utilisé pour la protection des patients pédiatriques, dans le cadre de toutes les procédures chirurgicales. Il peut aussi être utilisé sur les matelas dans les lits d'hôpital.

Code	Description	Dimensions
OA033	Coussin pédiatrique, longueur complète	605 x 335 x 10 mm

COUSSIN DE TABLE PÉRINÉAL OASIS



S P L LL P

Le coussin périnéal Oasis offre une protection excellente de la région sacrée, point de pression maximale. Il est essentiel pour les patients en position de lithotomie.

Code	Description	Dimensions
OA040	Coussin de table périnéal	520 x 520 x 10 mm



Protection de la tête et du cou

COUSSIN DE TÊTE AZURE



S L LL P

Le coussin de tête Azure bicouche présente une conception novatrice visant à épouser confortablement les contours de la tête de chaque patient tout en conférant une protection efficace.



Code	Description	Dimensions
AZ100	Enfant/ Adolescent/Adulte	260 x 250 x 50 mm

CALE-TÊTE POSITION VENTRALE OASIS ELITE



P P

Développé en collaboration avec le personnel du bloc opératoire d'un hôpital de renom, le cale-tête position ventrale Oasis Elite est conçu dans le respect de l'anatomie de sorte que la tête du patient repose confortablement, visage vers le bas, sonde d'intubation en place. Sa conception unique confère un soutien, une stabilité, un confort et une protection excellentes pendant les interventions en position ventrale, avec des ouvertures des deux côtés. Le produit est léger, durable et facile à manipuler.

Code	Description	Dimensions
EL141	Adulte	280 x 240 x 140 mm
EL142	Adolescent/Adulte	280 x 220 x 135 mm

ANNEAU TÊTIÈRE FERMÉ OASIS ELITE



S L LL P

L'association unique de gel et de mousse permet une adaptation confortable à la tête du patient ; cet anneau têtère est adapté à de nombreuses procédures chirurgicales.



Code	Description	Dimensions
EL011	Enfant/Adolescent	140 x 34 mm
EL012	Adulte	200 x 50 mm

ANNEAU TÊTIÈRE OUVERT OASIS



P LL P

Souple, confortable et durable, l'anneau têtère ouvert Oasis soutient le visage du patient tout en ménageant un accès facile à la sonde d'intubation pendant la chirurgie.

Code	Description	Dimensions
OA021	Enfant/ Adolescent	140 x 35 mm
OA022	Adolescent/ Adulte	200 x 50 mm

ANNEAU TÊTIÈRE OUVERT OASIS ELITE



P LL P

La combinaison de gel et de mousse assure stabilité et protection du visage du patient pendant l'intervention. Une ouverture est prévue pour la sonde d'intubation.

Code	Description	Dimensions
EL021	Enfant/Adolescent	140 x 34 mm
EL022	Adulte	200 X 54 mm

CALE-TÊTE POSITION DORSALE OASIS ELITE



S P

Ce cale-tête pour position dorsale est idéal pour positionner le patient pour une opération de l'œil et pour d'autres interventions en décubitus dorsal. Sa forme ergonomique permet de positionner la tête du patient tout en assurant une protection efficace contre les ulcères de décubitus.

Code	Description	Dimensions
EL151	Adulte	275 x 237 x 90 mm
EL152	Adolescent/Adulte	275 x 230 x 65 mm

ANNEAU TÊTIÈRE FERMÉ OASIS



S L LL P

Disponible en 3 tailles, l'anneau tête fermé Oasis protège la tête, le cou et les oreilles pendant tous types de chirurgie et il est adapté pour une utilisation dans de nombreuses procédures.



Code Description Dimensions

OA010	Nouveau-né	90 x 20 mm
OA011	Enfant/Adolescent	140 x 35 mm
OA012	Adolescent/Adulte	200 x 45 mm

COUSSIN POUR VISAGE OASIS



S L LL P

Le coussin pour visage Oasis bénéficie d'une conception ergonomique protégeant le front du patient de la pression exercée par les sondes endotrachéales.

Code	Description	Dimensions
OA140	Taille unique	165 x 80 x 8 mm

SUPPORT TÊTE ET COU OASIS +



S

Le support tête et cou Oasis + présente une conception ergonomique pour le soutien de la tête et du cou. Ce produit est doté de propriétés antidérapantes, pour plus de sécurité.

Il est apprécié en chirurgie ORL pour la septoplastie, dans certains cas pour l'utilisation de laryngoscopes et pour la thyroïdectomie.



Code Description Dimensions

OP151	Adulte	264 x 220 x 64 mm
-------	--------	-------------------

Protection des bras et des coudes

COUSSIN DE BRAS AZURE



Le coussin de bras Azure épouse la forme du bras du patient et sert de seconde couche de tissu, pour une protection excellente contre les lésions nerveuses.

Code	Description	Dimensions
AZ200	Enfant/ Adolescent/Adulte	330 X 140 X 30 mm
AZ201	Adolescent/Adulte	460 x 180 x 35 mm

COUSSIN POUR APPUIE-BRAS OASIS ELITE



Ce coussin plat pour appuie-bras présente un léger creux pour accueillir le bras et assure un soulagement efficace de la pression dans le cadre de diverses procédures chirurgicales.

Code	Description	Dimensions
EL070	Enfant/ Adolescent/Adulte	400 x 125 x 20 mm
EL072	Adolescent/Adulte	600 x 125 x 20 mm

COUSSIN POUR APPUIE-BRAS PROFILÉ OASIS ELITE



Ce coussin pour appuie-bras de forme anatomique est conçu pour renforcer le soutien et la stabilité du bras dans diverses procédures.

Code	Description	Dimensions
EL401	Adulte	510 x 155 x 40 mm
EL402	Adolescent/Adulte	395 x 140 x 40 mm

COUSSIN POUR APPUIE-BRAS LONG OASIS +



Le coussin long pour appuie-bras soulage entièrement la pression au niveau du coude, grâce à un creux sur toute la longueur. Il peut aussi s'adapter à différentes positions des bras. Ses bords relevés assurent un soutien défini. Enroulable pour obtenir une position neutre de la main si nécessaire.

Code	Description	Dimensions
OP101	Adulte	500 x 161 x 40 mm

COUSSIN POUR APPUIE-BRAS PROFILÉ OASIS



Ce coussin pour appuie-bras contouré a été conçu pour être utilisé sur une extension de table standard. Sa forme contournée confère une protection excellente et un bon maintien du bras en place.

Code	Description	Dimensions
OA101	Adulte	510 x 150 x 35 mm

COUSSINS POUR APPUIE-BRAS OASIS



Les coussins pour appuie-bras Oasis assurent la protection nécessaire aux bras lorsqu'ils sont en position étendue sur un appuie-bras. Adaptés pour tous types d'appuie-bras.



Code	Description	Dimensions
OA070	Enfant/ Adolescent/Adulte	395 x 115 x 10 mm
OA071	Enfant/ Adolescent/Adulte	600 x 200 x 10 mm
OA072	Adolescent/Adulte	600 x 125 x 10 mm


PROTECTIONS POUR NERF CUBITAL/BRACHIAL OASIS



Les protections pour nerf cubital/brachial oasis sont essentielles pour la protection des zones sensibles des coudes et des bras

Code	Description	Dimensions
OA061	Adolescent/Adulte	460 x 210 x 8 mm
OA062	Adolescent/Adulte	460 x 380 x 8 mm

COUSSIN POUR SUPPORT DE BRAS OASIS

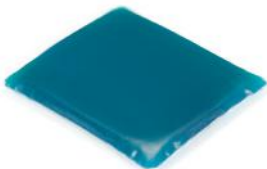

Le coussin pour support de bras Oasis a été conçu spécifiquement pour s'adapter aux supports de bras Perspex/acrylique. Il s'installe très simplement grâce aux Velcro.



Code	Description	Dimensions
OA100	Taille unique	170 x 110 x 18 mm

Protection du corps

COUSSIN POUR SACRUM AZURE



S L P

Le coussin pour sacrum Azure a été conçu pour fournir un soutien dans les positions de décubitus dorsal et de lithotomie ; il soulage la pression et fournit un soutien essentiellement périphérique.



Code	Description	Dimensions
AZ300	Adolescent/Adulte	400 x 380 x 25 mm
AZ301	Adulte	450 x 445 x 30 mm

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT POUR DÉCUBITUS VENTRAL OASIS ELITE



P LL

Le système de positionnement pour décubitus ventral/latéral de Trulife résulte de recherches poussées sur les besoins du personnel de bloc opératoire prenant soin des patients lors de procédures chirurgicales en position de décubitus ventral/latéral. Conçu en pensant à la fois aux patients et au personnel médical, ce système offre la protection ultime contre la pression, tout en permettant un positionnement efficace du patient.

Code	Description	Dimensions
EL905	Système de positionnement pour décubitus ventral/latéral	675 x 500 x 100 mm

Pièces de rechange disponibles :

EL906	Segment supérieur gauche/ Segment inférieur droit	275 x 250 x 100 mm
EL907	Segment supérieur droit/ Segment inférieur gauche	275 x 250 x 100 mm
EL908	Segment médian gauche/ Segment médian droit	125 x 250 x 100 mm
EL912	Plaque de base	500 x 500 x 6 mm



SYSTÈME DE POSITIONNEMENT UNIVERSEL AZURE



S P LL P

Ce produit polyvalent et léger est utilisable pour positionner et protéger les patients dans diverses procédures chirurgicales



Code	Description	Dimensions
AZ500	Adolescent/Adulte	425 x 155 x 60 mm

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT EN DÉCUBITUS VENTRAL OASIS ELITE



P

L'association de gel et de mousse du système de positionnement en décubitus ventral a été conçue pour assurer un positionnement efficace du patient pendant une procédure chirurgicale en position de décubitus ventral. Pour une protection optimale, nous recommandons de l'utiliser en association avec le cale-tête pour position ventrale.



Code	Description	Dimensions
EL903	Adulte	610 x 530 x 130 mm

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT EN DÉCUBITUS VENTRAL LARGE OASIS ELITE



P

Ce système de positionnement en décubitus ventral (Large) élimine la pression au niveau de l'abdomen et facilite la ventilation et la circulation pour des procédures longues réalisées en décubitus ventral, à savoir les opérations sur l'arrière des jambes et les procédures de laminectomie.



Code	Description	Dimensions
EL904	Adulte	1115 x 520 x 140 mm

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT SEMI-CYLINDRIQUE OASIS ELITE



S P P

Ce système poids-plume peut être utilisé pour positionner et protéger le patient au cours de diverses procédures chirurgicales, dans toutes les positions. Il est utilisable dans de nombreuses applications différentes.

Code	Description	Dimensions
EL210	Adolescent/Adulte	350 x 150 x 75 mm

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT EN DÉCUBITUS LATÉRAL OASIS ELITE



LL P

Ce dispositif de positionnement permet une transition simple et rapide, en toute sécurité, du décubitus dorsal vers le décubitus latéral. La partie inférieure de l'épaule du patient s'installe dans le canal intégré qui confère au patient un confort et une protection nerveuse exceptionnels. Le système de positionnement en décubitus latéral est conçu pour être utilisé dans les procédures d'arthroplastie de la hanche, les opérations de l'épaule et les opérations des reins. Le cale-tête intégré et le support auxiliaire facilitent le bon alignement de la colonne et l'accès au site chirurgical.



Code	Description	Dimensions
EL900	Adolescent/Adulte	720 x 500 x 160 mm

CALES DEMI-CYLINDRIQUES POUR THORAX OASIS ELITE



S P L LL

Les cales pour thorax assurent un soutien et une stabilité excellents. Grâce à une combinaison unique de gel et de mousse, elles sont 75 % plus légères que des produits comparables en gel, pour une manipulation sans difficulté par le personnel du bloc.

Code	Description	Dimensions
EL214	Adulte	300 x 140 x 110 mm
EL215	Adulte	400 x 140 x 110 mm
EL216	Adulte	505 x 140 x 110 mm
EL217	Adulte	405 x 150 x 150 mm
EL218	Adulte	510 x 150 x 150 mm

Protection du corps

CALES DEMI-CYLINDRIQUES POUR THORAX OASIS



S P L LL P

Ces cales pour thorax en 100 % gel de silicone assurent un positionnement et une stabilité excellents. Disponibles en 3 tailles.

Code	Description	Dimensions
OA211	Adulte	305 x 95 x 75 mm
OA212	Adulte	405 x 95 x 75 mm
OA213	Adulte	505 x 92 x 75 mm

SANGLE POUR MEMBRES SUPERIEURS/INFERIEURS




S P L LL P

La sangle est spécialement conçue pour immobiliser les membres supérieurs ou inférieurs.

Fournie par paire.

Code	Description	Dimensions
OA113	Segment gel	315 x 45 x 10 mm
	Longueur sangle	1m

POSITIONNEURS DE PATIENT UNIVERSELS OASIS

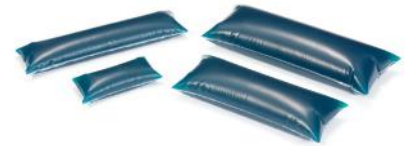

S P L LL P

Ces positionneurs en 100 % silicone sont adaptés à un positionnement sûr et efficace pendant toutes les procédures chirurgicales.

Code	Description	Dimensions
OA050	Enfant/Adolescent/Adulte	150 x 60 x 40 mm
OA051	Enfant/Adolescent/Adulte	330 x 70 x 50 mm
OA052	Adolescent/Adulte	290 x 100 x 60 mm
OA053	Adolescent/Adulte	345 x 120 x 70 mm

SANGLE DE POSITIONNEMENT DE PATIENT OASIS



S P L LL

La sangle de positionnement de patient Oasis assure la sécurité des patients en fournissant stabilité et protection des tissus sur la table d'opération. Le fermoir à clip permet de régler simplement la sangle pour l'adapter à toutes les tables d'opération. En cas d'urgence, un clip de libération facile peut être retiré rapidement.

Code	Description	Dimensions
OA110	Segment gel	505 x 85 x 8 mm
	Longueur sangle	2.5m

COUSSIN POSITIONNEUR POUR DÉCUBITUS VENTRAL OASIS ELITE



P

Le coussin pour décubitus ventral facilite la ventilation et supprime la pression exercée sur l'abdomen pendant les procédures chirurgicales longues réalisées en décubitus ventral. Recommandé pour les procédures de laminectomie et la chirurgie du dos et des jambes. Ce produit est une évolution de la référence EL914 pour une meilleure adaptation à la référence EL141 et pour une meilleure adaptation anatomique à la zone génitale féminine et masculine.



Code	Description	Dimensions
ELP914	Adulte	1014 x 480 x 140 mm

SYSTÈME POSITION TRENDELENBURG OASIS ELITE



S

Le système pour position de Trendelenburg Oasis Elite a été développé pour faire face aux difficultés liées à la position de Trendelenburg, principalement le glissement du patient, les lésions nerveuses et la formation d'ulcères de décubitus.

Principales caractéristiques :

- Adapté pour la position de Trendelenburg jusqu'à 40°
- Maintient le patient en inclinaison latérale en toute sécurité
- Mousse visco-élastique bicouche et structure de gel intégrée
- Réutilisable, résistant et facile à nettoyer
- Supports d'épaule en carbone composite pour la position de Trendelenburg très inclinée
- Mise en place rapide
- Sans contention



Code Description

ELTS20 Système Trendelenburg Elite 20°

Adapté pour les chirurgies avec inclinaison jusqu'à 20°

Cette catégorie inclut :

1. TR012 - Cale-tête Trendelenburg
2. ELT900 - Positionneur Trendelenburg Elite
3. ELT015 - Matelas antidérapant

Code Description

ELTS40 Système Trendelenburg Elite 40°

Adapté pour les chirurgies avec inclinaison jusqu'à 40°

Cette catégorie inclut :

1. TR012 - Cale-tête Trendelenburg
2. ELT900 - Positionneur Trendelenburg Elite
3. ELT015 - Matelas antidérapant
4. ELT21 - Support d'épaule x2
5. ELT22 - Support de bras x2
6. ELT23 - Support en L x2
7. ELT24 - Clamp x2

DISQUES OASIS +




S P L LL P

Les disques Oasis+ permettent de maintenir en place les produits en gel et réduisent les glissements.

Code Description Dimensions

OP015 Enfant/
Adolescent/Adulte
Boîte de 10 unités 200 x 200 x 4 mm

POSITIONNEUR PARK BENCH LATÉRAL OASIS ELITE

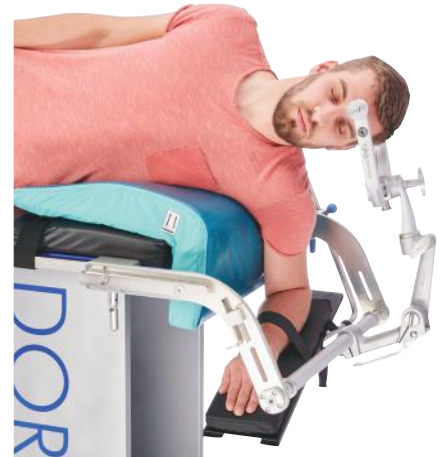

LL

La position Park-bench est une modification de la position en décubitus latéral. Cette position facilite l'accès à la fosse postérieure du crâne.

Code	Description	Dimensions
EL913	Adulte	520 x 413 x 230 mm



Protection des jambes

PROTECTION DE JAMBE AZURE



S P LL P

Le coussin de jambe Azure fournit une protection globale de la région des talons et des jambes. Légèrement surélevé derrière le genou, le dispositif protège le nerf poplité et épouse parfaitement le contour de la jambe. Les points forts du produit sont le positionnement global, la protection et l'alignement.



Code	Description	Dimensions
AZ400	Adolescent/Adulte	515 x 180 x 40 mm

COUSSINS POUR REPOSE-JAMBE/ÉTRIER AZURE



L

Ces coussins pour repose-jambes/étriers ont été conçus pour être utilisés avec divers types de support de jambes, afin de protéger les nerfs et les vaisseaux sanguins de la jambe au cours des procédures de lithotomie. Légers et souples, les coussins bicouche Azure protègent contre le cisaillement cutané et les lésions nerveuses.

Fournis par paire.

Code	Description	Dimensions
AZ410	Adolescent/Adulte	370 x 205 x 25 mm

PROTECTION GENOU OASIS ELITE



P P

Le protège genou s'utilise pour diverses procédures en décubitus ventral afin de protéger les genoux des lésions dues à la pression et afin de prévenir l'apparition des ulcères de décubitus.



Code	Description	Dimensions
EL401	Adulte	510 x 150 x 40 mm
EL402	Adolescent/Adulte	395 x 140 x 40 mm

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT DE JAMBE EN DÉCUBITUS LATÉRAL OASIS ELITE



LL

Ce produit s'utilise pour positionner les jambes en position latérale pour la chirurgie du rein et de la hanche. Il offre un grand confort et facilite un positionnement optimal pour la chirurgie. Ce système de positionnement permet aussi de placer genou et hanche en flexion.

Utilisation : placer le patient sur le côté, placer le membre du haut sur la partie supérieure du produit (en gel) et placer le membre du bas sous le rebord.

Code	Description	Dimensions
EL800	Adulte	650 x 400 x 230 mm

COUSSINS POUR REPOSE-JAMBE/UNIVERSEL OASIS



L

Les coussins pour repose-jambes Oasis sont conçus pour s'adapter à la plupart des étriers. ils existent en plusieurs tailles. Fournis en paire.



Code	Description	Dimensions
OA090	Adolescent/Adulte	320 x 220 x 10 mm
OA091	Adolescent/Adulte	395 x 245 x 10 mm
OA092	Adolescent/Adulte	520 x 300 x 10 mm

Protection des chevilles, des talons et des pieds

PROTECTION TALONS AZURE



S P

La région du talon est exposée à un risque extrême pendant toutes les procédures chirurgicales ; une attention toute particulière doit lui être accordée pour éviter toute lésion inutile. Ces coussins poids-plume assurent protection, stabilité et soutien du talon. **Fournis par paire.**



Code	Description	Dimensions
AZ401	Enfant/ Adolescent/Adulte	190 x 175 x 30 mm

PROTECTION TALONS OASIS



S P

Ces coussins en gel 100 % silicone sont utilisables dans toutes les procédures en décubitus dorsal, lorsque les talons sont exposés à un risque de lésion et de dommage cutané. **Fournis par paire.**

Code	Description	Dimensions
OA130	Adolescent/Adulte	180 x 100 x 70 mm

PROTECTION TALONS OASIS ELITE



S P

Le protège talons Oasis Elite fournit un soutien et une protection maximale des talons, même pendant les interventions chirurgicales les plus longues. Il soutient le tendon d'Achille et élimine efficacement la pression au niveau des talons. Le produit est léger et simple à utiliser. **Fournis par paire.**



Code	Description	Dimensions
EL130	Adolescent/Adulte	180 x 100 x 70 mm

TALONNIÈRES OASIS



S P

Les talonnières Oasis sont conçues pour réduire la pression au niveau des talons. Elles sont utilisables pendant et après la plupart des procédures chirurgicales, ainsi que pour les patients confinés au lit ou au fauteuil dans la journée. **Fournies par paire.**



Code	Description	Dimensions
OA131	Nouveau-né/ Enfant/Adolescent/ Adulte	105 x 90 x 43 mm

PROTECTION TALONS ET CHEVILLES OASIS



S L LL P

Ces coussins uniques sont conçus pour épouser la forme du talon et de la cheville, comme une chaussure, avec des fixations Velcro. Ils fournissent un rembourrage de protection pour le talon lorsque le patient est en décubitus dorsal ou latéral. Ils sont aussi utilisables pour la protection de la cheville et du pied. **Fournis par paire.**



Code	Description	Dimensions
OA200	Adolescent/Adulte	250 x 120 x 10 mm

POSITIONNEMENT PATIENT DANS UN ENVIRONNEMENT CHIRURGICAL



Positionneurs en mousse Elite

La gamme de coussins en mousse Trulife Elite est conçue pour favoriser un positionnement optimal du patient en unité de soins intensifs et pendant la chirurgie. Cette gamme poids-plume est polyvalente et elle offre stabilité et confort.



Il est important de noter que les patients doivent être repositionnés conformément aux directives cliniques toutes les deux heures, et que le bon alignement anatomique doit être vérifié.

Les coussins en mousse Elite offrent une grande variété de produits, notamment le système de coussins pour décubitus ventral ARDS ELP200. ARDS (SDRA en français) est l'abréviation de syndrome de détresse respiratoire aiguë ; c'est un type d'insuffisance respiratoire caractérisé par l'apparition rapide d'une inflammation étendue des poumons


Le coussin pour décubitus ventral ARDS est conçu pour stimuler la fonction respiratoire grâce à sa conception anatomique qui supprime toute interférence des coussins de positionnement dans la région des poumons. Les patients doivent aussi être repositionnés conformément aux directives cliniques toutes les deux heures, et le bon alignement anatomique doit être vérifié.

Caractéristiques	Avantages
Qualité élevée, réutilisable	Résistance exceptionnelle
Formes polyvalentes	Facilite de multiples positions
Mousse à récupération lente	Assure un confort optimal
Mousse à mémoire de forme	Redistribution efficace de la pression
Léger	Simple à utiliser

SYSTEME DE COUSSIN POUR DECUBITUS VENTRAL ARDS ELP200

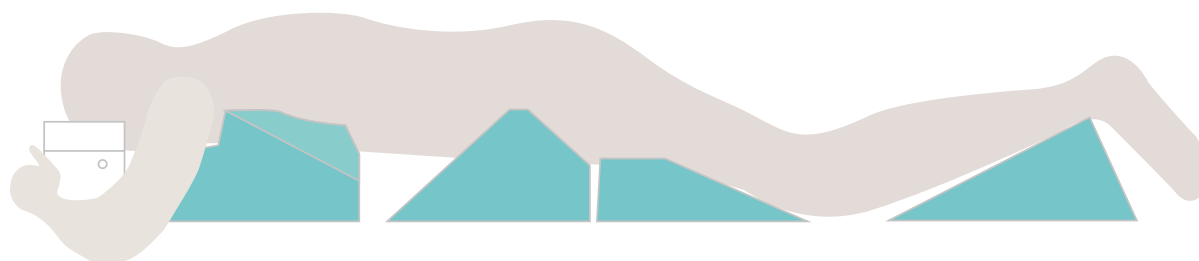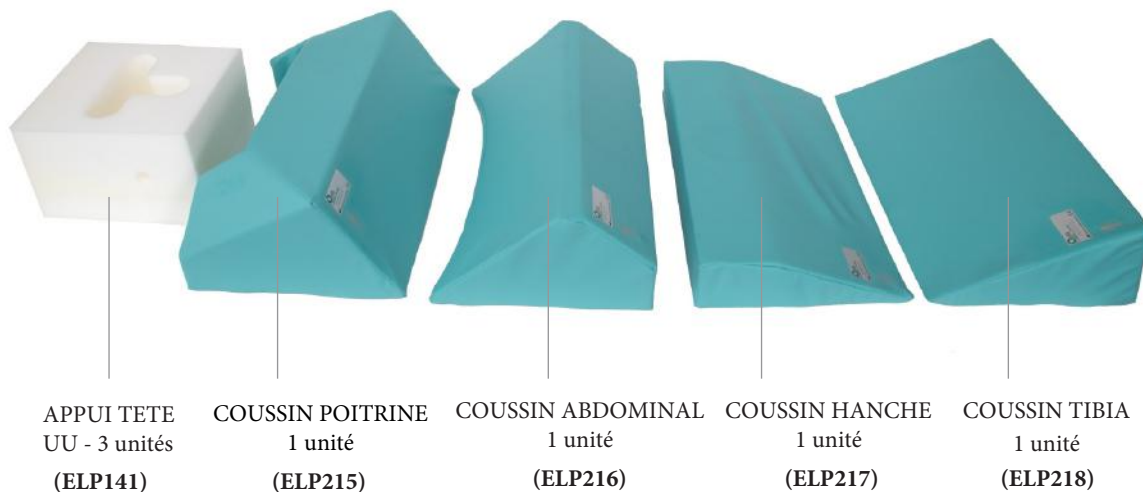

CARTOGRAPHIE DE LA PRESSION

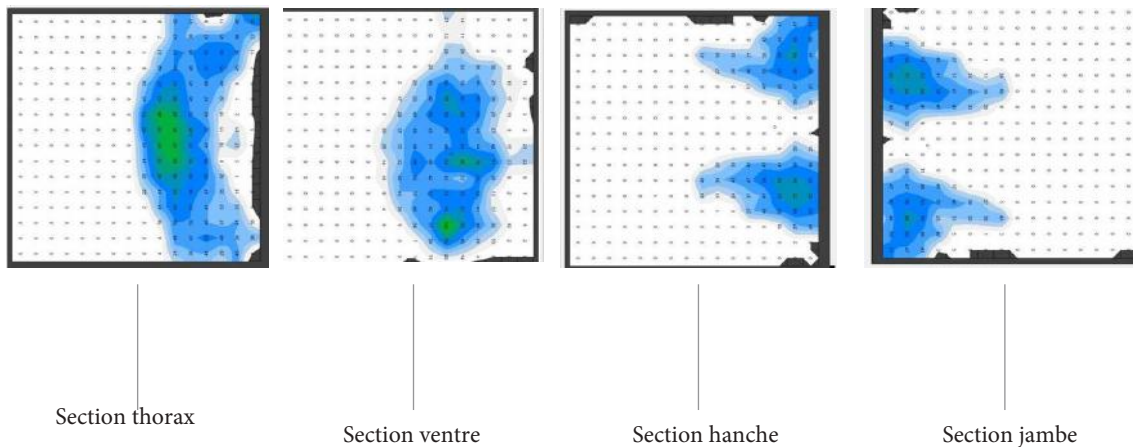

COUSSIN POUR DECUBITUS VENTRAL



Code ELP914
Description Adolescent/Adulte
Dimensions (mm) 1014 x 480 x 140



CALE-TETE



Code TR012
Description Adolescent/Adulte
Dimensions (mm) 260 x 200 x 154



COUSSIN UNIVERSEL



Code ELP011
Description Adolescent/Adulte
Dimensions (mm) 330 x 230 x 50



CALE TRIANGULAIRE



Code ELP049
Description Adolescent/Adulte
Dimensions (mm) 250 x 200 x 100



COUSSIN CYLINDRIQUE




Code ELP214
Description Adolescent/Adulte
Dimensions (mm) 500 x 120




Coussin cale-tête pour décubitus ventral



Code	ELP141
Description	Adulte
Dimensions (mm)	265 x 245 x 170
	<i>Carton de 3 unités</i>

Coussin de positionnement pour thorax

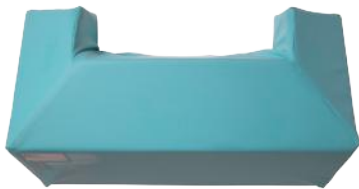

Code	ELP215
Description	Adulte
Dimensions (mm)	500 x 300 x 171

Coussin de positionnement pour le ventre



Code	ELP216
Description	Adulte
Dimensions (mm)	500 x 300 x 161

Coussin de positionnement pour les hanches



Code	ELP217
Description	Adulte
Dimensions (mm)	500 x 300 x 81

Coussin de positionnement pour les tibias



Code	ELP218
Description	Adulte
Dimensions (mm)	500 x 310 x 150

Positionnement en décubitus dorsal



Région du corps	Description du produit	Codes
Tête et cou	Protection de la tête	AZ100
	Anneaux têtes fermés	EL011 / 12 OA010 / 11 / 12
	Cale-tête pour décubitus dorsal	EL151 / 152
	Coussin pour visage	OA140
	Bras et coude	Protège bras
	Coussins pour bras/ planche pour genou	EL070 / 72 / 401 / 402 OA101 / 070 / 071 / 072
	Protection coude/bras	OA061 / 062
	Coussin pour support de bras	OA100
Corps	Coussins pour table	AZ610 / 611 EL030 / 31 OA030 / 31 / 32 / 37 / 40
	Protection pour sacrum	AZ300 / 301
	Coussin universel	AZ500
	Coussin semi-cylindrique	EL210
	Coussin universel	OA050 / 51 / 52 / 53
	Sangle de positionnement	OA110
	Sangle pour extrémité	OA113
	Cylindres pour thorax	EL214 / 215 / 216 / 217 / 218 OA211 / 212 / 213
	Jambe et genou	Protection des jambes
Chevilles, talons	Protège talons	AZ401
& pieds	Protège talons	EL130 OA130
	Talonnères	OA131
	Protège talons et chevilles	OA200

Positionnement en décubitus ventral



Région du corps	Description du produit	Codes	
Tête et cou	Protection de la tête	AZ100	
	Anneaux têtes ouverts	EL021 / 22 OA021 / 22	
	Cale-tête pour décubitus ventral	EL141 / 142	
	Bras et coude	Protège bras	AZ200 / 201
	Coussins pour repose-bras	EL070 / 72 / 401 / 402 OA101 / 070 / 071 / 072	
Corps	Coussins pour table	AZ610 / 611 EL030 / 31 OA030 / 31 / 32 / 37 / 40	
	Système de positionnement en décubitus ventral	EL905	
	Coussin pour décubitus ventral	EL903	
	Grand coussin pour décubitus ventral	EL904	
	Coussin pour décubitus ventral Elite	ELP914	
	Coussin universel	AZ500	
	Cylindres pour thorax	EL214 / 215 / 216 / 217 / 218 OA211 / 12 / 13	
	Positionneur semi-cylindrique	EL210	
	Positionneurs de patient	OA050 / 51 / 52 / 53	
	Sangle pour extrémité	OA113	
	Sangle de positionnement	OA110	
	Jambe et genou	Coussin pour bras/genou	EL401 / 402
		Protection des jambes	AZ400
Chevilles, talons & pieds	Positionneur semi-cylindrique	EL210	

Positionnement en décubitus latéral



Région du corps	Description du produit	Codes	
Tête et cou	Anneau têtère ouvert	EL021 / 022 OA021 / 022	
	Protection de la tête	AZ100	
	Anneaux têtères fermés	EL011 / 12 OA010 / 11 / 12	
	Coussin pour visage	OA140	
Bras et coude	Protège bras/genou	AZ200 / 201	
	Coussins pour repose-bras	EL070 / 72 / 401 / 402 OA101 / 070 / 071 / 072	
	Protection coude/bras	OA061 / 062	
Corps	Coussins pour table	AZ610 / 611 EL030 / 31 OA030 / 31 / 32 / 37 / 40	
	Coussin pour décubitus latéral	EL900	
	Système de positionnement en décubitus ventral	EL905	
	Coussin pour décubitus ventral Oasis Elite	ELP914	
	Coussin universel	AZ500	
	Positionneur pour Park-Bench latéral	EL913	
	Positionneurs de patient	OA050 / 51 / 52 / 53	
	Sangle de positionnement	OA110	
	Sangle pour extrémité	OA113	
	Cales demi-cylindriques pour thorax	EL214 / 215 / 216 / 217 / 218 OA211 / 212 / 213	
	Jambe et genou	Coussin de jambe Azure	AZ400
	Chevilles, talons & pieds	Protège talons et chevilles	OA200
Positionneur de jambe en décubitus latéral Oasis Elite		EL800	

Position de Lithotomie



Région du corps	Description du produit	Codes
Tête et cou	Protection de la tête	AZ100
	Anneaux têtes fermés	EL011 / 12 OA010 / 11 / 12
	Coussin pour visage	OA140
Bras et coude	Protège bras	AZ200 / 201
	Coussins pour repose-bras	EL070 / 71 / 72 / 401 / 402 OA101 / 070 / 071 / 072
	Protection coude/bras	OA061 / 062
	Coussin pour support de bras	OA100
Corps	Coussins pour table	AZ610 / 611 EL030 / 31 OA030 / 31 / 32 / 37 / 40
	Coussin pour sacrum	AZ300 / 301
	Positionneurs de patient	OA050 / 51 / 52 / 53
	Sangle de positionnement	OA110
	Sangle pour extrémité	OA113
	Cales demi-cylindriques pour thorax	EL214 / 215 / 216 / 217 / 218 OA211 / 212 / 213
	Jambe et genou	Coussins pour repose-jambes/étriers
Chevilles, talons & pieds	Protège talons et chevilles	OA200

Les dispositifs gonflables pour les soins de santé

Les atouts de l'air comprimé.



Ergotrics®

INFLATABLES FOR HEALTHCARE

La puissance de l'air comprimé en salle d'opération

Le transfert et positionnement grâce à l'air comprimé.

Ergotrics est spécialisé dans le positionnement et le repositionnement des patients en utilisant de l'air comprimé. Nous concevons et produisons des dispositifs gonflables qui permettent de positionner les patients de façon rapide, simple, ergonomique, hygiénique et ce, en toute sécurité. Toutes nos innovations sont basées sur une connaissance approfondie de l'anatomie et de la physiologie. De cette façon nous apportons aux patients des soins de meilleure qualité, de manière plus hygiénique et nous améliorons également les conditions de travail ainsi que l'efficacité des professionnels de la santé.

Pour un positionnement sûr et aisé dans une position de décubitus ventral optimale pour l'intervention, nous proposons les produits suivants:

01 | HUMMINGBIRD

Un pistolet à air conçu spécialement pour les professionnels de la santé.

Permet un gonflage et dégonflage de nos produits en toute sécurité avec de l'air comprimé de 4-6 bar. Compatible avec le raccord d'air comprimé dans la salle d'opération. Le HMB vous permet d'ajuster la dureté et la hauteur des coussins aux tailles propres du patient et aux exigences spécifiques de la procédure (que ce soit avant ou pendant l'intervention).



02 | IPS



Coussin Gonflable (usage unique par patient)
Le premier coussin au monde gonflable pour le positionnement en décubitus ventral lors d'interventions chirurgicales. L'IPS est un dispositif à usage unique. Chaque corps étant unique, l'IPS est disponible en tailles L (jusqu'à 150 kg) et XL (jusqu'à 180 kg).

3. | IXS



Coussin Gonflable (usage unique par patient)
L'IxS est un coussin gonflable à usage unique qui peut être utilisé de nombreuses façons pour soulever et soutenir le patient. Le personnel médical peut choisir la forme et la taille qui conviennent le mieux à l'intervention et au patient. Quelques exemples : L'IxS-R est utilisé pour soulever le thorax pour la position gèneupectorale/salam. L'IxS-R permet une position temporaire en décubitus dorsal pendant une chirurgie vasculaire ouverte et l'IxS-S crée une distraction indirecte pendant une procédure ALIF.

4. | IBO



Planche Gonflable (réutilisable)

L'outil par excellence pour le transfert des patients d'une façon sûre et contrôlée. Une nette amélioration ergonomique dans les soins hospitaliers. L'IBO est garanti pour au moins 50 applications. Le compteur donne la possibilité de suivre la fréquence d'utilisation de l'IBO grâce à des lumières LED.



“

Avec les outils Ergotrics, vous pouvez travailler plus rapidement, de manière plus hygiénique et plus saine pour le personnel ; tant lorsque vous inclinez le patient que lorsque le patient est en position ventrale.

-Prof Robert Pflugmacher, Universitätsklinikum Bonn
(Allemagne)

”

“

Les avantages ergonomiques sont évidents, mais nous pensons que le positionnement optimal permet également de réduire les pertes de sang et d'avoir une vue plus claire de la zone d'opération. Nous sommes en train de chercher à approfondir cette hypothèse.

-Dr. Paul Depauw, Hôpital Elisabeth Tweesteden Tilburg (Pays-Bas)

”

Avantages

POSITIONNEMENT OPTIMAL



Le coussin IPS a été conçu de façon à soutenir le squelette humain. De cette façon, il retient la cage thoracique et le bassin tout en libérant les tissus mous. Ceci réduit le risque de lésions cutanées, de congestions et de neuropathies.

RÉDUCTION DE CHARGE POUR LE DOS



La manipulation à effectuer par le personnel hospitalier est réduite au minimum : 100% de nos utilisateurs déclarent qu'aucune force (40%) ou un minimum de force (60%) est utilisé lors du positionnement des patients en position de décubitus ventral ; même confrontés à des patients qui pèsent plus de 100kg.

PERMÉABLE AUX RAYONS-X



Les solutions Ergotrics sont complètement radio-transparentes, ce qui facilite les interventions nécessitant de l'imagerie.

HYGIÈNE OPTIMALE



Les coussins de positionnement pour les opérations en position de décubitus ventral (IPS) sont à usage unique. Ils sont collés sur la peau du patient. Cela procure une meilleure hygiène dans la salle d'opération et les coussins restent bien en place lors du repositionnement du patient.





Evacuateurs de fumée



maXium[®] smart Vac

Le système innovant pour
l'évacuation efficace de fumée

maXium® smart Vac

Le nouvel évacuateur de fumée de KLS Martin s'engage pour la sécurité la plus élevée et les standards ergonomiques les plus exigeants

KLS Martin dispose d'une expérience longue de plusieurs dizaines d'années dans le domaine de la chirurgie laser et à haute fréquence. Avec le nouveau système innovant d'évacuation de fumée maXium® smart Vac KLS Martin introduit sur le marché un nouveau standard dans l'évacuation de fumées chirurgicales.

Ces dernières années, la demande en matière d'appareils aspirant et filtrant la fumée directement dans le champ opératoire, n'a cessé d'augmenter. L'évacuateur de fumée marVac®, en liaison avec nos appareils innovants de chirurgie HF et laser, est un partenaire fiable de votre bloc opératoire.

Constatez-le par vous-même!


Aperçu des avantages

- Aspiration simultanée pendant l'activation de l'appareil chirurgical HF
- Possibilité d'enregistrer et de lancer les paramètres individuels d'aspiration directement dans le programme d'application de l'appareil HF maXium®
- Capacité accrue du filtre grâce à une technologie spéciale de filtrage
- Raccordement de deux tuyaux d'évacuation, utilisés séparément ou simultanément
- Mode TURBO
- Mode LAP
- Détection d'une obstruction
- Possibilité de connexion à un système central d'évacuation

maXium® smart Vac

Choix et ajustement simples des paramètres

L'évacuateur de fumée maXium® smart Vac assure une protection fiable contre les particules, les virus, les gaz, ainsi que contre les substances cancérigènes qui peuvent éventuellement pénétrer dans les poumons. Si l'évacuateur de fumée est utilisé en mode automatique, il n'aspire que quand l'appareil HF, voire le laser est activé.

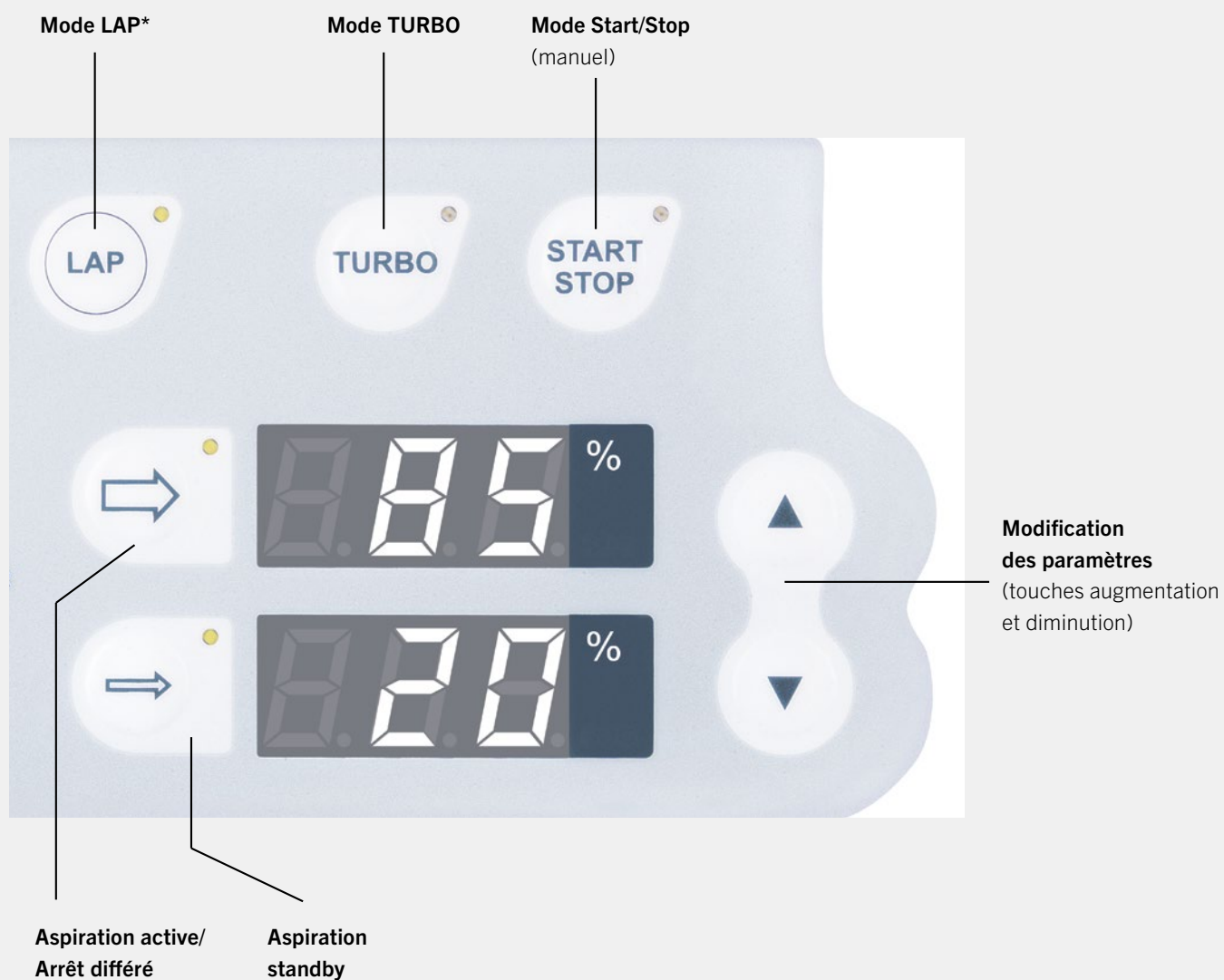



Mode TURBO

Il permet d'éliminer rapidement et efficacement une forte accumulation de fumée dans le champ opératoire.



Mode LAP*

Mis au point spécialement pour les applications laparoscopiques. Les paramètres d'évacuation sont automatiquement limités. Le reflux de gaz est réduit à une quantité minimale.



START/STOP

Autre alternative: L'évacuateur de fumée peut être activé ou désactivé manuellement.



Aspiration active/Aspiration d'attente

Les paramètres de l'Aspiration active, de l'Aspiration d'attente et de l'Arrêt différé peuvent être définis avant, voire pendant l'utilisation. Les touches de sélection permettent de changer ces paramètres de manière très simple.



Modification des paramètres

(touches augmentation et diminution)


* disponible uniquement si maXium® smart Vac est commandé avec mode LAP

maXium® smart Vac Filtre principal interchangeable

Le système de filtre conçu spécialement et satisfaisant à la norme **ULPA***- offre une protection efficace et fiable en salle d'opération.
La surface intérieure accrue du filtre assure une longue durée de vie au système de filtre.

Le filtre principal dispose de deux possibilités de raccordement.
Les tuyaux d'aspiration, d'un diamètre intérieur de 22 mm et de 10 mm, peuvent être connectés soit séparément, soit simultanément.

L'état du filtre est contrôlé de manière permanente.
Le changement nécessaire du filtre principal est affiché à temps sur l'écran.

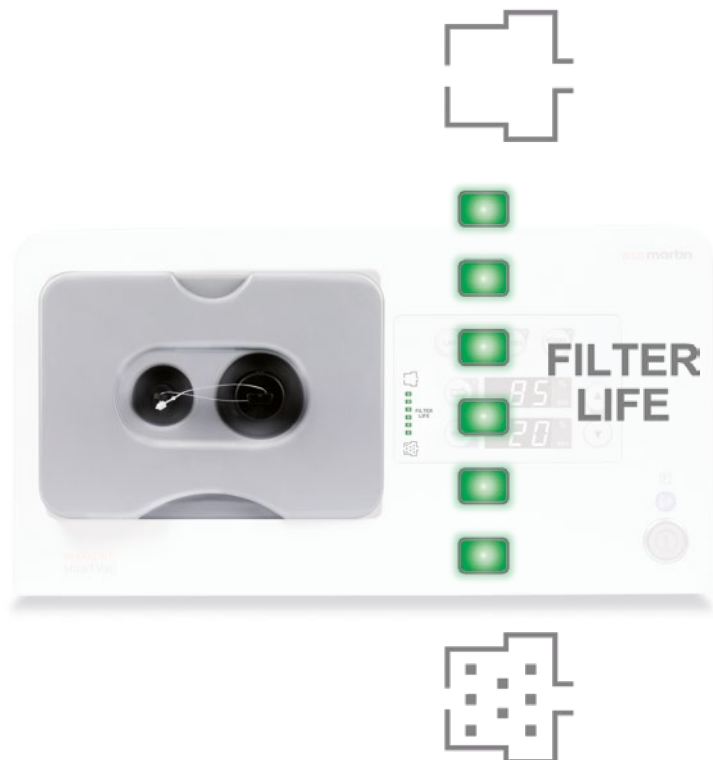

Si vous le souhaitez, l'évacuateur de fumée peut être connecté à un système central d'aspiration. Cette fonction peut être commandée en option.

* **ULPA** = **U**ltra **L**ow **P**enetration **A**ir

maXium® smart Vac
maXium®
maXium® smart Cart

L'appareil chirurgical de haute fréquence et l'évacuateur de fumée peuvent être placés sur le chariot pour appareils; vous avez aussi la possibilité de les intégrer dans un statif de plafond.

Réglage des paramètres de l'évacuateur de fumée facile pour l'utilisateur grâce à MCB (=Martin-Communication-Bus)

Les paramètres de maXium® smart Vac peuvent être définis, modifiés et enregistrés dans le programme d'utilisation correspondant via le générateur HF maXium®.*



maXium®

* Prière de noter que pour cette fonction, il faut maXium® HW06 et la version logicielle V3.398.

Efficacité très élevée – La fumée chirurgicale est aspirée directement dans le champ opératoire – là où elle est produite.

KLS Martin propose une multitude d'accessoires pour l'évacuation de gaz de combustion qui sont produits par l'utilisation de lasers médicaux ainsi que par la chirurgie de haute fréquence.

De plus, KLS Martin propose une solution qui permet d'installer un applicateur clip-on (à usage unique) sur une poignée à usage multiple.



80-060-03-04

(unité d'emballage = 12 pièces)

Porte-électrode avec électrode Ø 2,4 mm,
avec applicateur clip-on sur le dessus, stérile, à usage unique
Longueur du tuyau = 3 m, diamètre du tuyau = 22 mm

De plus, KLS Martin propose une solution qui permet d'installer un applicateur clip-on (à usage unique) sur une poignée à usage multiple.



80-060-02-04

(unité d'emballage = 12 pièces)

Applicateur clip-on, stérile,
à usage unique
Longueur du tuyau = 3 m
Diamètre du tuyau = 22 mm
pour porte-électrodes KLS Martin
réf. 80-217-xx-04*, 80-210-12-04*

* Les porte-électrodes ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément.
Pour plus d'accessoires, reportez-vous à la page 10.



smartLap

Électrodes pour laparoscopie
avec évacuateur de fumée

Pointes de travail de haute qualité

Crochet en L

Crochet en J

Aiguille



Aperçu des électrodes smartLap

Item No.	Description
83-525-30-04	Électrode smartLap, Ø 5 mm, avec crochet en L
83-525-31-04	Électrode smartLap, Ø 5 mm, avec crochet en J
83-525-32-04	Électrode smartLap, Ø 5 mm, avec aiguille

Accessoires

80-060-04-04	Tube d'aspiration à usage unique pour l'évacuation de la fumée Ø 10 mm avec raccord Luer-Lock
83-120-51-04	Câble de raccordement, monopolaire Ø 4 mm, 3 broches

Informations pour les commandes

Evacuateur de fumée **maXium®** smart Vac et accessoires

Référence	Description du produit
80-062-00-04	Evacuateur de fumée maXium® smart Vac avec mode LAP , 220 V y compris filtre principal (réf. 80-060-01-04)
80-062-00-10	Evacuateur de fumée maXium® smart Vac avec mode LAP , 100 V y compris filtre principal (réf. 80-060-01-04)
80-062-01-04	Evacuateur de fumée maXium® smart Vac, 220 V y compris filtre principal (réf. 80-060-01-04)
80-062-01-10	Evacuateur de fumée maXium® smart Vac, 100 V y compris filtre principal (réf. 80-060-01-04)

Référence	Choix d'accessoires individuels
80-060-01-04	Filtre principal pour évacuateur de fumée maXium® smart Vac (norme ULPA)
80-811-50-04	Interrupteur à une pédale pour l'activation manuelle par le chirurgien
80-060-06-04	Adaptateur pour connexion à un système central d'évacuation (Ø 22 mm)

Référence	Options de connexion pour activation automatique (via générateur HF ou laser)
80-091-01-04	Câble de connexion MCB (maxium® et maxium® smart Vac)
80-060-05-04	Adaptateur de détection de courant secteur (connexion ISA)
76-100-60-04	Rallonge pour la connexion maXium® smart Vac/laser
80-091-02-04	Câble de connexion ME MB2/3 avec maXium® smart Vac
79-800-02-04	Câble d'interconnexion maxium® smart Vac vers Limax® 60/diomax® 980/1550®

Référence	Accessoires et consommables
80-060-02-04	Applicateur clip-on, stérile, à usage unique, longueur de tuyau = 3 m, Ø 22 mm, pour utilisation avec porte-électrodes à usage multiple KLS Martin 80-217-xx-04 et 80-210-12-04 (unité d'emballage = 12 pièces)
80-060-03-04	Porte-électrode avec électrode Ø 2,4 mm, avec applicateur clip-on sur le dessus, stérile, à usage unique, longueur de tuyau = 3 m, diamètre de tuyau = 22 mm (unité d'emballage = 12 pièces)
80-060-04-04	Tuyau d'aspiration, stérile, Ø 10 mm avec raccord Luer-Lock, longueur = 2,5 m, (par exemple pour le raccordement au trocart) (unité d'emballage = 20 pièces)
79-225-02-04	Entonnoir, aplati, raccord Ø 22 mm, autoclavable 50 fois à 134 °C max.
79-225-03-04	Tube d'aspiration pour tuyau d'aspiration Ø 22 mm, autoclavable 50 fois à 134 °C max.
79-225-06-04	Raccord de tuyau Ø 22 mm (f) sur Ø 10 mm (m), autoclavable 50 fois à 134 °C max.
79-225-07-04	Raccord de tuyau Ø 22 mm (f) sur Ø 22 mm (m), autoclavable 50 fois à 134 °C max.
79-225-08-04	Tuyau d'aspiration Ø 22 mm, longueur = 3 m, autoclavable 50 fois à 134 °C max.
79-225-09-04	Tuyau d'aspiration Ø 10 mm, longueur = 2 m, autoclavable 50 fois à 134 °C max.
79-225-10-04	Tuyau d'aspiration, Ø 22 mm, longueur = 1,80 m, à usage unique (unité d'emballage = 25 pièces)
79-225-11-04	Préfiltre (norme HEPA), Ø 22 mm (m/f), stérile, à usage unique (unité d'emballage = 20 pièces)

Données techniques	
Alimentation secteur	220 – 240 V ±10 %; 50 / 60 Hz 100 V / 110 V / 120 V / 127 V ±10 %; 50 / 60 Hz
Puissance d'évacuation de l'appareil	750 l/min ±10 %
Puissance absorbée	220 – 240 V, max. 900 VA 100 V / 110 V / 120 V / 127 V, max. 600 VA
Activation	Activation automatique (remote), manuelle via la touche sur la face avant, en option via l'interrupteur à pédale ou l'adaptateur de détection de courant secteur
Interfaces	Interrupteur à pédale, MCB, USB
Classe de protection	I
Degré de protection contre l'action de l'eau	IP 2X
Classification selon MPG (loi allemande sur les dispositifs médicaux)	Ila
Niveau sonore	max. 56,5 db (A) à 100 % de puissance d'aspiration max. 60.0 db (A) en mode turbo
Classe d'application	CF; protection anti-déibrillation
Module de filtre principal	ULPA, efficacité 99,9995 % @ 0,1 – 0,2 µm Pour tuyaux d'un diamètre intérieur 22 mm et 10 mm Durée de vie du filtre : 40 h L'appareil indique quand changer le filtre
Poids	marVac® Evacuateur de fumée marVac®, 220 – 240 V, 10,9 kg Evacuateur de fumée marVac® avec mode LAP, 220 – 240 V, 11,9 kg Evacuateur de fumée marVac®, 100 V / 110 V / 120 V / 127 V, 12,9 kg Evacuateur de fumée marVac® avec mode LAP, 100 V / 110 V / 120 V / 127 V, 13,9 kg maXium® smartVac Evacuateur de fumée maxium® smart Vac, 220 – 240 V, 10,6 kg Evacuateur de fumée maxium® smart Vac avec mode LAP, 220 – 240 V, 11,6 kg Evacuateur de fumée maxium® smart Vac, 100 V / 110 V / 120 V / 127 V, 12,6 kg Evacuateur de fumée maxium® smart Vac avec mode LAP, 100 V / 110 V / 120 V / 127 V, 13,6 kg
Antiparasitage	Selon la norme IEC 60601-1-2
Dimensions	Largeur 390 mm Hauteur 218 mm Profondeur 460 mm (avec filtre principal)
Conditions ambiantes de transport	Température ambiante -25 °C à +70 °C (-13 °F à +158 °F) Humidité rel. de l'air 10 - 100 % Pression atmosphère 500 hPa à 1060 hPa
Conditions ambiantes d'exploitation	Température ambiante +10 °C à +40 °C (+50 °F à +104 °F) Humidité rel. de l'air 30 - 75 % Pression atmosphère 700 hPa à 1060 hPa
CE 0297	Conforme aux dispositifs médicaux de classe IIa



Extracteurs de lames

 **CLICKSMART®**

BladeFLASK

100 | Système d'extraction de lames de scalpel



Protège-toi

Enlèvement sûre de lame

▲ Les blessures oubliées dues aux objets tranchants

Les blessures par scalpel sont 200 fois plus susceptibles de se produire que celles dues aux aiguilles. Elles sont particulièrement fréquentes dans les cadres chirurgicaux. Malheureusement, de nombreux utilisateurs et administrateurs cliniques ont sous-estimé la probabilité de telles blessures.

Les coupures dues aux scalpels peuvent arriver à tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre expérience dans le maniement des scalpels. Ces coupures peuvent entraîner des infections, des maladies transmises par le sang et une détresse psychologique. D'autres blessures graves peuvent imposer une microchirurgie afin de réparer les artères, les nerfs et les tendons digitaux.


De nombreuses blessures par scalpel peuvent aisément être évitées grâce au BladeFLASK Qlicksmart, le premier extracteur de lames une main au monde.



▲ L'extracteur de lames primé



Les BladeFLASK Qlicksmart ont extrait en toute sécurité plus de 70 millions de lames de scalpels contaminées et évité jusqu'à 165 000 blessures au niveau mondial.

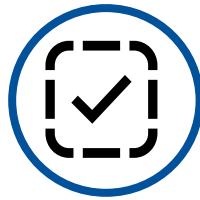

Le BladeFLASK est facile à utiliser avec une action rapide « pousser, cliquer et tirer » pour extraire et protéger les lames de scalpel usagées.



Cette solution facile à utiliser constitue une alternative plus économique aux scalpels de sécurité.



Utilisé avec la remise d'instruments sans mains, le BladeFLASK peut éviter jusqu'à 5 fois plus de blessures qu'un scalpel de sécurité.



Le BladeFLASK permet aux utilisateurs de lames de scalpels de conserver leurs préférences pour les manches métalliques standards.



Le BladeFLASK a reçu de nombreuses récompenses, ce qui prouve son aspect pratique et son efficacité dans la réduction des blessures dues aux scalpels.

La sécurité sur le lieu de travail constitue le droit de tous les professionnels de santé et la responsabilité de tous les employeurs.

Utilisez le BladeFLASK Qlicksmart et protégez-vous.

BladeFLASK

100 | Système d'extraction de lames de scalpel

QLICKSMART®
... et protégez-vous

Spécifications


Version couleurs	Rouge - USA Jaune – pour tous les autres pays
Référence produit	QFRGEN – version rouge QFYGEN – version jaune
Code GMDN	46235
Capacité	100 lames – se bloque automatiquement lorsque la capacité maximale est atteinte
Lames & manches compatibles*	Manches: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Lawton manche long Lames: #10, 10a, 11, 12, 13, etc. jusqu'à #25a, 27 et 36 inclus.
Lames & manches incompatibles	Manches Baron, manches Beaver, manches à usage unique
Dimension (unité)	Longueur 11cm , Largeur 9cm , Hauteur 14cm
Poids (unité)	Approximativement 250g
Accessories	Support de montage – maintient le BladeFLASK en place permettant l'extraction des lames à une main

Matériau	Corps: Acrylonitrile-butadiène- styrène (ABS) Mécanisme interne: Polyacetal (POM)
Latex	Non
DEHP	Non
Sterile	Non
Réutilisable	Multi-usage – extrait 100 lames avant élimination
Mode d'élimination	Comme déchet médical – veuillez respecter les procédures de votre établissement en matière d'élimination des déchets médicaux.
Informations réglementaires	Australie – Répertoire dans TGA ARTG NO: 146821 Etats-Unis- Agrément de pré-commercialisation FDA 510(K) #K983367 comme conteneur pour objets tranchants Europe – Dispositif médical de Classe I conformément à la Directive du Conseil 93/42/EEC avec marquage CE

* Certains éléments peuvent ne pas être compatibles avec le BladeFLASK Clicksmart

Utilisation du BladeFLASK

ÉLÉMENTS DE VOTRE BladeFLASK:

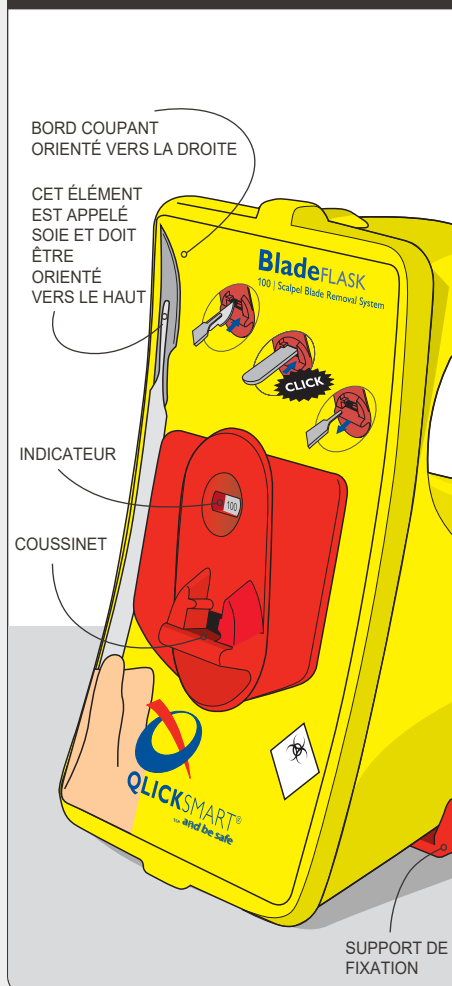

FIXER AU MUR OU SUR UN CHARIOT :


1. Si vous n'avez pas monté votre BladeFLASK préalablement, préparez le support de montage*.

A LA BASE DU SUPPORT COMPORTE UN ADHÉSIF DOUBLE FACE

B OU UTILISER DES VIS.

* Voir le modèle d'adaptation et les instructions dans l'emballage du support.

2. Le BladeFLASK peut être fixé au mur, sur un chariot ou à la table.

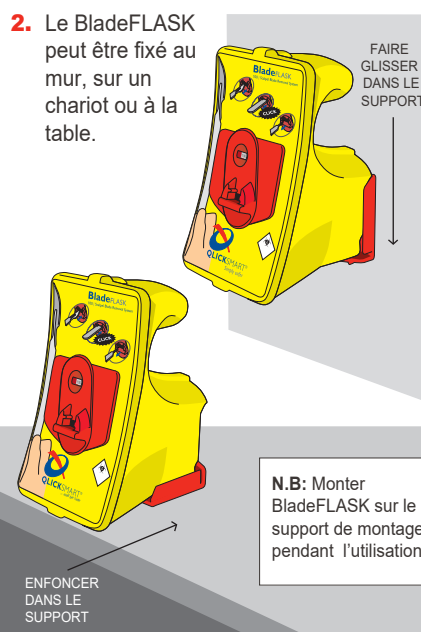

N.B: Monter BladeFLASK sur le support de montage pendant l'utilisation

EXTRAIRE LA LAME À UNE SEULE MAIN:

1. Placer la lame sur le coussinet avec le bord coupant orienté vers la droite (ou « soie » vers le haut).

2. Pousser le manche du scalpel dans le BladeFLASK jusqu'au clic.

3. Extraire le manche.

N.B:

- * Étape 3 assurer l'enlèvement et inclusion de la lame dans le BladeFLASK.
- * BladeFLASK doit être utilisé avec le support de montage.
- * Le BladeFLASK est éliminé comme déchet médical après l'insertion de 100 lames

BladeFlask EVO

100 | Système d'extraction de lame chirurgicale

L'unique
extracteur de
lame chirurgicale
à une seule main
a évolué.



Une évolution à la norme mondiale en matière d'extraction de lame chirurgicale à une main.

Des études récentes ont démontré que les blessures de lame de bistouri sont 6 fois plus susceptibles de se produire que les blessures par piqûre d'aiguille¹. Malheureusement, de nombreux utilisateurs et administrateurs cliniques ont sous-estimé la probabilité de ces blessures². Ces blessures peuvent arriver à n'importe qui, incluant vous, quelle que soit votre expérience dans la manipulation des bistouris et peuvent entraîner des infections, des maladies transmissibles par le sang et la détresse psychologique. En plus, des blessures graves pourraient nécessiter une microchirurgie pour réparer les artères, les nerfs et / ou les tendons des doigts.

Le Qlicksmart BladeFlask EVO peut accueillir encore plus de types de manches et de lames de bistouri y compris les grands bistouris d'autopsie, les grosses poignées rondes et les versions de forme hexagonale - vous offrant donc une plus grande flexibilité dans son utilisation avec le bistouri de votre choix. Il est si simple à utiliser à une seule main. Adoptez donc la sécurité avec ce nouveau standard en matière de retrait de lames de bistouri.




Les extracteurs de lames Qlicksmart ont éliminé en toute sécurité plus de 70 millions de lames de bistouri contaminées, évitant ainsi jusqu'à 150 000 blessures dans le monde.



Il est simple à utiliser avec une action rapide de « placer, pousser, cliquer et tirer ». Cette solution facile à utiliser offre également une alternative moins coûteuse aux bistouris de sécurité ou aux bistouris à usage unique.



Avec peu ou pas de formation requise, les extracteurs de lame à une main de Qlicksmart ont démontré de manière fiable la réduction du risque de blessures par lame de bistouri.

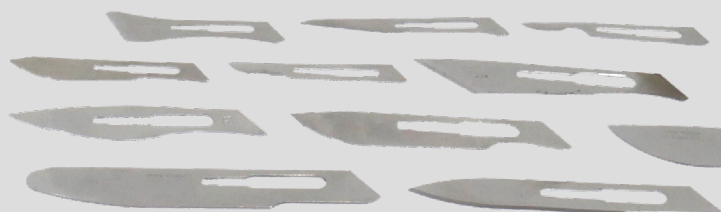

BladeFlask EVO

100 | Scalpel Blade Removal System


QLICKSMART®
...and be safe

Spécifications

Versions (couleurs)	Rouge - USA Jaune - International
Code de Produit	Rouge - QBVRGEN Jaune - QBVYGEN
Code GMDN	46235
Capacité de lames	100 Lames
Compatibilité de Poignées et Lames	Toutes les lames de bistouri BP disponibles commercialement, y compris (mais sans se limiter à) la taille PM60A, PM60B, PM70. Tous les manches de bistouri disponibles commercialement, y compris (mais sans se limiter à) PM6, PM8.
Dimensions (par unité)	9cm x 13.4cm x 11.3cm
Poids (par unité)	250g
Accessoires	Support mural - maintient le BladeFLASK EVO en place pour permettre le retrait de la lame d'une seule main.

Matériel	Boitier: Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Mécanisme: ABS + Acier inoxydable
Réutilisable	Multi-usage: Chaque unité enlève 100 lames avant de s'inactiver
Méthode de disposition	Se conforme à la norme AS 4031: 1992 (contenants non réutilisables pour la collecte d'articles médicaux tranchants utilisés dans les zones de soins de santé). Il est certifié conforme aux exigences de transport des Nations Unies pour les marchandises dangereuses. Le logo de la substance infectieuse sur l'étiquette avant et la couleur correcte du récipient pour objets tranchants de l'unité permettent de l'éliminer comme déchet médical. Veuillez suivre les procédures de votre établissement pour l'élimination des déchets médicaux tranchants.
Information Régulatoire	Australie - Classe I USA - FDA Classe I Europe - Classe I dispositif médical conforme à la directive du Conseil

Instructions d'utilisation

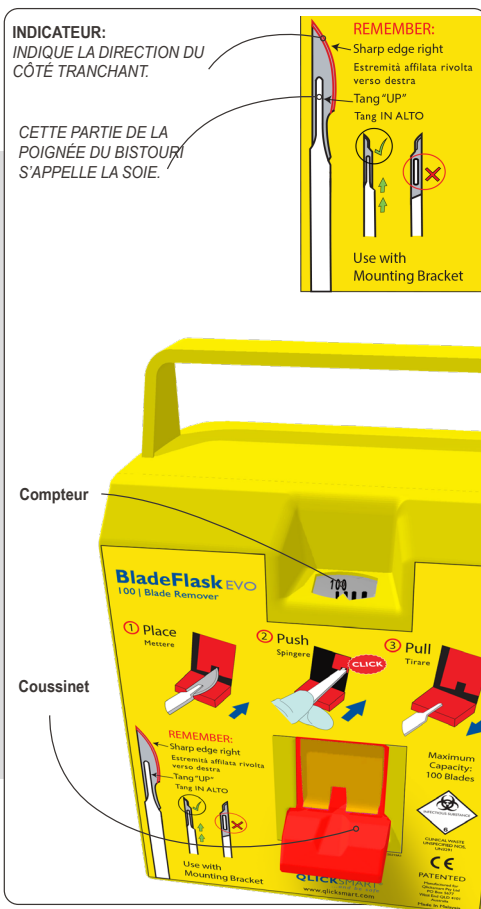

MOUNT

FIXER AU MUR OU SUR UN CHARIOT

- Si vous n'avez pas monté votre BladeFLASK EVO préalablement, préparez le support de montage*.
 - LA BASE DU SUPPORT COMPORTE UN ADHÉSIF DOUBLE FACE
 - OU UTILISER DES VIS

* Voir le modèle d'adaptation et les instructions dans l'emballage du support.
- Le BladeFLASK EVO peut être fixé au mur, sur un chariot ou à la table.

ENFONCER DANS LE SUPPORT

GLISSER VERS LE BAS DANS LE SUPPORT

N.B: Monter BladeFLASK EVO sur le support de montage pendant l'utilisation.

REMOVE BLADE

EXTRAIRE LA LAME À UNE SEULE MAIN

- Placer la lame sur le coussinet avec le bord coupant orienté vers la droite (ou « soie » vers le haut).
- Pousser le manche du scalpel dans le BladeFLASK EVO jusqu'au clic.
- Extraire le manche.

N.B : Le BladeFLASK EVO est éliminé comme un déchet médical suivant son verrouillage automatique à pleine capacité.

1. A. Wong, H. Nguyen, R. Eley, M. Sinnott, "Purchase data: a proxy for safety status," *Journal of Hospital Infection*, Volume 105, Issue 4, 2020, Pages 657-658, ISSN 0195-6701, <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.05.004>.
2. Kerr HL, Stewart N, Pace A, Elsayed S. (2009). "Sharps injury reporting amongst surgeons." *Ann R Coll Surg Engl*. 91(5):430-432.



Gants

GANTS CLEAR PF - MEDICA EUROPE



REFERENCES

02004	GANT D'EXAMEN - NON STERILE - TAILLE S - SANS POUDRE - Carton de 1000 unités (10 boîtes de 100 unités)
02005	GANT D'EXAMEN - NON STERILE - TAILLE M - SANS POUDRE - Carton de 1000 unités (10 boîtes de 100 unités)
02006	GANT D'EXAMEN - NON STERILE - TAILLE L - SANS POUDRE - Carton de 1000 unités (10 boîtes de 100 unités)
02007	GANT D'EXAMEN - NON STERILE - TAILLE XL - SANS POUDRE - Carton de 1000 unités (10 boîtes de 100 unités)

CARACTERISTIQUES

*Effectuer des examens médicaux, des procédures diagnostiques et thérapeutiques pour protéger le patient contre la contamination croisée ou l'infection. Matière : Polychlorure de vinyle. Revêtement en polyuréthane, ce qui les rend faciles à enfiler. Sans poudre.
 Tailles disponibles : S, M, L, XL*

- * Couleur blanc laiteux
- * Sans carbamates, thiurames ou MBT
- * NQA : 1.5
- * Résistance : 3.6N
- * Extensibilité maximale : 350%

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fabricant	MEDICA EUROPE
Lieu de fabrication	HOLLANDE
Marquage CE	567925 - Classe I
Emballage	CARTON
Conditionnement	CARTON DE 10 BOITES DISTRIBUTRICES DE 100 UNITES
Latex	NON
Mode de stérilisation	N/A
Nombre de cycles de stérilisation tolérés	N/A - Usage Unique
Présence tissus animaux ou autres	N/A
Études cliniques	N/A
Normes Spécifiques	ISO13485: 2003 & ISO ENVIRONNEMENT 14001:2004
Pharmacopée	N/A





Générateur électrochirurgical & accessoires*

*Catalogue complet à la demande



maxium[®] smart C

La touche de simplicité

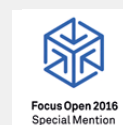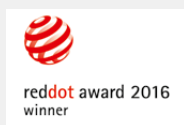

Aucune crainte du contact – le nouveau **maXium®** smart C

Notre toute dernière innovation pour la chirurgie à haute fréquence ne laisse personne indifférent. Et c'est voulu, car maXium® smart C allie la philosophie d'utilisation ayant fait ses preuves maXium® à la technologie d'écran tactile la plus moderne. L'avantage, c'est ce qui fait son aspect génial : l'utilisation simple, intuitive et compréhensible dans l'application quotidienne – pour l'incision comme pour la coagulation.

Grâce à l'affectation horizontale claire des deux sorties monopolaires et de la sortie bipolaire, de même que l'affichage permanent de tous les paramètres pertinents à l'écran, vous connaissez toujours les réglages respectifs. Vous pouvez enregistrer très simplement les paramètres que vous avez programmés dans les programmes spécifiques à l'utilisateur et les invoquer en tout temps lorsque nécessaire. Vous disposez pour ce faire d'un maximum de 50 emplacements mémoire.



Et pour vous offrir encore plus de confort dans l'utilisation, nous avons déjà programmé les réglages propres à l'utilisation dans différentes disciplines chirurgicales. Difficile de faire plus simple. Ou plus efficace. Vous adorerez maXium® smart C. Tout comme votre équipe au grand complet.

- ✓ **La plus haute sécurité**
- ✓ **La technique la plus moderne**
- ✓ **L'utilisation la plus simple**
- ✓ **Polyvalence extrême**
- ✓ **Trois modules de connecteurs différents**

Peu importe ce que vous faites –
une pression du doigt suffit.


Accès direct à tous les paramètres importants. Vous pouvez d'ores
et déjà procéder à tous les réglages de manière intuitive grâce à la
philosophie de commande maXium® établie au moyen de l'écran
tactile du maXium® smart C.



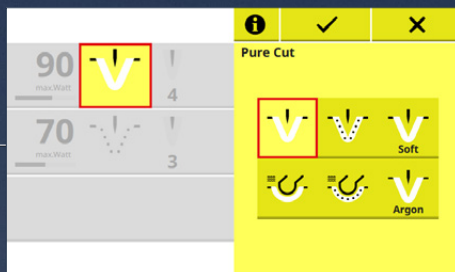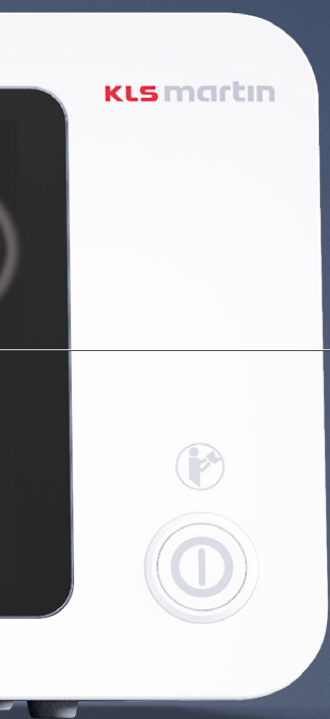


Type de courant

Les icônes éprouvées et claires permettent une sélection rapide et simple.

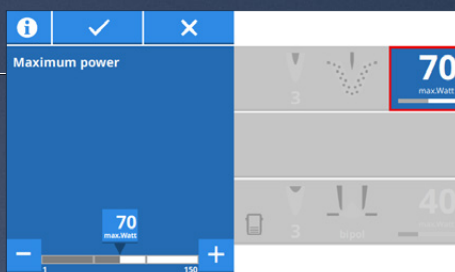

Réglage de la puissance


Le curseur et / ou les touches +/- permettent un réglage rapide et simple de la puissance, même à des incréments de 1 watt.

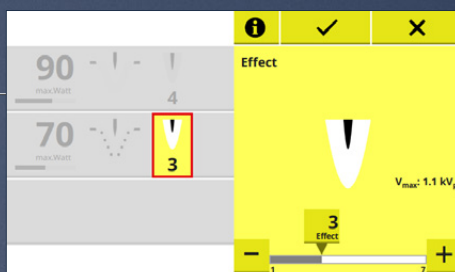

Réglage de l'effet

Indépendamment de la puissance, l'effet peut aussi être réglé de manière personnalisée même à un très faible niveau de puissance.

Votre avantage : Vous bénéficiez d'une performance variable maximale dans toutes les gammes de puissance.

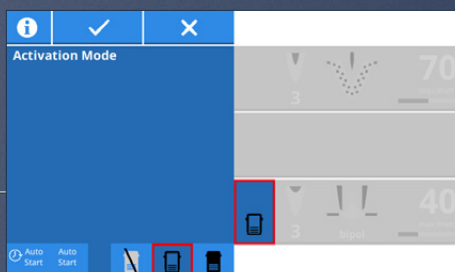


Activation

Simplicité d'attribution de l'activation – que cela soit au moyen d'un interrupteur à pédale ou d'une fonction d'auto-démarrage.

maXium® smart C


Un parfait symbole de puissance

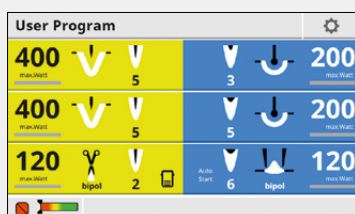

Des réserves de puissance élevées dans toutes les situations

Quel que soit ce que vous opérez : maXium® smart C dispose de réserves de puissance élevées et est donc parfaitement équipé pour une variété de possibilités d'utilisation dans toutes les disciplines chirurgicales :


- Incision monopolaire jusqu'à 400 watts
- Coagulation monopolaire jusqu'à 200 watts
- Incision et coagulation bipolaires jusqu'à 120 watts

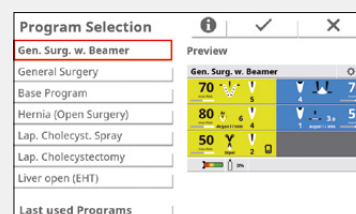

Manipulation très aisée grâce à une philosophie de programme établie


La philosophie de programme maXium® établie vous permet d'utiliser les programmes préenregistrés dans maXium® smart C ou d'enregistrer des programmes que vous aurez définis vous-même.

Options

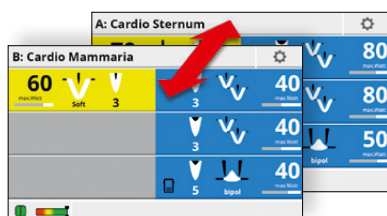


Mode SWAP

Simplicité de changement de programme depuis la zone stérile. Avec le mode SWAP, vous pouvez changer de programme depuis la zone stérile au moyen de l'interrupteur à pédale ou de la poignée et adapter ainsi vous-même la puissance d'incision ou de coagulation à la situation opératoire.

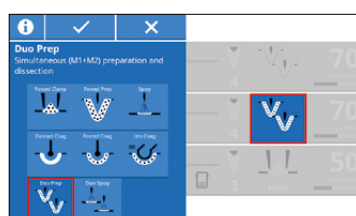

Duo-Prep/Duo-Spray

Les courants Duo permettent de travailler au moyen de deux sorties monopolaires de manière simultanée et le cas échéant sur deux champs opératoires différents comme dans le cadre de la chirurgie cardiaque, la dissection des veines des jambes à faible coagulation et la dissection simultanée des glandes mammaires ou dans le cadre de la chirurgie mammaire pour la coagulation superficielle sans contact à très faible profondeur et à taux de carbonisation réduit.

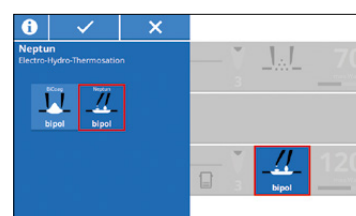

Neptun

Neptun est une forme de courant bipolaire pour la coagulation à l'aide d'un liquide (méthode EHT = électrohydrothermosation) utilisée de préférence dans la chirurgie parenchymateuse (foie, rate, rein) avec des pincettes à irrigation. La méthode EHT se caractérise par un effet de coagulation homogène et délicat ainsi qu'une approche rapide.

Polyvalence grâce aux différents modules de connecteurs



maXium® smart C est proposé en trois modules de connecteurs différents, ce qui permet d'éviter autant que possible d'utiliser des adaptateurs.




Disponible en trois versions différentes

Dans sa version standard, le maXium® smart C vous offre trois canaux de travail associés à deux sorties monopolaires et une sortie bipolaire. Ces canaux sont disponibles en trois configurations différentes :

- Version m : avec raccords pour accessoires KLS Martin
- Version i : avec raccords pour accessoires internationaux
- Version e : avec raccords pour accessoires Erbe

Vous pouvez utiliser sans problème des accessoires de tiers compatibles avec les connecteurs au moyen des différentes configurations de connecteurs du maXium®.

Sélection des électrodes neutres au moyen du **maXium®** smart C

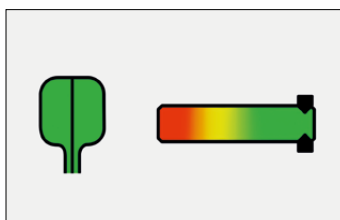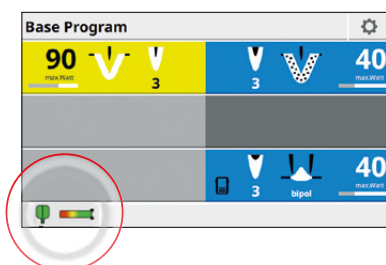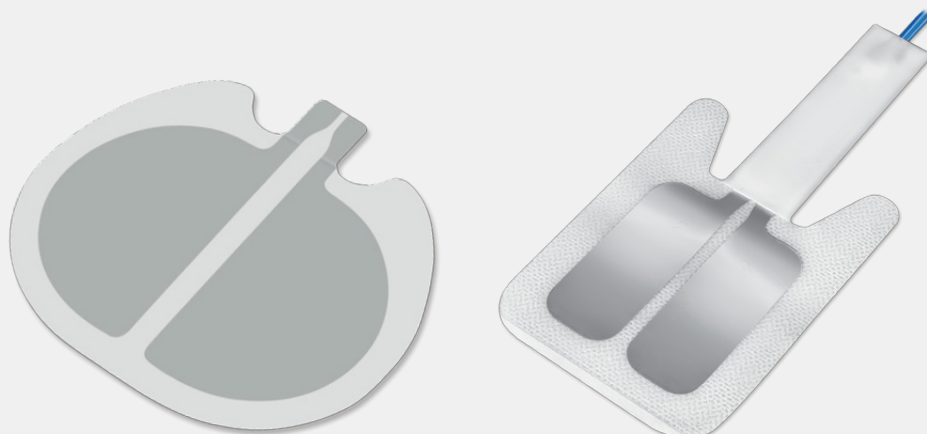

PCS – Sécurité maximale grâce à la surveillance novatrice par électrode neutre

Avec le système de contrôle patient PCS (Patient Control System) et l'indicateur par électrode neutre novateur, maXium® smart C garantit une sécurité maximale pour le patient comme pour l'utilisateur.

Il est possible de choisir entre différentes électrodes neutres lors de la sélection. Différentes restrictions sont appliquées à la sélection d'une électrode neutre sur le dispositif :

- Utiliser une EN à double zone : Seules des EN à double zone peuvent être utilisées (PCS* active)
- Utiliser **EN bébé** : Certaines formes de courant ne sont pas autorisées / la puissance des formes de courant disponibles est limitée à 30 watts maximum.

Conçu à cet effet : **maXium® smart Cart**

maXium® smart C s'intègre. Partout. Et surtout sur le chariot maXium® smart Cart, le guéridon à instruments destiné à toute la gamme maXium® smart. Toute la station de travail de chirurgie HF, avec le faisceau d'argon maXium® smart Beam et le dispositif d'aspiration de fumée maXium® smart Vac, est prête à être utilisée à tout moment. Et s'il n'est pas nécessaire d'avoir l'intégralité du programme : maXium® smart C s'insère aussi parfaitement comme unité autonome à tout dispositif plafonnier.

maXium® smart C

Pour une chirurgie à haute fréquence génialement simple, d'une simple pression du doigt.

maXium® smart Beam

Pour les utilisations à base d'argon dans les interventions en laparoscopie et en chirurgie ouverte.

maXium® smart Vac



Pour une vision dégagée et une sécurité maximale pendant l'utilisation.

maXium® smart Cart

Pour l'application mobile de toute la gamme smart.



Ils font partie du processus :
les accessoires **maXium®** smart

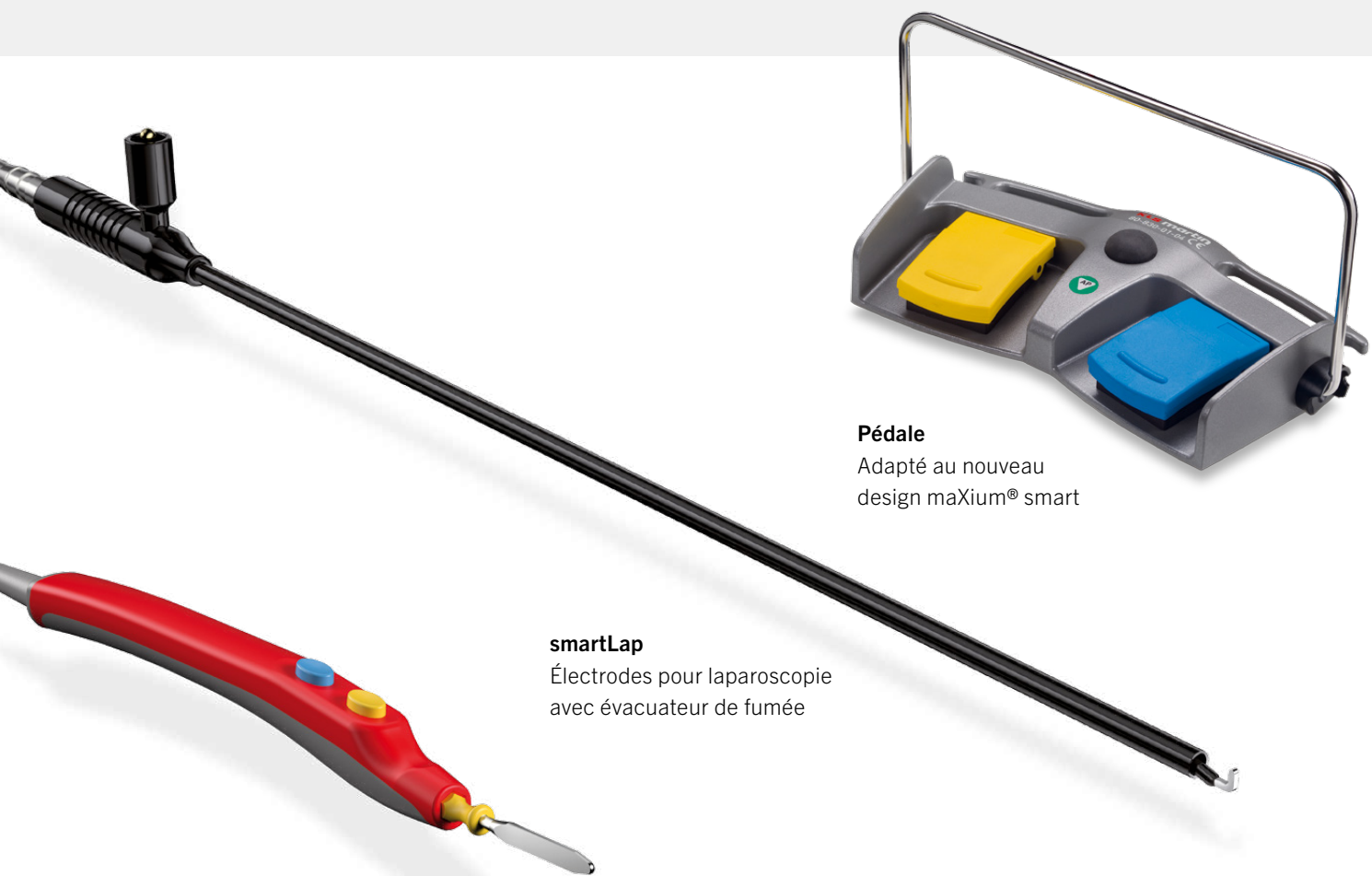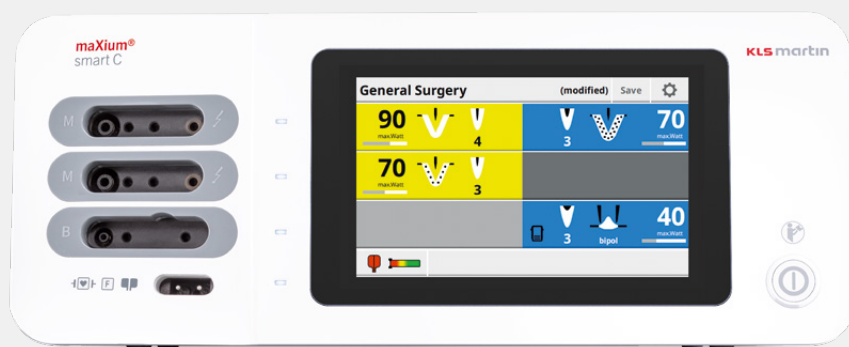

Pédale
Adapté au nouveau
design maXium® smart

smartLap
Électrodes pour laparoscopie
avec évacuateur de fumée

smartPen
Poignée d'électrode –
compacte, ergonomique, efficace

Caractéristiques techniques maXium® smart C

Alimentation électrique	
Alimentation électrique	100 V – 240 V ± 10 %
Courant secteur	6,3 A
Fusible	6,3 A
Fréquences nominales	350 - 500 kHz
Puissance absorbée en mode Veille	45 watts
Puissance absorbée max.	550 watts

Puissance de sortie	
Puissance de coupe	max. 400 watts
Puissance de coagulation	max. 200 watts

Système de sécurité	
PCS et indicateur EN	
Historique des erreurs	
Historique d'activation	

Poids et encombrement	
Poids	10,2 kg
Largeur x hauteur x profondeur	390 x 160 x 442 mm

Normes	
Classification selon MPG (loi allemande sur les dispositifs médicaux)	II b
Classe de protection	I selon la norme EN 60-601-1
Type pièce d'application	CF ; résistant à la défibrillation
Marquage	CE 0297 en vertu de la directive 93/42/CEE

Caractéristiques techniques maXium® smart Cart

4 raccords d'équipotentialité (POAG)
4 roulettes doubles avec 2 freins

Poids et encombrement	
Poids	40 kg
Largeur x hauteur x profondeur	757 x 1077 x 657 mm

Données de commande

Designation	Référence
maXium® smart C, version « m »	80-043-00-04
maXium® smart C, version « i »	80-043-01-04
maXium® smart C, version « e »	80-043-02-04
Option mode SWAP	80-094-00-04
Option Duo-Prep, Duo-Spray	80-094-01-04
Option Neptun	80-094-02-04
maXium® smart Beam	80-043-10-04
maXium® smart Vac, avec mode LAP, 220 V	80-062-00-04
maXium® smart Vac, 220 V	80-062-01-04
maXium® smart Cart	80-048-00-04

Caractéristiques techniques maXium® smart Beam

Alimentation électrique	via maXium® smart C
Fusible	M 1,6 A
Puissance absorbée	max. 40 watts
Classe de protection	I
Classification selon MPG (loi allemande sur les dispositifs médicaux)	II b
Débit d'argon pour CUT	de 0,1 à 12 l/min ± 20 % désactivable par le réglage sur 0,0 l/min
Débit d'argon pour COAG	de 0,1 à 12 l/min ± 20 % désactivable par le réglage sur 0,0 l/min
Courants de fuite BF	selon CEI 601, partie 1 (vérifiés conjointement avec le générateur HF maXium®)
Type pièce d'application	CF; résistant à la défibrillation
Mode d'exploitation	INT 10 s/30 s (= facteur de service 25 %)

Poids et encombrement	
Poids	7,8 kg
Largeur	390 mm
Hauteur (sans boulon à tête sphérique)	95 mm
Profondeur	466 mm







Normes	
Classification selon MPG (loi allemande sur les dispositifs médicaux)	II b
Classe de protection	I selon la norme EN 60-601-1
Type pièce d'application	CF ; résistant à la défibrillation
Marquage	CE 0297 en vertu de la directive 93/42/CEE

Designation	Référence
Interrupteur à pédale double	80-830-00-04
Interrupteur à pédale double avec mode SWAP	80-830-01-04
Interrupteur à une pédale	80-830-02-04
Interrupteur à pédale double avec mode SWAP, sans fil	80-830-04-04
Bloc d'alimentation pour 80-830-04-04	80-830-05-04
Câble de connexion MCB	80-091-01-04
maXium® smart Cart	80-048-00-04
Rail standard pour maXium® smart Cart	80-048-01-04
Transformateur d'isolement pour maXium® smart Cart	80-048-02-04
Logement pour maXium® smart C	80-048-03-04
Porte-bouteille pour cylinder pour maXium® smart Cart	80-048-05-04
Set de fixation pour maXium® smart Vac	80-048-06-04



Zubehör für die Hochfrequenzchirurgie
Accessories for Electrosurgery
Accesorios para la electrocirugía
Accessoires électrochirurgicaux
Accessori per elettrochirurgia

Electrosurgery

1 7-23		Monopolare Elektroden-Handgriffe Monopolar electrode handles Mangos porta-electrodos monopolares Manches porte-électrodes monopolaires Manici portaelettrodi monopolari
2 25-47		Monopolare Elektroden Monopolar electrodes Electrodos monopolares Electrodes monopolaires Elettrodi monopolari
3 49-57		Neutralelektroden Neutral electrodes Placas neutras Electrodes neutres Elettrodi neutri
4 59-87		Bipolares Zubehör Bipolar accessories Accesorios bipolares Accessoires bipolaires Accessori bipolari
5 89-111		Instrumentarium zur bipolaren Gefäßversiegelung Instruments for bipolar vessel sealing Instrumentos para el sellado vascular bipolar Instruments pour la clampage vasculaire bipolaire Strumenti di sigillatura vascolare bipolare
6 113-129		Anschlusskabel und Adapter Connection cables and adapters Cables de conexión y adaptadores Câbles de raccordement et adaptateurs Cavi di connessione e adattatori
7 131-145		Argon-Beamer-System Argon Beamer System Sistema Argon Beamer Système Argon Beamer Sistema Argon Beamer

8
147-157



Rauchgasabsaugung und Zubehör
Smoke evacuator and accessories
Evacuación de gases de combustión y accesorios
Évacuateur de fumée et accessoires
Aspiratore di fumo e accessori

9
159-170



Hochfrequenzchirurgie-Geräte
Electrosurgery units
Aparatos electroquirúrgicos
Bistouris électrochirurgicaux
Apparecchi elettrochirurgici

10
171-181



Fußschalter
Foot switches
Interruptores de pie
Interrupteurs à pédale
Interruttori a pedale

11
183-184



Netzkabel
Mains cables
Cables de conexión a la red
Câbles d'alimentation réseau
Cavi d'alimentazione della rete

12
185-191



Fahrgestelle
Trolleys
Soportes móviles
Chariots
Carrelli

13
193-220



Zubehörsätze
Accessory sets
Juegos de accesorios
Jeux d'accessoires
Serie di accessori

14
221-225



Nummern-Index
Index of order numbers
Índice de números de referencia
Index numérique des références de commande
Elenco dei codici



Instrumentation chirurgicale*

*Liste non exhaustive des instruments, nous contacter en cas de besoin spécifique.

Cardiovascular/Thoracic




Approximators	CVT-2	Punches	CVT-136
Cannulas	CVT-3	Raspatory	CVT-137
Clamps	CVT-3	Retractors	CVT-138
Containers	CVT-55	Rib Spreader	CVT-186
Cords	CVT-63	Rongeurs	CVT-187
Cups	CVT-63	Saws	CVT-188
Dilators	CVT-64	Scissors	CVT-188
Dissectors	CVT-68	Shears	CVT-216
Elevators	CVT-70	Spatulas	CVT-218
Forceps	CVT-71	Spreaders	CVT-218
Hooks	CVT-121	Stringers	CVT-220
Knife Handles	CVT-121	Strippers	CVT-222
Knives	CVT-122	Suction Tubes	CVT-223
Loops	CVT-122	Sump Suction	CVT-225
Markers	CVT-122	Tourniquets	CVT-225
Needle Holders	CVT-123	Trocars	CVT-225
Needles	CVT-135	Tunnelers	CVT-226
Obturator	CVT-135	Valvulotomes	CVT-227
Pliers	CVT-135	Wire & Pin Cutters	CVT-227

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com



Ear, Nose & Throat

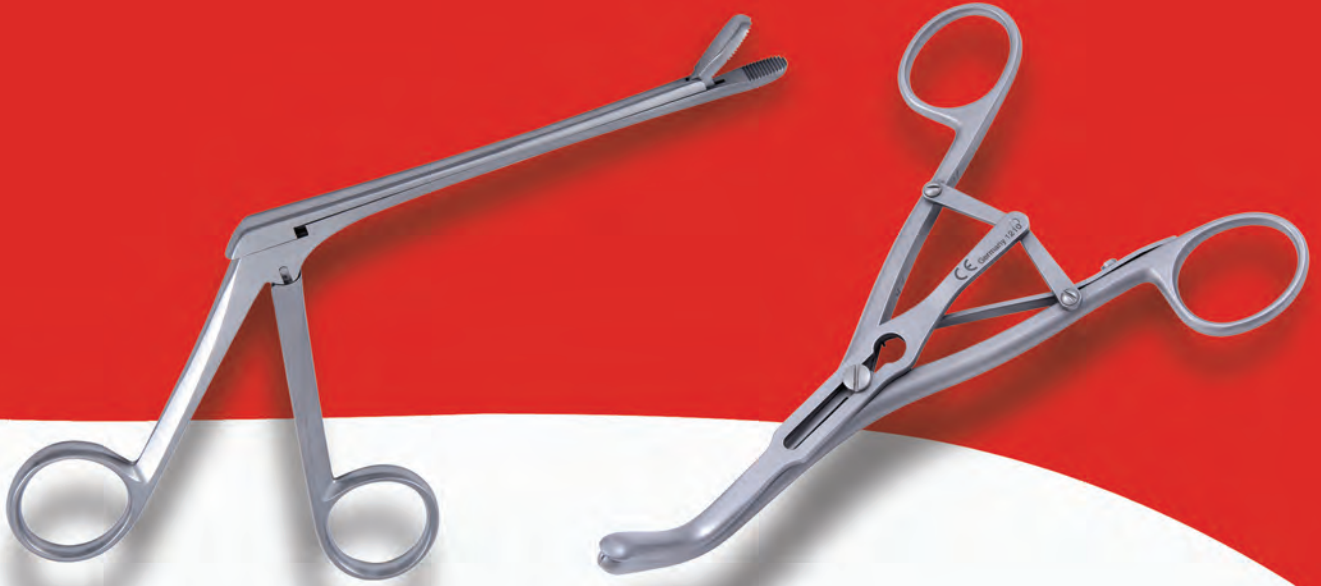

Adenotomes	ENT-2	Foot Plate Hooks	ENT-43	Presses	ENT-93
Arch Bars	ENT-3	Forceps	ENT-44	Probes	ENT-94
Awls	ENT-3	Handles	ENT-64	Punches	ENT-95
Brushes	ENT-3	Hooks	ENT-64	Rasps	ENT-100
Calipers	ENT-4	Inserters	ENT-71	Retractors	ENT-106
Cannulas	ENT-4	Instrument Covers	ENT-71	Rongeurs	ENT-118
Chisels	ENT-5	Knives	ENT-72	Saws	ENT-123
Clamps	ENT-7	Laryngoscope	ENT-79	Scissors	ENT-123
Connectors	ENT-7	Loops	ENT-79	Snares	ENT-138
Containers	ENT-8	Mallets	ENT-79	Speculums	ENT-139
Crushers	ENT-8	Mirrors	ENT-80	Spreaders	ENT-145
Curettes	ENT-9	Mobilizers	ENT-80	Suction Tubes	ENT-145
Cutting Blocks	ENT-18	Mouth Gags	ENT-81	Syringes	ENT-148
Dilators	ENT-18	Needles	ENT-83	Tracheal Tubes	ENT-148
Dissectors	ENT-19	Nippers	ENT-85	Trocars	ENT-148
Elevators	ENT-20	Sponges	ENT-86	Tuning Forks	ENT-149
Energy	ENT-30	Osteotomes	ENT-86	Wire Guides	ENT-149
Excavators	ENT-43	Picks	ENT-89		

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com



Laparoscopic




New Products	LAP-2
Accessories & Miscellaneous	LAP-22
Cables	LAP-31
Dissectors	LAP-32
MultiPak	LAP-32
ScopePak	LAP-32
Symmetry Surgical Laparoscopic Instruments	LAP-33
Symmetry Surgical RapidClean® Instruments	LAP-75
Symmetry Ultra™ Kleppinger Type Bipolar Forceps	LAP-90
Electrodes	LAP-92
Sterilization Solutions	LAP-94

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com



Neuro

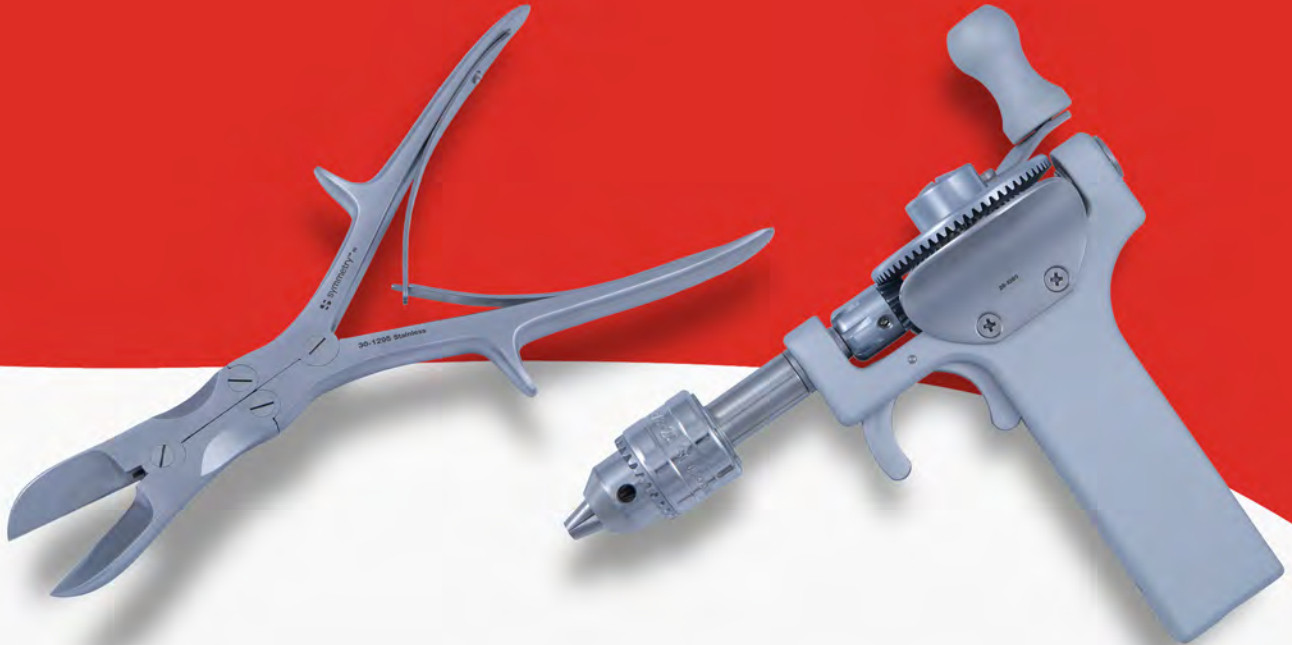

Blades	NEU-2	Mallets	NEU-56	Skull Tongs	NEU-122
Calipers	NEU-2	Markers	NEU-57	Spatulas	NEU-123
Cannulas	NEU-2	Mirrors	NEU-57	Speculums	NEU-125
Clips	NEU-2	Needle Holders	NEU-57	Sponges	NEU-126
Containers	NEU-3	Needles	NEU-61	Spoons	NEU-126
Cords	NEU-6	Osteotomes	NEU-61	Kits	NEU-127
Curettes	NEU-6	Probes	NEU-62	Suction Tubes	NEU-129
Dissectors	NEU-11	Punches	NEU-63	Test Instruments	NEU-134
Drills	NEU-17	Pushers	NEU-64	Transsphenoidal Instruments	NEU-134
Elevators	NEU-21	Rasps	NEU-64	Trephines	NEU-137
Enucleators	NEU-27	Retractors	NEU-64		
Forceps	NEU-28	Rongeurs	NEU-85		
Hooks	NEU-43	Saws	NEU-110		
Knife Handles	NEU-53	Scissors	NEU-113		
Knives	NEU-54	Scoops	NEU-121		
Ligature Instruments	NEU-56	Separators	NEU-121		

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com



Obese Patient Solutions




Aspirators	OBE-2	Needle Holders	OBE-38
Chisels	OBE-2	Osteotomes	OBE-41
Clamps	OBE-3	Pliers	OBE-42
Containers	OBE-8	Probes	OBE-42
Curettes	OBE-9	Retractors	OBE-43
Dissectors	OBE-19	Rongeurs	OBE-67
Elevators	OBE-20	Scissors	OBE-71
Forceps	OBE-23	Shears	OBE-77
Gouges	OBE-34	Spatulas	OBE-78
Hooks	OBE-34	Spreaders	OBE-79
Knife Handles	OBE-36	Suction Tubes	OBE-79
Laparoscopic	OBE-37		

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com



OB/GYN

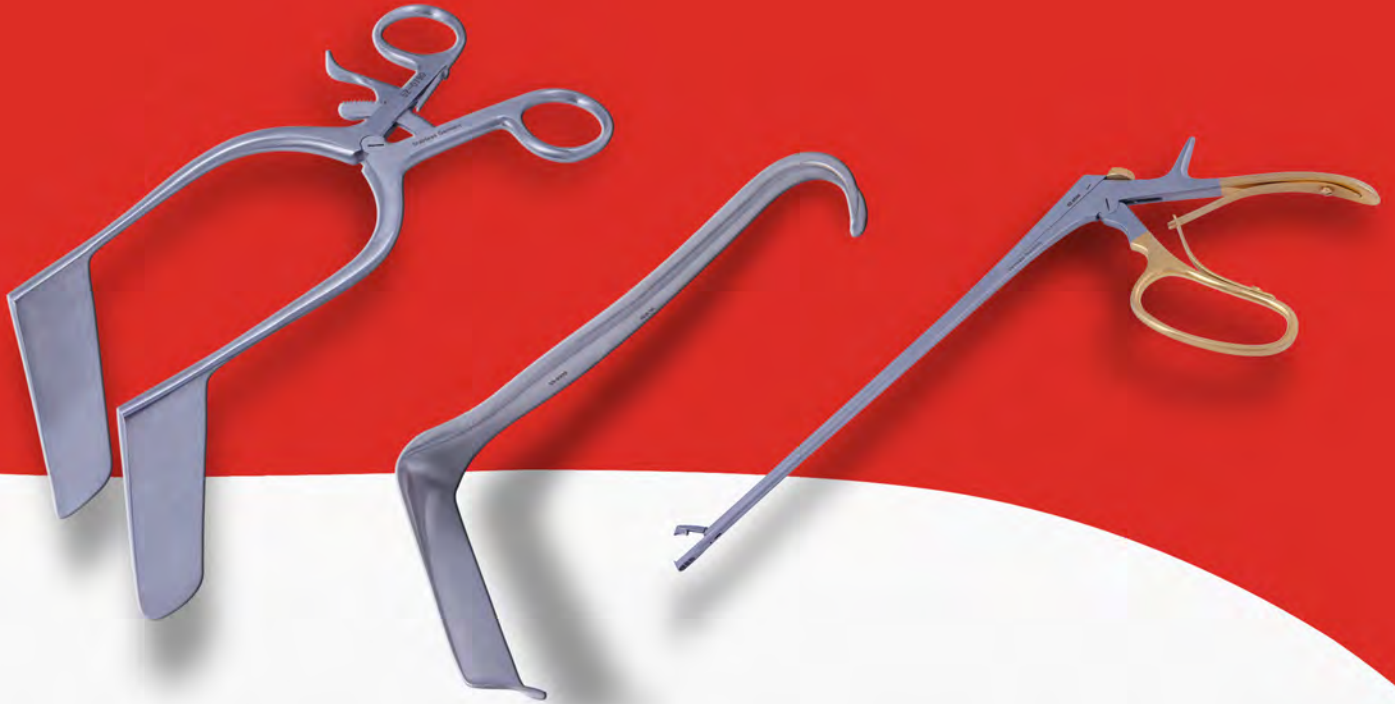

Clamps	OBGYN-2
Curettes	OBGYN-5
Cutters	OBGYN-9
Dilators	OBGYN-9
Extractors	OBGYN-13
Forceps	OBGYN-13
Hooks	OBGYN-27
Laparoscopic	OBGYN-28
Manipulators	OBGYN-29
Needle Holders	OBGYN-30

Probes	OBGYN-31
Punches	OBGYN-32
Retractors	OBGYN-33
Rulers	OBGYN-42
Scissors	OBGYN-42
Sounds	OBGYN-45
Speculums	OBGYN-45
Spoons	OBGYN-53
Tenaculums	OBGYN-53

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com
or learn more at symmetrysurgical.com

Orthopedics & Arthroscopy



Calipers	O/A-2
Casts Tools	O/A-2
Cement Impaction	O/A-2
Chisels	O/A-3
Clamps	O/A-7
Containers	O/A-9
Curettes	O/A-13
Cutters	O/A-16
Dissectors	O/A-16
Drivers	O/A-17
Elevators	O/A-19
Endoscopes	O/A-29
Extractors	O/A-29
Files	O/A-31
Forceps	O/A-33

Gouges	O/A-42
Graspers	O/A-46
Handles	O/A-46
Hooks	O/A-47
Impactors	O/A-49
Kits	O/A-50
Knives	O/A-57
Mallets	O/A-57
Manipulators	O/A-62
Osteotomes	O/A-62
Picks	O/A-70
Plaster Tools	O/A-70
Probes	O/A-71
Punches	O/A-71
Rasps	O/A-76

Reamers	O/A-77
Retractors	O/A-78
Rongeurs	O/A-94
Scissors	O/A-106
Shuttles	O/A-107
Skids	O/A-107
Splitters	O/A-108
Tamps	O/A-109
Taps	O/A-110
Wire & Traction	O/A-110

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com



Pediatric




36-1006

36-2010

Approximators, Rib	PED-2	Rasps	PED-22
Clamps	PED-2	Retractors	PED-22
Dilators	PED-6	Rib Spreaders	PED-30
Dual-Purpose	PED-8	Rongeurs	PED-31
Elevators	PED-8	Scissors	PED-33
Forceps	PED-8	Sounds	PED-42
Hooks	PED-17	Speculums	PED-43
Needle Holders	PED-18	Suction Tubes	PED-43
Probes	PED-21	Tissue Forceps	PED-45
Punches	PED-21	Tourniquets	PED-49

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com

Rectal

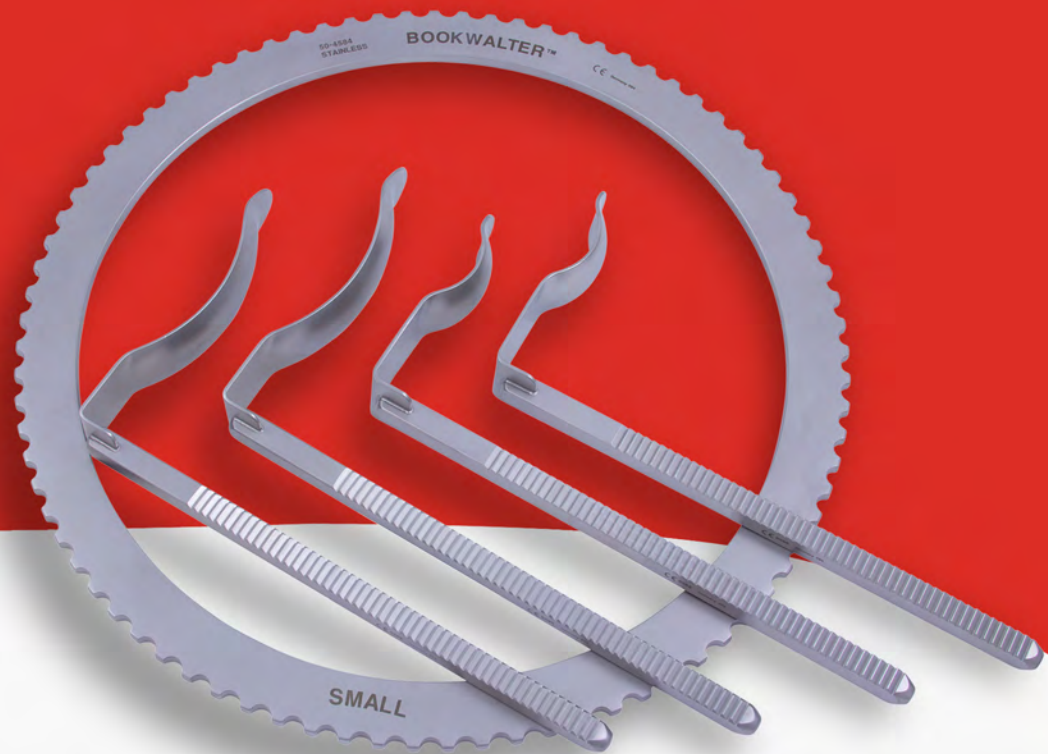

Forceps	REC-2
Hooks	REC-2
Ligators	REC-3
Probes	REC-3
Retractors	REC-4
Speculums	REC-7

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com
or learn more at symmetrysurgical.com

 **symmetry surgical™**

Retractors



Abdominal Self-Retaining	RET-2	General Purpose Lighted	RET-62	Orthopaedic Shoulder	RET-97	Spine Karlin™	RET-125
Abdominal Bookwalter® Bars	RET-8	General Purpose Self-Retaining	RET-62	Plastic Surgery Brow Lift	RET-97	Spine Micro Discectomy	RET-126
Abdominal Bookwalter® Blades	RET-10	Hysterectomy	RET-71	Plastic Surgery Hand	RET-97	Spine McCulloch	RET-127
Abdominal Bookwalter® Kits	RET-14	Laparoscopic	RET-72	Plastic Surgery Hand-Held	RET-98	Spine Nerve Root	RET-132
Abdominal Kits	RET-21	Laparoscopic Bookwalter®	RET-73	Prostatic	RET-98	Spine Self-Retaining	RET-135
Abdominal Bookwalter® Ratchets	RET-22	Lung	RET-74	Rectal Hand-Held	RET-99	Spine Bookwalter®	RET-136
Abdominal Bookwalter® Rings	RET-24	Mastectomy	RET-74	Rectal Self-Retaining	RET-99	Kits - Anterior Cervical Fusion	RET-138
Abdominal Bookwalter® Table Posts	RET-27	Mouth Gags	RET-75	Rectal Bookwalter®	RET-100	Kits - Cervical Retractor	RET-141
Abdominal Universal Blades	RET-28	Neuro Flap	RET-75	Rectal	RET-100	Splanchnic	RET-143
Abdominal Vision	RET-31	Neuro Hand-Held	RET-76	Redundant Wall	RET-101	Sternal	RET-144
Appendectomy	RET-32	Neuro Lachrymal Sac	RET-76	Renal Sinus	RET-102	Thoracotomy	RET-146
Cardiac Aorta	RET-32	Neuro Posterior Fossa	RET-77	Renal Vein	RET-102	Thymus	RET-147
Cardiac Aorta Valves	RET-33	Neuro Self-Retaining	RET-78	Renal	RET-102	Thymus Hand-Held	RET-147
Cardiac Atrial	RET-33	Neuro Greenberg®	RET-79	Rib Self-Retaining	RET-103	Thyroid	RET-147
Cardiac Atrial Valves	RET-33	Neuro	RET-84	Rib	RET-103	Tonsil	RET-148
Cardiac Epicardial	RET-34	Ophthalmology Hand-Held	RET-85	Scalp	RET-105	Tracheal	RET-149
Cardiac Bookwalter®	RET-34	Ophthalmology Lens Capsule	RET-86	Scapula	RET-107	Uvula	RET-150
Carotid Self-Retaining	RET-36	Ophthalmology Lid	RET-86	Septum	RET-108	Vaginal Bookwalter®	RET-151
Cerebellar	RET-37	Ophthalmology Orbital	RET-87	Spine Crockard™	RET-108	Vaginal	RET-154
Cheek	RET-37	Ophthalmology Self-Retaining	RET-88	Spine Cervical	RET-111	Vascular	RET-157
Deltoid	RET-38	Orthopaedic Bones	RET-89	Spine Decompression	RET-117	Vascular Vision	RET-158
Endaural	RET-38	Ophthalmology Hand	RET-91	Spine Dural	RET-117	Vein	RET-159
ENT (Mastoid)	RET-39	Orthopaedic Hand-Held	RET-91	Spine Hand-Held	RET-119	Vessel	RET-159
ENT (Nasal)	RET-39	Orthopaedic Hip	RET-92	Spine Hand-Held Retractor Set	RET-120		
Fiber Optic	RET-40	Orthopaedic Hip and Shoulder	RET-92	Spine Hemilaminectomy	RET-121		
Gall Bladders	RET-41	Orthopaedic Humeral	RET-94	Spine Lamina	RET-122		
General Purpose Finger Retractors	RET-42	Orthopaedic Humeral Head	RET-95	Spine Laminectomy	RET-122		
General Purpose Hand-Held	RET-43	Orthopaedic Knee	RET-95	Spine Lumbar	RET-124		

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com

Spine



Biopsy Needles	2	Knife Handles	84
Bone Waxers	2	Knives	84
Calipers	2	Mallets	84
Chisels	3	Osteotomes	86
Containers	7	Packers	95
Curettes	13	Pins	95
Cutters	38	Probes	95
Dissectors	38	Rasps	96
Distractors	42	Retractors	97
Dowel Instruments	43	Rongeurs	136
Drills	45	Screws	185
Drivers	47	Spreaders	185
Elevators	48	Sterilizing Case Containers	187
Files	58	Suction Tubes	188
Forceps	58	Tamps	190
Gauges	62	Spine Pliers	191
Gouges	63	Trephines	192
Holder	66	Wire and Pin Cutters	192
Hooks	67	Wire Twisters	195
Impactors	69	Wrenches	195
Kits	72		

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com or learn more at symmetrysurgical.com

Urology



Introduction	URO-2
Catheters & Guides	URO-3
Clamps	URO-4
Forceps, Retractors & Urethrotome Set	URO-5
Sounds	URO-6

Questions? Contact us at customerservice@symmetrysurgical.com
or learn more at symmetrysurgical.com







Micro-instrumentation

MICRO INSTRUMENTATION TAKAYAMA

SUPERBYPASS

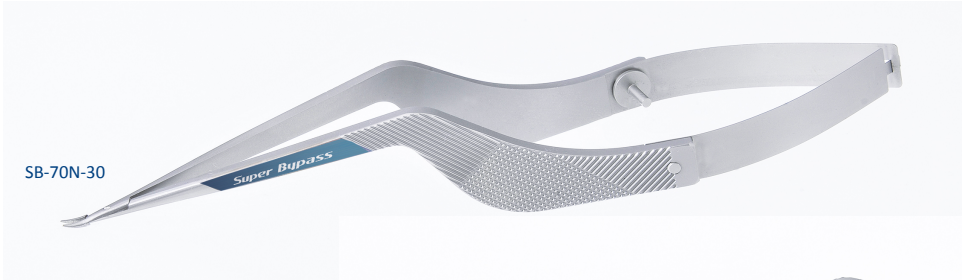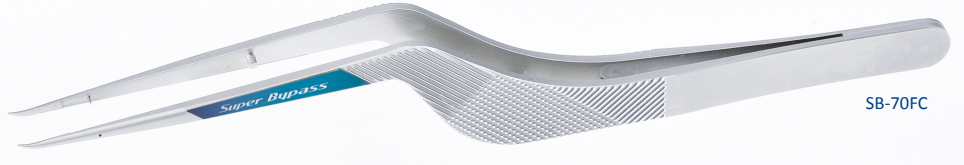

K-2010



K-203



K-101-1



SERIES K



Ouvre-ampoules SnapIT

 **QLICKSMART®**
SnapIT
Multi-usage | Ouvre-ampoule



Protège-toi

Ouverture sûre d'ampoules en verre

▲ La sous-estimation des coupures dues aux ampoules en verre

Un professionnel de santé sur trois s'est coupé en ouvrant une ampoule en verre à la main. Malheureusement, de nombreux utilisateurs et administrateurs cliniques ont sous-estimé la probabilité de telles blessures.

Les coupures dues aux ampoules en verre peuvent arriver à tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre expérience dans l'ouverture des ampoules. Même une petite coupure peu nuire à vos activités cliniques. Des blessures plus graves, par exemple des déchirures des tendons ont été signalées.

Des blessures à répétition lors de l'ouverture d'ampoules ont conduit un infirmier diplômé australien à inventer l'ouvre-ampoule SnapIT Qlicksmart primé.


▲ L'ouvre-ampoule primé



Le SnapIT Qlicksmart est destiné à protéger les utilisateurs contre les blessures lorsqu'une ampoule présente un bord coupant ou des éclats lors de son ouverture.



Les ouvre-ampoules sont facile à utiliser grâce à une action « insérer et casser ».

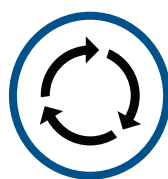

Réutilisable, SnapIT est une solution économique pour l'ouverture des ampoules en verre.



L'ouvre-ampoule a reçu de nombreuses récompenses, ce qui prouve son aspect pratique et son efficacité dans la réduction des blessures dues aux ampoules en verre.

Version Lite



- SnapIT Lite est idéal pour être accroché à un cordon ou mis dans une poche pour une utilisation facile en déplacement.
- L'ouvre-ampoule est en plastique robuste et haute qualité.
- Un collier antiroulis assure la stabilité de l'ouvre-ampoule SnapIT lorsqu'il est placé sur une table ou sur un chariot.

Version Personal



- Aluminium haute qualité avec deux couleurs possibles.
- La version Personal est idéale pour être accrochée à un cordon ou mise dans une poche pour une utilisation facile en déplacement.
- Autoclavable le cas échéant.

Version Trolley



- Aluminium haute qualité
- La version Trolley existe en trois tailles (Normale, Grande taille et Très grande taille); toutes avec un côté plat qui l'empêche de tomber de la table ou du chariot.
- Autoclavable le cas échéant.

Version du produit	Personal	Trolley			Lite	
Code produit	SN-01R	TE-01R	TE-01L	TE-01XL	SN-02R	SN-02L
Taille du produit	Taille normale	Taille normale	Grande taille	Très grande taille	Taille normale	Grande taille
Tailles d'ampoules compatibles*	1-2ml, 5-10ml, 10-15ml	1-2ml, 5-10ml, 10-15ml	5-10ml, 10-15ml, 20-25ml	20-25ml, 25-30ml	1-2ml, 5-10ml, 10-15ml	5-10ml, 10-15ml, 20-25ml
Dimension par unité	Longueur: 80mm Largeur: 17mm	Longueur: 80mm Largeur: 25mm	Longueur: 80mm Largeur: 29mm	Longueur: 80mm Largeur: 25mm	Longueur: 80mm Largeur: 13mm	Longueur: 80mm Largeur: 18mm
Poids par unité	34g	50g	74g	66g	11g	13g
Gamme de couleur	Bleu, Violet	Noir	Rouge	Bleu	Gris métallisé, Violet, Rose, Bleu	Bordeaux
Code GMDN	10098					
Matériau	Aluminium anodisé (corps), Silicone (joint torique), Acier inoxydable (anneau et ressort).				Matière plastique (corps), Silicone (joint torique), Acier inoxydable (anneau et ressort).	
Latex	Non					
DEHP	Non					
Stérile	Non, mais autoclavable à 130°				Non autoclavable.	
Réutilisable	Multi-usage. Le joint torique peut être remplacé en cas de perte ou de cassure					
Réglementation	Répertorié par la FDA des États-Unis					


* La compatibilité dépend de la géométrie de l'ampoule et du diamètre du capuchon de l'ampoule. Des ampoules de mêmes dimensions peuvent avoir une géométrie et un diamètre de capuchon différents. Les dimensions de l'ampoule en ml sont données à titre d'information.

Utilisation du SnapIT

SnapIT
Multi-usage | Ouvre-ampoule




1. Aligner les points s'ils existent. Insérer délicatement le capuchon de l'ampoule à fond dans le SnapIT. Le capuchon est bloqué au niveau du col.

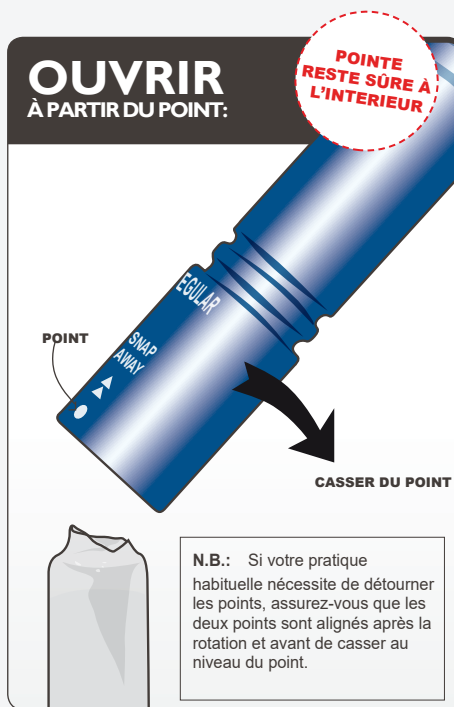


N.B.: Si votre pratique habituelle nécessite de détourner les points, assurez-vous que les deux points sont alignés après la rotation et avant de casser au niveau du point.

2. Appuyer sans forcer à partir du point pour casser le capuchon. Le capuchon doit être maintenu dans le SnapIT.

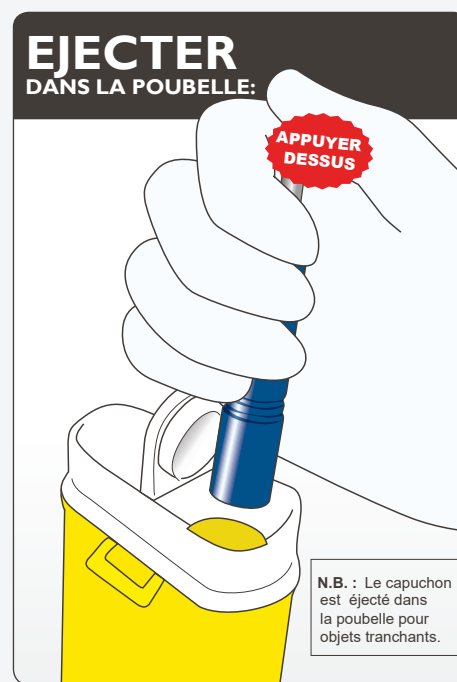

N.B.: Le capuchon est éjecté dans la poubelle pour objets tranchants.

3. Se placer précisément au-dessus d'une poubelle pour objets tranchants et éjecter le capuchon en appuyant sur la tige avec le pouce.

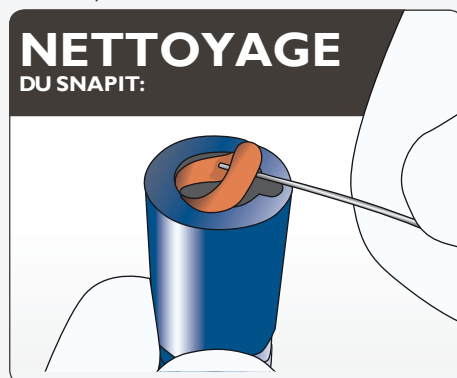

4. Nettoyez régulièrement votre SnapIT. Retirez le joint torique comme le montre l'illustration pour démonter les éléments et nettoyez à l'eau ou avec un produit de nettoyage de qualité hôpital. Utilisez un récipient propre pour éviter de perdre des éléments. Séchez complètement puis remonter.

N.B.: Si le capuchon de l'ampoule se casse, tapoter le SnapIT sur une poubelle pour objets tranchants pour éliminer les morceaux de verre en excès puis rincer sous l'eau courante avant le démontage.

DIMENSIONS: Si l'ampoule est trop grosse, elle ne s'adaptera pas à l'entrée. Utilisez un SnapIT plus grand.

Si l'ampoule est trop petite, le SnapIT ne maintiendra pas correctement la partie supérieure. Utilisez un SnapIT plus petit.



Protections anti-radiations




CorMedica

**PROTECTIONS
ANTI-RADIATIONS**

INFAB
Corporation

SOMMAIRE

Gamme de protection	4
Configuration gamme de protection REVOLUTION	5
Guide des tailles REVOLUTION	6
Tabliers REVOLUTION	7 à 13
Coloris REVOLUTION	14
Configuration gamme de protection CLASSIC	15
Guide des tailles CLASSIC	16
Tabliers CLASSIC	17 à 21
Tabliers dentaires	22
Coloris CLASSIC	23 et 24
SmartTrack	25
Protèges thyroïde	26
Produits nettoyants	27
Accessoires	28 à 29
Calots	30
Couvres cassette	31
Lunettes	32 et 33
Visières	34
Gants	35 et 36
Champs opératoires	37
Paravents	38 et 43
Portants	44 à 49
Rideaux	50 et 51
Tapis de table	52
Protections patients	53
Notes	54 et 55

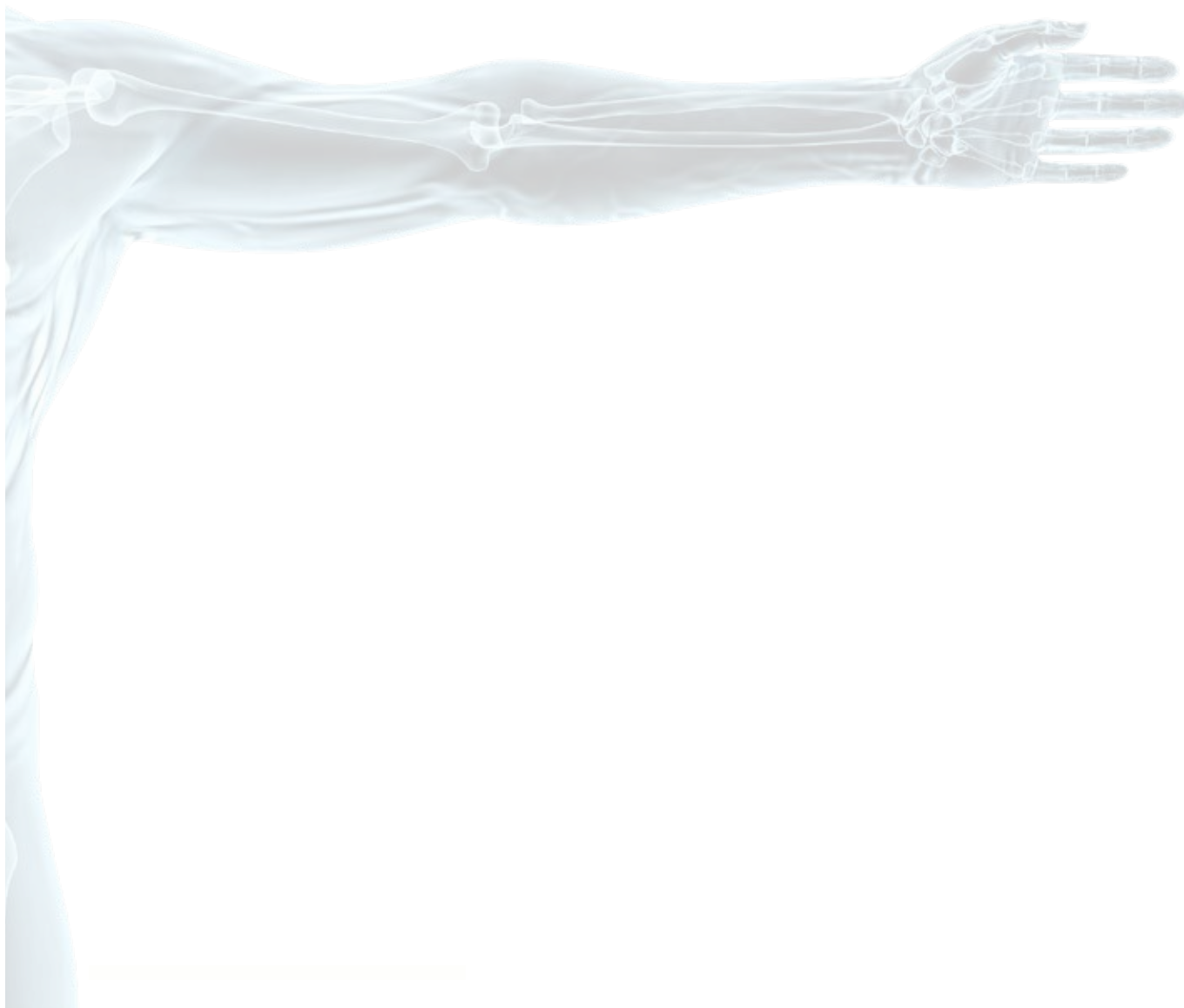

GAMME DE PROTECTION ANTI-RADIATION

Avec plus de 30 années de recherche et de développement, le revêtement Infab est le choix des hôpitaux et des médecins, dans le monde entier.

	Composition	Equivalence de plomb	Atténuation				Poids du composant kg/tablier	Poids du composant KG/m ² /Densité	Protection avant Modèle homme Taille M 303M-M
			50 kVp	70 kVp	90 kVp	110 kVp			
	Antimoine & Bismuth Couches homogènes	.25mm Pb	98.7%	96.1%	92.0%	87.8%	0.248	2.55	1.746Kg
		.35mm Pb	99.6%	98.0%	95.3%	92.7%	0.348	3.56	2.268Kg
		.5mm Pb	99.9%	99.4%	97.8%	96.3%	0.494	5.09	3.152Kg
	Plomb	.25mm Pb	98.8%	95.1%	90.7%	87.5%	0.288	3.04	1.973Kg
		.35mm Pb	99.7%	97.6%	94.5%	92.3%	0.435	4.26	2.789Kg
		.5mm Pb	99.9%	99.1%	97.4%	96.1%	0.571	6.08	3.628Kg

REVOLUTION

REVOLUTION CHEVAUCHEMENT PARTIEL PROTECTION

Les vestes Revolution 103 ne nécessitent pas de chevauchement complet pour atteindre le niveau de protection indiqué.

Tous les panneaux offrent une protection complète.


CONFIGURATION DE MATÉRIEL DE BASE

Infab propose trois configurations d'options de protection.

TOUS LES TABLIERS ONT UNE PROTECTION DE 0.25MM DE PB A L'ARRIERE


0.25 mm Pb

Recouvrement de 0.5 mm Pb

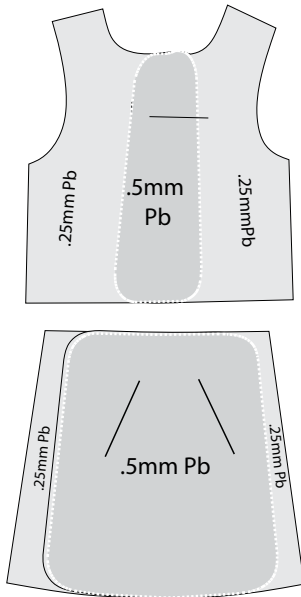


0.35 mm Pb

Recouvrement de 0.7 mm Pb

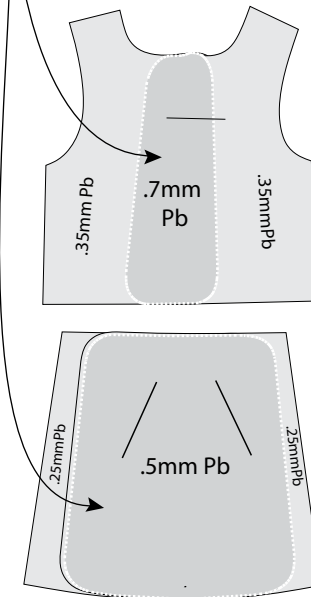


0.5 mm Pb

Recouvrement de 1.0 mm Pb

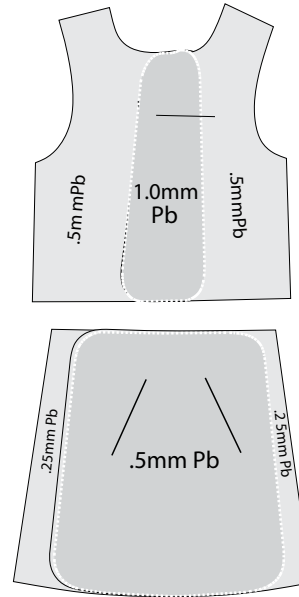


703 PROTECTION DE CHEVAUCHEMENT COMPLET 0.5 mm Pb

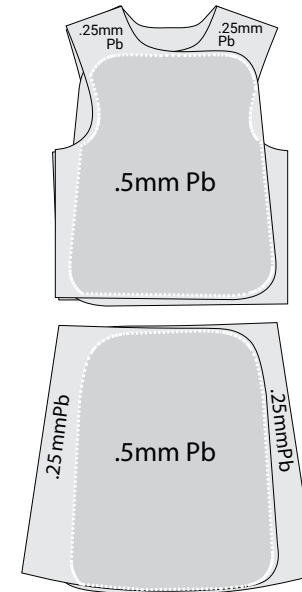


Toutes les jupes sont de 0,5 mm Pb au chevauchement sauf indication contraire

FEMME

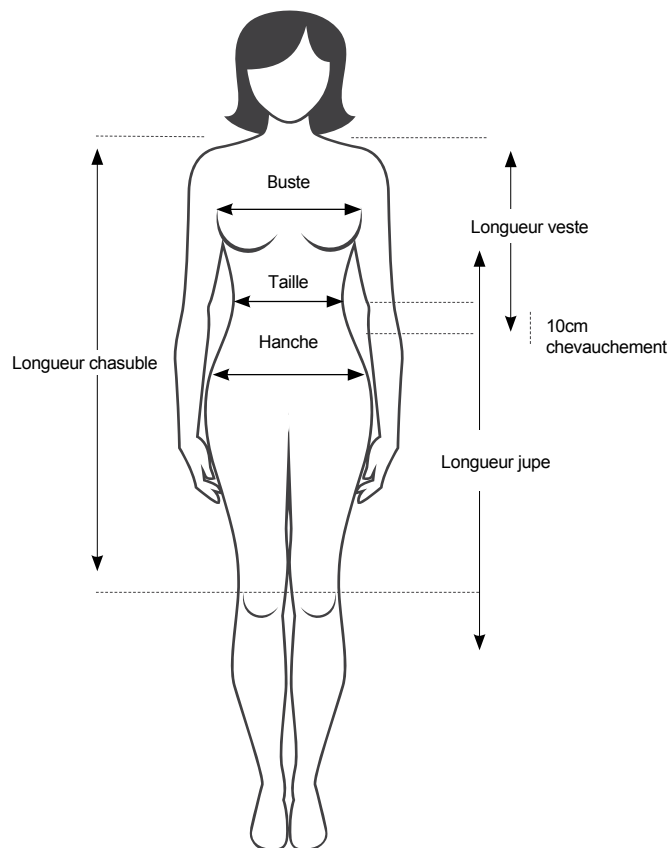

HOMME

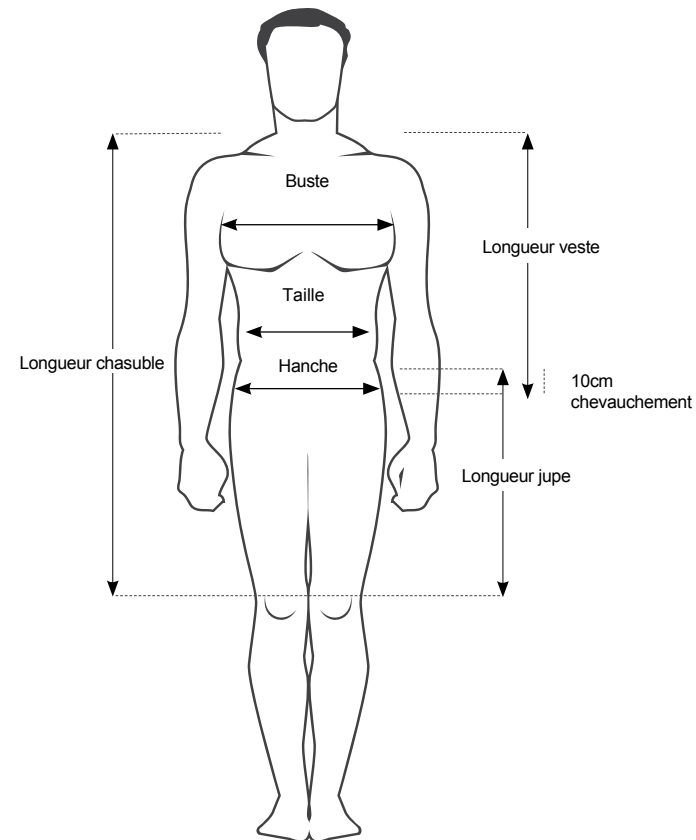

Femme

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Buste	76-81 cm	84-94 cm	94-99 cm	102-107 cm	109-114 cm	117-122 cm
Taille	64-69 cm	71-76 cm	78-84 cm	86-91 cm	94-99 cm	102-107 cm

Homme

	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Buste	86-94 cm	97-104 cm	107-114 cm	117-125 cm	127-132 cm
Taille	71-79 cm	81-89 cm	91-99 cm	102-109 cm	112-117 cm

Femme - Longueur de tablier standard

	Tablier avant	Tablier complet	Classic &703 Veste	Classic Jupe	Revolution veste avant	Revolution veste arrière	Révolution jupe
X-Small	97 cm	97 cm	51 cm	46 cm	56 cm	66 cm	56 cm
Small	97 cm	97 cm	56 cm	51 cm	56 cm	66 cm	56 cm
Medium	97 cm	97 cm	61 cm	56 cm	56 cm	66 cm	56 cm
Large	97 cm	97 cm	64 cm	58 cm	56 cm	66 cm	56 cm
X-Large	97 cm	97 cm	66 cm	61 cm	56 cm	66 cm	56 cm
XX-Large	97 cm	97 cm	69 cm	64 cm	61 cm	66 cm	56 cm

Homme - Longueur de tablier standard

	Tablier avant	Tablier complet	Classic &703 Veste	Classic Jupe	Revolution veste avant	Revolution veste arrière	Révolution jupe
Small	97 cm	97 cm	56 cm	51 cm	61 cm	71 cm	56 cm
Medium	97 cm	97 cm	61 cm	56 cm	61 cm	71 cm	56 cm
Large	97 cm	97 cm	64 cm	58 cm	61 cm	71 cm	56 cm
X-Large	107 cm	97 cm	66 cm	61 cm	61 cm	71 cm	56 cm
XX-Large	112 cm	97 cm	71 cm	64 cm	66 cm	71 cm	56 cm



103 ENSEMBLE VESTE & JUPE REVOLUTION

COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series, 900 Series, Remix

GAMME : KIARMOR Lead-Free, REGULAR

PROTECTION : 0.25mm - 0.35mm - 0.50mm Pb

TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL (modification de longueur possible)

OPTION BASE : B-103 Coloris Classic Nylon sans la matière anti-transpirante (Cool-Wear)

MONOGRAMME : **Blockor Script**

- "Back Flap" pour un meilleur équilibre du poids
- Ceinture noire amovible sur la jupe pour un meilleur soutien lombaire
- Recouvrement partiel pour augmenter la protection
- Chaque tablier Revolution est livré avec un tissu Cool Wear qui évacue l'humidité
- Professionnellement conçu pour un ajustement et un confort exceptionnels
- SmartTrack activé

OPTIONS PROTECTION ANTI-RADIATION

CONFIGURATION STANDARD	OPTION 1	OPTION 2
0.50mm Pb	0.35mm Pb	0.25mm Pb
Dose Absorbée Attenuation	Dose Absorbée Attenuation	Dose Absorbée Attenuation
0.9% 99.1%	2.45% 97.6%	4.9% 95.1%
0.6% 99.4%	2.0% 98.0%	3.9% 96.1%
Protection la plus élevée	Meilleure combinaison de protection & poids	Poids le plus léger



L103 ENSEMBLE VESTE & JUPE REVOLUTION LOMBAIRE

COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series, 900 Series, Remix
 GAMME : KIARMOR Lead-Free, REGULAR
 PROTECTION : 0.25mm - 0.35mm - 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL (modification de longueur possible)

OPTION BASE : B-L103 Coloris Classic Nylon sans la matière anti-transpirante (Cool-Wear)

MONOGRAMME : **Block** or *Script*

- "Back Flap" pour un meilleur équilibre du poids
- Ceinture noire intégrée dans le gilet et la jupe pour un meilleur soutien lombaire
- Recouvrement partiel pour augmenter la protection
- Chaque tablier Revolution est livré avec un tissu Cool Wear qui évacue l'humidité
- Professionnellement conçu pour un ajustement et un confort exceptionnels
- Équivalence totale du plomb dans tous les panneaux
- SmartTrack activé



OPTIONS PROTECTION ANTI-RADIATION

CONFIGURATION STANDARD		OPTION 1		OPTION 2	
0.50mm Pb		0.35mm Pb		0.25mm Pb	
Dose Absorbée	Attenuation	Dose Absorbée	Attenuation	Dose Absorbée	Attenuation
0.9%	99.1%	2.45%	97.6%	4.9%	95.1%
0.6%	99.4%	2.0%	98.0%	3.9%	96.1%
Protection la plus élevée		Meilleure combinaison de protection & poids		Poids le plus léger	





203 CHASUBLE REVOLUTION - CEINTURE NOIRE

COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series, 900 Series, Remix
 GAMME : KIARMOR Lead-Free, REGULAR
 PROTECTION : 0.25mm - 0.35mm - 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL (modification de longueur possible)

OPTION BASE : B-203 Coloris Classic Nylon sans la matière anti-transpirante (Cool-Wear)
 MONOGRAMME : **Block** or *Script*



- Matériau extérieur exclusif REVOLUTION
- Recouvrement partiel pour augmenter la protection
- Chaque tablier Revolution est livré avec un tissu Cool Wear qui évacue l'humidité
- Professionnellement conçu pour un ajustement et un confort exceptionnels
- SmartTrack activé

OPTIONS PROTECTION ANTI-RADIATION



CONFIGURATION STANDARD		OPTION 1		OPTION 2	
0.50mm Pb		0.35mm Pb		0.25mm Pb	
Dose Absorbée	Attenuation	Dose Absorbée	Attenuation	Dose Absorbée	Attenuation
0.9%	99.1%	2.45%	97.6%	4.9%	95.1%
0.6%	99.4%	2.0%	98.0%	3.9%	96.1%
Protection la plus élevée		Meilleure combinaison de protection & poids		Poids le plus léger	

303 DEMI-CHASUBLE REVOLUTION VELCRO AVANT



FERMETURE ARRIERE

403 DEMI-CHASUBLE REVOLUTION ELASTIQUE ARRIERE



FERMETURE ARRIERE ELASTIQUE

303 & 403 INFO PRODUIT

COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series, 900 Series, Remix
 GAMME : KIARMOR Lead-Free, REGULAR
 PROTECTION : 0.25mm - 0.35mm - 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL (modification de longueur possible)

OPTION BASE : B-303, B-403 Coloris Classic Nylon sans la matière anti-transpirante (Cool-Wear)
 MONOGRAMME : **Blockor Script**

- Matériau extérieur exclusif REVOLUTION
- 403 Fermeture arrière élastique
- Chaque tablier Revolution est livré avec un tissu Cool Wear qui évacue l'humidité
- Professionnellement conçu pour un ajustement et un confort exceptionnels
- SmartTrack activé

OPTIONS PROTECTION ANTI-RADIATION

CONFIGURATION STANDARD	OPTION 1	OPTION 2
0.50mm Pb	0.35mm Pb	0.25mm Pb
Dose Absorbée Atténuation	Dose Absorbée Atténuation	Dose Absorbée Atténuation
0.9% 99.1%	2.45% 97.6%	4.9% 95.1%
0.6% 99.4%	2.0% 98.0%	3.9% 96.1%
Protection la plus élevée	Meilleure combinaison de protection & poids	Poids le plus léger



503 DEMI-CHASUBLE REVOLUTION CEINTURE NOIRE AVANT



SYSTEME DE FERMETURE
ARRIERE INTEGRE

COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series, 900 Series, Remix
GAMME : KIARMOR Lead-Free, REGULAR
PROTECTION : 0.25mm - 0.35mm - 0.50mm Pb
TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL (modification de longueur possible)

OPTION BASE : B-503 Coloris Classic Nylon sans la matière anti-transpirante (Cool-Wear)
MONOGRAMME : **Block** or *Script*

OPTIONS PROTECTION ANTI-RADIATION

CONFIGURATION STANDARD		OPTION 1		OPTION 2	
0.50mm Pb		0.35mm Pb		0.25mm Pb	
Dose Absorbée	Atténuation	Dose Absorbée	Atténuation	Dose Absorbée	Atténuation
0.9%	99.1%	2.45%	97.6%	4.9%	95.1%
0.6%	99.4%	2.0%	98.0%	3.9%	96.1%
Protection la plus élevée		Meilleure combinaison de protection & poids		Poids le plus léger	



603 CHASUBLE REVOLUTION UNISEX ELASTIQUE ARRIERE



COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series, 900 Series, Remix
GAMME : KIARMOR Lead-Free, REGULAR
PROTECTION : 0.25mm - 0.35mm - 0.50mm Pb
TAILLES : Unisex XS-5XL, Homme S-5XL (modification de longueur possible)

OPTION BASE : B-603 Coloris Classic Nylon sans la matière anti-transpirante (Cool-Wear)
MONOGRAMME : **Block** or *Script*

603 UNISEX

- Matériau extérieur exclusif Revolution
- Chaque tablier Revolution est livré avec un tissu Cool Wear qui évacue l'humidité
- Professionnellement conçu pour un ajustement et un confort exceptionnels
- SmartTrack activé

	Buste	Taille
X-Small	76-84 cm	64-69 cm
Small	86-94 cm	71-79 cm
Medium	97-104 cm	81-89 cm
Large	107-114 cm	91-99 cm
X-Large	117-125 cm	102-109 cm
XX-Large	127-132 cm	112-117 cm



703

PROTECTION
COMPLETE

ENSEMBLE VESTE & JUPE REVOLUTION - LOMBAIRE

Cet ensemble introduit la conception Classic Infab dans la gamme Revolution, ajoutant une ceinture noire pour un soutien lombaire supplémentaire. Ce tablier à chevauchement intégral est léger, offre une excellente protection et possède une coupe classique.

COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series, 900 Series, Remix

GAMME : KIARMOR Lead-Free, REGULAR

PROTECTION : 0.50mm Pb

TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL (modification de longueur possible)

MONOGRAMME : **Blockor Script**

- Matériau extérieur Révolution
- Chevauchement complet
- Chaque tablier Revolution est livré avec un tissu Cool Wear qui évacue l'humidité
- Professionnellement conçu pour un ajustement et un confort exceptionnels
- SmartTrack activé



CONFIGURATION STANDARD

0.50mm Pb

Dose Absorbée	Atténuation
---------------	-------------

0.9%	99.1%
------	-------

0.6%	99.4%
------	-------

Protection la plus élevée



Boucle KTC pour
maintenir la ceinture
attachée et en place.

Base Révolution offre tout le confort et la protection de notre gamme Premium Revolution, mais avec nos couleurs et motifs classiques en nylon (n'inclut pas le tissu Révolution matière anti-transpirante).



L-B-103

ENSEMBLE BASE
REVOLUTION -
LOMBAIRE



B-103

ENSEMBLE BASE
REVOLUTION



B-203

CHASUBLE BASE
REVOLUTION -
CEINTURE NOIRE



B-303

DEMI-CHASUBLE
BASE REVOLUTION -
VELCRO AVANT



B-403

DEMI-CHASUBLE
BASE REVOLUTION -
ELASTIQUE ARRIERE



B-503

DEMI-CHASUBLE
BASE REVOLUTION -
CEINTURE NOIRE



B-603

CHASUBLE BASE
REVOLUTION -
ELASTIQUE ARRIERE

PROTEGE THYROÏDE REVOLUTION

500 SERIES



600 SERIES



700 SERIES



800 SERIES



900 SERIES



REMIX
COLOR SERIES





CODES COULEUR AVANT ET ARRIÈRE :

501: Red	502: Fuchsia	504: Pink	505: Navy
506: Teal	507: Yellow	508: Sky Blue	509: Grey
510: Purple	511: White	512: Duck Green	513: Tide Red
514: Jewelry Box Blue	515: Orange	516: Volt	517: Light Blue
518: Royal Blue	519: Coral		

Coloris noir obligatoire



CODES COULEUR LATÉRALE :

601: Red	602: Fuchsia	604: Pink	605: Navy
606: Teal	607: Yellow	608: Sky Blue	609: Grey
610: Purple	611: White	612: Duck Green	613: Tide Red
614: Jewelry Box Blue	615: Orange	616: Volt	617: Light Blue
618: Royal Blue	619: Coral		

Coloris noir obligatoire



CODES COULEUR TABLIER COMPLET:

700: Black	701: Red	702: Fuchsia	704: Pink
705: Navy	706: Teal	707: Yellow	708: Sky Blue
709: Grey	710: Purple	711: White	712: Duck Green
713: Tide Red	714: Jewelry Box Blue	715: Orange	716: Volt
817: Light Blue	718: Royal Blue	719: Coral	

CODES COULEUR AVANT ET ARRIÈRE :

801: Red	802: Fuchsia	804: Pink	805: Navy
806: Teal	807: Yellow	808: Sky Blue	809: Grey
810: Purple	812: Duck Green	813: Tide Red	814: Jewelry Box Blue
815: Orange	816: Volt	817: Light Blue	818: Royal Blue
		819: Coral	

Coloris blanc obligatoire



CODES COULEUR LATÉRALE :

901: Red	902: Fuchsia	904: Pink	905: Navy
906: Teal	907: Yellow	908: Sky Blue	909: Grey
910: Purple	912: Duck Green	913: Tide Red	914: Jewelry Box Blue
915: Orange	916: Volt	917: Light Blue	918: Royal Blue
		919: Coral	

Coloris blanc obligatoire


CLASSIC

CLASSIC PROTECTION COMPLETE

Les vestes & jupes CLASSIC ont un chevauchement complet pour atteindre le niveau de protection indiqué.

CLASSIC VESTE & JUPE

0.25mm de Pb
soit 0.50mm Pb en chevauchement
complet

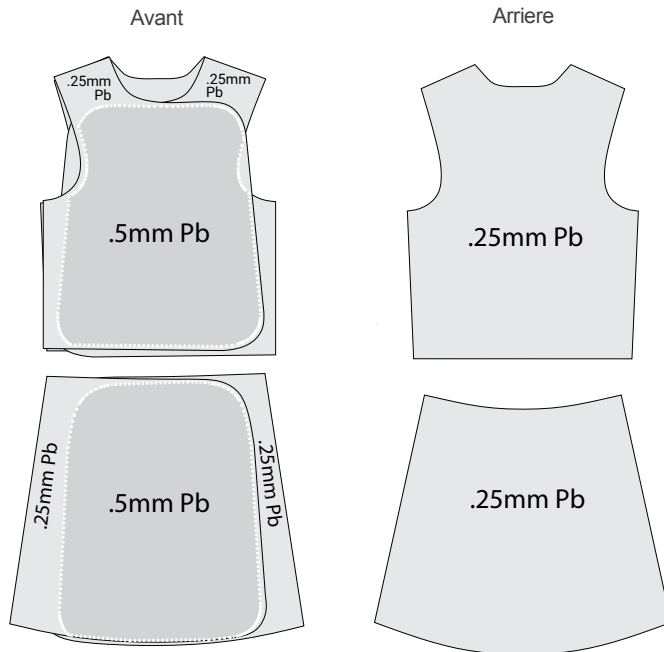


CONFIGURATION DE MATÉRIEL DE BASE

Infab propose trois configurations d'options de protection.

TOUS LES TABLIERS ONT UNE PROTECTION DE 0.25MM DE PB A L'ARRIERE


CLASSIC VESTE & JUPE INVERSÉES

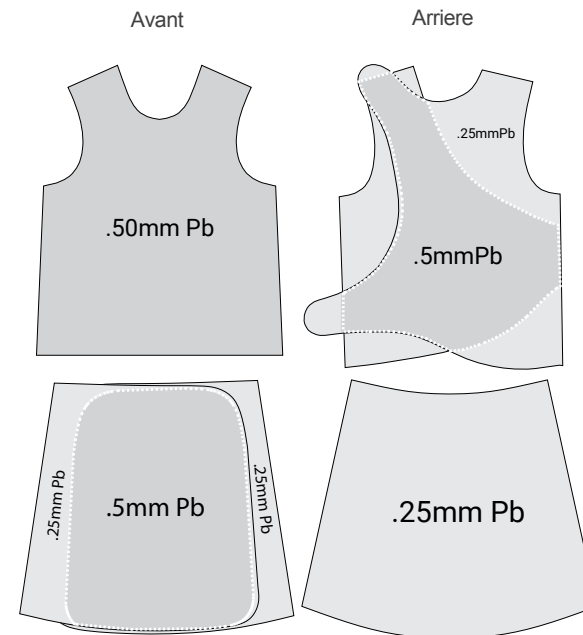


Panneau avant disponible dans les trois configurations (0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb)

Toutes les jupes sont de 0,5 mm Pb au chevauchement sauf indication contraire

FEMME

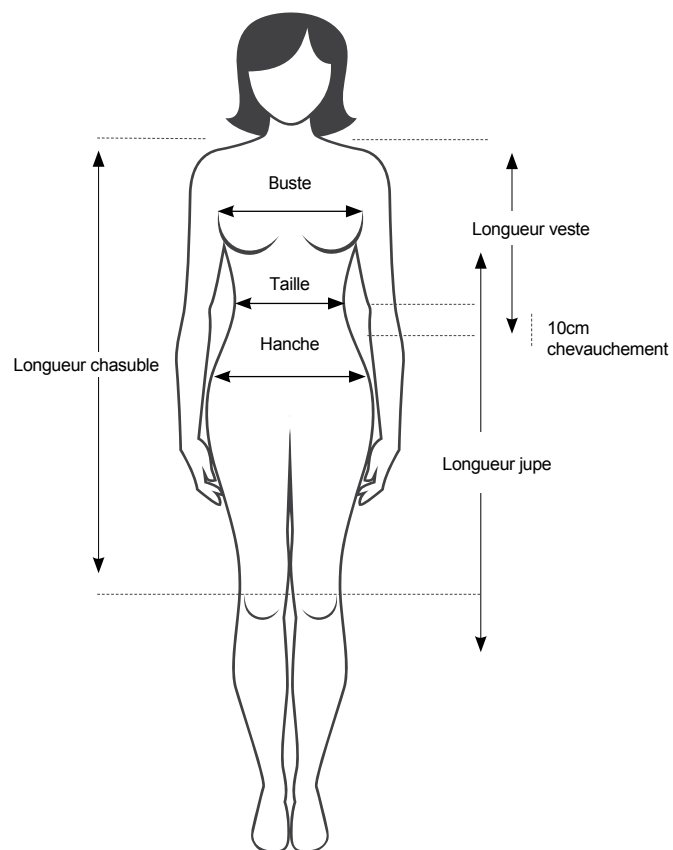

HOMME

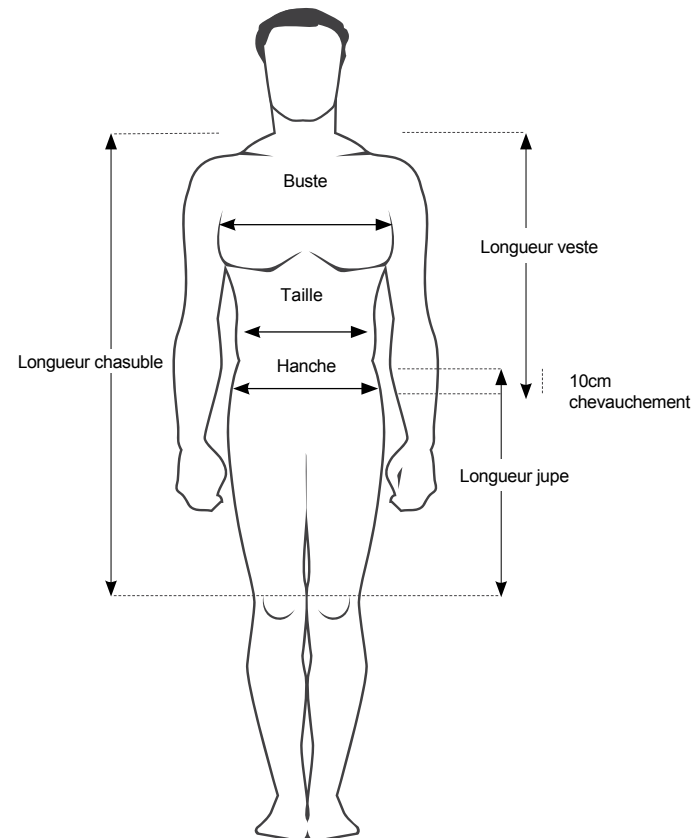

Femme

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Buste	76-81 cm	84-94 cm	94-99 cm	102-107 cm	109-114 cm	117-122 cm
Taille	64-69 cm	71-76 cm	78-84 cm	86-91 cm	94-99 cm	102-107 cm

Homme

	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Buste	86-94 cm	97-104 cm	107-114 cm	117-125 cm	127-132 cm
Taille	71-79 cm	81-89 cm	91-99 cm	102-109 cm	112-117 cm

Femme - Longueur de tablier standard

	Tablier avant	Tablier complet	Classic & 703 Veste	Classic Jupe	Revolution veste avant	Revolution veste arrière	Révolution jupe
X-Small	97 cm	97 cm	51 cm	46 cm	56 cm	66 cm	56 cm
Small	97 cm	97 cm	56 cm	51 cm	56 cm	66 cm	56 cm
Medium	97 cm	97 cm	61 cm	56 cm	56 cm	66 cm	56 cm
Large	97 cm	97 cm	64 cm	58 cm	56 cm	66 cm	56 cm
X-Large	97 cm	97 cm	66 cm	61 cm	56 cm	66 cm	56 cm
XX-Large	97 cm	97 cm	69 cm	64 cm	61 cm	66 cm	56 cm

Homme - Longueur de tablier standard

	Tablier avant	Tablier complet	Classic & 703 Veste	Classic Jupe	Revolution veste avant	Revolution veste arrière	Révolution jupe
Small	97 cm	97 cm	56 cm	51 cm	61 cm	71 cm	56 cm
Medium	97 cm	97 cm	61 cm	56 cm	61 cm	71 cm	56 cm
Large	97 cm	97 cm	64 cm	58 cm	61 cm	71 cm	56 cm
X-Large	107 cm	97 cm	66 cm	61 cm	61 cm	71 cm	56 cm
XX-Large	112 cm	97 cm	71 cm	64 cm	66 cm	71 cm	56 cm



VAS VESTE & JUPE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.50mm Pb avant et 0.25mm Pb arrière
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Panneaux frontaux superposés pour une protection maximale
- Fermetures d'origine VELCRO®
- Deux poches
- Épaulettes confortables
- Fermeture par ceinture et boucle sur les jupes
- Bretelles sur la jupe

RVAS VESTE & JUPE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Panneau avant solide - s'enfile par l'arrière
- Deux poches
- Ceinture ajustable et fermeture de la marque VELCRO®
- Dos élastique croisé pour un soutien lombaire confortable et un soulagement du poids
- Fermeture de l'épaule en haut à gauche de la marque VELCRO®

EVAS VESTE & JUPE ELASTIQUE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Dos élastique orthopédique intégré pour soutenir le bas du dos
- Fermeture de la marque VELCRO®
- Deux poches



LSW CHASUBLE - CEINTURE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.50mm Pb avant et 0.25mm Pb arrière
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Dos élastique avec ceinture noire pour soutenir le bas du dos
- Épaulettes confortables
- Ceinture ajustable
- Deux poches



MWA CHASUBLE SPECIAL

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Panneau avant solide avec dos croisé
- Bretelles
- Fermetures à boucle
- Deux poches



FCW CHASUBLE COMPLET

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.50mm Pb avant et 0.25mm Pb arrière
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Deux poches
- Chevauchement des panneaux avant
- Protection complète
- Fentes latérales pour une mobilité accrue



AWC DEMI-CHASUBLE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Répartition du poids
- Épaulettes confortables
- Deux poches

EBA DEMI-CHASUBLE ELASTIQUE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Dos élastique orthopédique intégré pour le soutien du dos et le confort
- Épaulettes confortables
- Deux poches

LSF DEMI-CHASUBLE - CEINTURE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Épaulettes confortables
- Boucle avant
- Deux poches



WBT DEMI-CHASUBLE - BOUCLE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Épaulettes confortables
- Bretelles croisées avec boucles
- Deux poches

SPL DEMI-CHASUBLE - ECONOMIQUE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Épaulettes confortables
- Se fixe à l'avant avec des sangles
- Bretelles croisées

SDO DEMI-CHASUBLE - CHIRURGIE

COLORIS : Classic Nylon
 GAMME : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
 PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb
 TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL
 MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Conçu pour être enlevé sans casser le champ stérile
- Facile à enlever
- Se fixe à l'avant avec les fermetures de marque VELCRO®
- Double poche



SDA DEMI-CHASUBLE - CHIRURGIE

COLORIS : Classic Nylon

GAMME : REGULAR,
KIARMOR Lead-Free

PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb

TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL

MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Conçu pour être enlevé sans casser le champ stérile
- Fermetures VELCRO en haut des deux épaules
- Le dos se fixe avec une sangle de marque VELCRO®
- Double poche



TFAM DEMI-CHASUBLE TRI-FLAP

COLORIS : Classic Nylon

GAMME : REGULAR,
KIARMOR Lead-Free

PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb

TAILLES : Femme XS-5XL, Homme S-5XL

MONOGRAMME **Block** or *Script*

- Panneau avant divisé pour la protection et le confort en position assise
- Conçu pour être assis
- Fermetures de marque VELCRO®
- Épaulettes confortables
- Deux poches



DTL-TECH CHASUBLE DENTAIRE

TAILLE : Adulte
COLORIS : Coloris CLASSIC
PROTECTION : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
MONOGRAMME : *Block* or *Script*

- Sangles
- Équivalence de 0,35 mm Pb



DTL-PANO CAPE DENTAIRE

TAILLE : Adulte
COLORIS : Coloris CLASSIC
PROTECTION : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
MONOGRAMME : *Block* or *Script*

- Dos nu avec fermeture VELCRO®
- Équivalence de 0,35 mm Pb

DTL-ADULT TABLIER DENTAIRE ADULTE



DTL-ADULT

TAILLE : Adulte
COLORIS : Coloris CLASSIC
PROTECTION : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
MONOGRAMME : *Block* or *Script*



DTL-ADULT-TC

- Matériau intérieur antiglisse
- Équivalence de 0,35 mm Pb

DTL-CHILD TABLIER DENTAIRE ENFANT



DTL-CHILD

TAILLE : Adulte
COLORIS : Coloris CLASSIC
PROTECTION : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
MONOGRAMME : *Block* or *Script*



DTL-CHILD-TC

- Matériau intérieur antiglisse
- Équivalence de 0,35 mm Pb

COLORIS STANDARD - SANS SURCÔÛT




SH-23 Art Deco




SH-24 Cactus




SH-25 Emoji

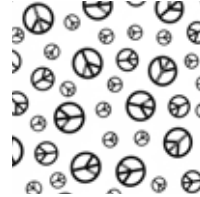

211 Peace

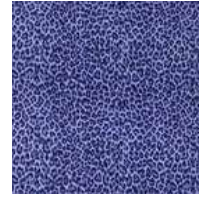

212 Animal Print Blue

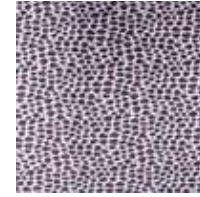

214 Animal Print Pink



SH-29 Planets



SH-30 Sharks




SH-31 Sugar Skulls




SH-32 Orange Hibiscus



SH-1 Graffiti Hearts

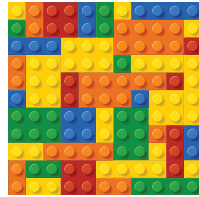


SH-2 Blocks

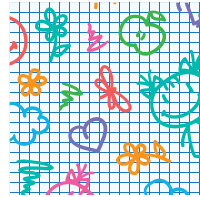

SH-3 Kids Sketch



SH-4 Stylized Hearts

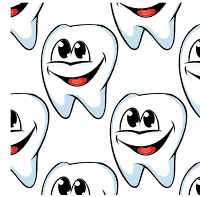


SH-5 Teeth



SH-6 Color Camo



SH-7 Metallic Splatter

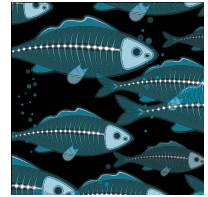


SH-8 Fish Bones



SH-9 Sports



SH-10 Cats

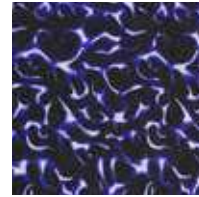

207 Blue Flame



SH-12 Unicorn



SH-13 Hawaiian Flowers



SH-14 Dino Fossil



SH-15 Flamingo



219 Pink Paws



SH-17 Race car



SH-18 New Camo



SH-19 Pink Paisley



SH-20 New Flames




SH-21 Volleyball



SH-22 Fitness



SH-33 Christmas Sweater

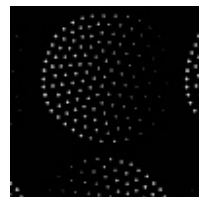

SH-35 Moon Cycle




269 Animal Farm



SH-38 Astronaut



SH-40 Frenchies

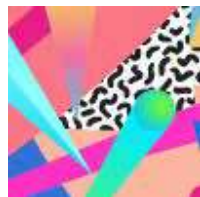

SH-42 Eighties



SH-48 Unicorn Black



179 New Gumball




180 Orange Hawaii




182 Sheep in Clouds




184 White Dots on Pink

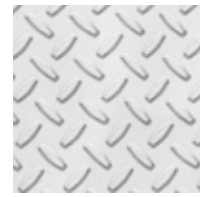

252: Steel

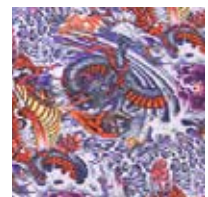

216: Asian

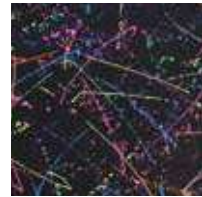

140 Splash



218 Mamba



167 Cheetah




168 New Jeans




262 Black Butterflies



263 Chocolate Giraffe

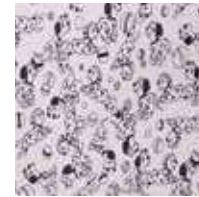

172 Puppies


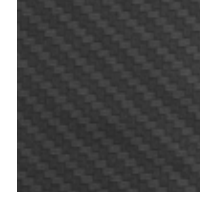


251 Carbon Fiber



265: Chicklets

COLORIS STANDARD - SANS SURCOÛT

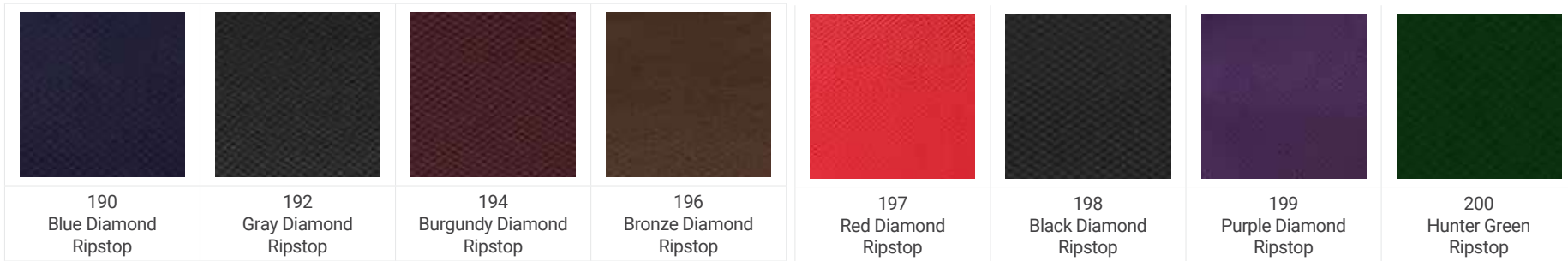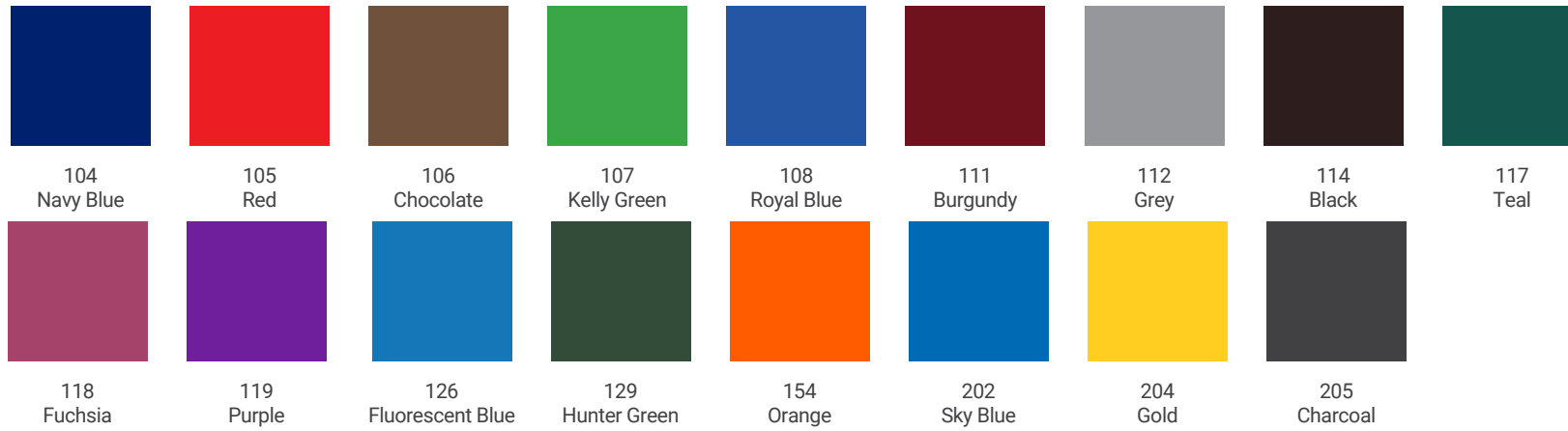

COLORIS PREMIUM - AVEC SURCOÛT



SMART-TRACK - SUIVI DE TABLIERS

smartrack.infabcorp.com



Gérez, suivez et documentez l'inspection des vêtements de radioprotection rapidement, facilement et complètement GRATUITEMENT.

SMART TRACK fournit aux installations un processus simplifié et convivial pour documenter les inspections et imprimer des rapports détaillés pour les audits effectués.

SMART TRACK ne modifie pas votre processus d'inspection actuel, il contribuera simplement à accélérer le processus.

CARACTERISTIQUES


- Ajoutez divers utilisateurs à votre compte pour faciliter le processus d'inspection
- Possibilité d'accéder à plusieurs comptes pour les systèmes de santé dotés de multiples installations
- Générer des rapports détaillés sur l'inventaire
- Éliminez les vêtements défectueux directement de votre compte
- Numérisez et documentez directement depuis votre téléphone mobile en utilisant l'application mobile gratuite Smart Track

AVANTAGES

- AUCUN logiciel, AUCUN enregistrement / frais annuels
- Accélérer et rationaliser le processus d'inspection
- Assistance fournie avec la mise en œuvre de Smart Track, y compris le téléchargement de l'inventaire
- La conception permet une intégration simple



Ne nécessite aucun logiciel.
Inscription gratuite.

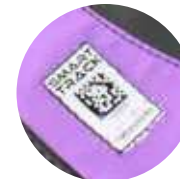

SMART-TRACK inclus sur tous les nouveaux tabliers.

GESTION DE TOUS VOS TABLIERS

y compris les marques non Infab
Scanner intelligent et balises intelligentes avec support



200 vignettes
d'inspection annuelle



200 codes-barres 2D SMART TRACK
avec support de sécurité permanent



SMART TRACK Scanner

APPLICATION MOBILE

L'application mobile SMART TRACK facilite la numérisation et le suivi de tous les tabliers d'un service ou d'une installation.

Cette application possède toutes les fonctionnalités de la version Web de SMART TRACK, mais comprend également un scanner intégré.

Téléchargez simplement l'application gratuitement, connectez-vous à votre compte et scannez et suivez tous vos tabliers rapidement, facilement et complètement gratuitement.



MTC PROTEGE THYROIDE MAGNETIQUE

COLORIS : Tous
PROTECTIONS : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
TAILLES : Standard (S1) & Médium (M1)

- Fermeture magnétique
- Ajustement confortable
- Grande zone de protection
- Monogramme en option



SVT PROTEGE THYROIDE VISIERE

COLORIS : Tous
PROTECTIONS : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
TAILLES : Standard (S1) & Médium (M1)

- Ajustement confortable
- Grande zone de protection
- Fermeture Velcro
- Monogramme en option



REV-TC PROTEGE THYROIDE REVOLUTION

COLORIS : 500 Series, 600 Series, 700 Series, 800 Series,
 900 Series
PROTECTIONS : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
TAILLES : Taille unique

- Grande zone de protection
- Tissu extérieur Révolution
- Doublure anti-humidité Cool Wear
- Monogramme en option



NST PROTEGE THYROIDE

COLORIS : Tous
PROTECTIONS : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
TAILLES : Standard (S1) & Médium (M1)

- Ajustement confortable
- Grande zone de protection
- Monogramme en option
- Fermeture Velcro



TCV PROTEGE THYROIDE AVEC COUTURES

COLORIS : Tous
PROTECTIONS : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free
TAILLES : Standard (S1) & Médium (M1)

- Taille unique
- Entièrement réglable
- Monogramme en option
- Fixation facultative au tablier
- Fermeture Velcro



TC PROTEGE THYROIDE INTEGRE

COLORIS : CLASSIC Nylon
PROTECTIONS : REGULAR,
 KIARMOR Lead-Free

- Disponible sur la plupart des tabliers
- Protège thyroïde intégré



-B : Fermeture boucle



KTC : Attache avec ou sans boucle



683447

**NETTOYANT TABLIER
REVOLUTION SCRUBBLES**

Le nettoyant pour tabliers Scrubbles nettoie en toute sécurité vos tabliers, avec un parfum d'agrumes et une formule plus efficace et plus puissante.

683447
Spray - 95cl

683448
Boîte de 12 sprays de 95cl



CLX28

SPRAY CLOROX

Recommandé pour une utilisation polyvalente des surfaces diverses

CLX28
Spray - 95cl



CLX29

RECHARGE CLOROX

Recommandé pour une utilisation polyvalente des surfaces diverses

CLX29
Spray - 3.78L



CLX24

**LINGETTES
MULTISURFACES
CLOROX**

Recommandé pour le nettoyage et la désinfection au quotidien, les surfaces dures et sensibles au toucher

CLX24
Boîte de 95 unités



CLX26

**RECHARGE
LINGETTE
CLOROX**

Recommandé pour le nettoyage et la désinfection au quotidien, des surfaces dures et sensibles au toucher

CLX26
Recharge de 185 unités

NSM TISSU ANTI-GLISSE POUR JUPES



- Empêche votre jupe de glisser le long de la taille
- Peut être ajouté à n'importe quelle jupe



PROTÈGE-TIBIAS

- Réduire l'exposition aux radiations
- Fermetures VELCRO

COLORIS : Classic

TAILLES : Small, Medium, Large

PROTECTIONS : REGULAR, KIARMOR Lead-Free

REV-BAG SAC - TABLIER REVOLUTION



- Tissu Revolution
- Fond en plastique



909821 SAC - TABLIER CLASSIC



- Options CLASSIC de couleur nylon
- Design CLASSIC



257890 BRETELLES



Taille unique. Réglage facile

CEINTURE NOIRE

Pour un soutien supplémentaire et un soulagement du poids, la ceinture élastique orthopédique soutient le bas du dos tout en enlevant le poids du tablier de vos épaules.

- 257879** X-Small
- 257880** Small
- 257881** Medium
- 257882** Large
- 257883** X-Large
- 257884** XX-Large



REV-SLV-1 ATTACHE THYROIDIENNES - REVOLUTION



- Tissu extérieur REVOLUTION
- Protection supplémentaire pour la poitrine
- Porter sous le tablier

COLORIS : Noir

TAILLES : Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large

PROTECTIONS : REGULAR, KIARMOR Lead-Free



AVANT



ARRIERE

REV-SLV-2 MANCHE INDIVIDUELLE



- Tissu extérieur REVOLUTION
- Sangle élastique VELCRO™
- Vendu à l'unité

COLORIS : Tous

PROTECTIONS : REGULAR, KIARMOR Lead-Free



APW MANCHETTES

Augmente la protection des épaules sans perdre la mobilité.

REMARQUE: Ce produit nécessite une couture et ne peut être ajouté qu'aux nouvelles commandes de tablier ou aux tabliers qui nous sont retournés. Ces manchettes ne peuvent pas être expédiées séparément.

COLORIS: Tous

PROTECTIONS : REGULAR, KIARMOR Lead-Free



SLV MANCHES OPTIONNELLES

- Protection supplémentaire du bras et de l'épaule
- 0,50 mm équivalent Pb
- Disponible sur la plupart des modèles de tabliers
- Système de fixation amovible en option, configuration permanente cousue ou Velcro

COLORIS: Tous

PROTECTIONS : REGULAR, KIARMOR Lead-Free





CALOT REVOLUTION - ELASTIQUE

- Tissu extérieur REVOLUTION
- Protection contre les radiations
- Tissu anti-transpirant Cool Wear
- Arrière élastique

TAILLE : Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large

COLORIS : Coloris REVOLUTION

PROTECTION: 0.25 mm, 0.35 mm, 0.50 mm Pb

GAMME : REGULAR, KIARMOR Lead-Free



400025 CALOT REVOLUTION - VELCRO

- Tissu extérieur REVOLUTION
- Protection contre les radiations
- Tissu anti-transpirant Cool Wear
- Arrière VELCRO

TAILLE : Taille unique

COLORIS : Coloris REVOLUTION

PROTECTION: 0.25 mm, 0.35 mm, 0.50 mm Pb

GAMME : REGULAR, KIARMOR Lead-Free



CALOT CLASSIC - SANGLES

- Protection contre la radiation
- Disponible en Bi-couche

TAILLE : Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large

COLORIS : Coloris CLASSIC

PROTECTION: 0.25 mm, 0.35 mm, 0.50 mm Pb

GAMME : REGULAR, KIARMOR Lead-Free



DC-25 CALOT - USAGE UNIQUE

- Boîte de 20 unités
- 100% sans plomb pour une élimination facile

TAILLE : Taille unique

PROTECTION : 0.25 mm Pb

GAMME : KIARMOR


COUVRE CASSETTE - ZIP



- Fermeture Zip
- Emballé dans des boîtes distributrices
- Disponible en cinq tailles
- Imperméable aux fluides
- Haute qualité
- Jetable
- Plastique polyéthylène de qualité supérieure

Référence	Description	Dimensions
910810-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 100 unités	27.94 x 33.02 cm
900810-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 500 unités	27.94 x 33.02 cm
911012-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 100 unités	33.02 x 35.56 cm
901012-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 500 unités	33.02 x 35.56 cm
911417-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 100 unités	43.18 x 48.26 cm
901417-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 500 unités	43.18 x 48.26 cm
911619-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 100 unités	48.26 x 55.88 cm
901619-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 500 unités	48.26 x 55.88 cm
912420-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 100 unités	50.80 x 60.96 cm
902420-ZT	Couvre cassette - Zip Boîte de 500 unités	50.80 x 60.96 cm

COUVRE CASSETTE - FLIP

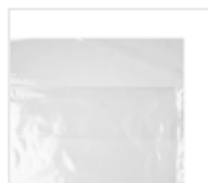

- Fermeture "FLIP"
- Emballé dans des boîtes distributrices
- Disponible dans les cinq taille
- Imperméable aux fluides
- Haute qualité
- Jetable
- Plastique polyéthylène de qualité supérieure

Référence	Description	Dimensions
910810	Couvre cassette - Flip Boîte de 100 unités	27.94 x 33.02 cm
900810	Couvre cassette - Flip Boîte de 500 unités	27.94 x 33.02 cm
911012	Couvre cassette - Flip Boîte de 100 unités	33.02 x 35.56 cm
901012	Couvre cassette - Flip Boîte de 500 unités	33.02 x 35.56 cm
911417	Couvre cassette - Flip Boîte de 100 unités	43.18 x 48.26 cm
901417	Couvre cassette - Flip Boîte de 500 unités	43.18 x 48.26 cm
911619	Couvre cassette - Flip Boîte de 100 unités	48.26 x 55.88 cm
901619	Couvre cassette - Flip Boîte de 500 unités	48.26 x 55.88 cm
912420	Couvre cassette - Flip Boîte de 100 unités	50.80 x 60.96 cm
902420	Couvre cassette - Flip Boîte de 500 unités	50.80 x 60.96 cm

COUVRE CASSETTE - ROULEAU



- Haute qualité
- Jetable
- Plastique polyéthylène de qualité supérieure
- 500 unités par rouleau
- Imperméable aux fluides

Convient aux cassettes : 35 x 43 cm

Référence	Description
900500	Rouleau de 500 unités
900750	Support mural

COUVRE CASSETTE - MURAL



- Stockage de 100 couvertures cassettes
- Haute qualité

Référence	Description
901825	Support mural pour couvre cassette 35.56 x 43.18cm
910829	Support mural pour couvre cassette 20.32 x 25.40cm
911132	Support mural pour couvre cassette 25.40 x 30.48cm



880005 Noir



880006 Argenté

EDGE

PLAN

MONTURE : Universelle
POIDS : 84 gr
PRESCRIPTION: Plan
COLORIS: Noir, Argenté
PROTECTION: 0.75 mm Pb

- Conception enveloppante pour une protection latérale améliorée
- Les ponts de nez ont un rembourrage intérieur caoutchouté doux pour plus de confort.
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



800275 Gris foncé



FLIP TOP

PLAN

MONTURE : Universelle
POIDS : 85 gr
PRESCRIPTION: Plan
COLORIS: Gris foncé
PROTECTION: 0.75 mm Pb

- Les lunettes de protection «Flip Top» sont nouvelles, conçues pour réduire le rayonnement diffusé de 70% (la réduction réelle dépend de la technique d'imagerie utilisée).
- Légère
- Grande zone de protection (surface de l'objectif de 2,5 cm (6 cm) de haut x 6,25 cm de long)
- Les lunettes «Flip Top» s'ouvrent à l'avant.
- Pont de nez réglable
- Peut être utilisé comme masque de réduction de radiation autonome ou s'ajuste facilement sur vos lunettes existantes
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



830250 Noir



830252 Argenté



800070 Bleu



830251 Rouge

MAXX 30

PLAN, AVEC CORRECTION, BIFOCAUX, PROGRESSIVE

MONTURE : Universelle
POIDS : 63 gr
PRESCRIPTION: Plan, Correction, Bifocaux, Progressive
COLORIS: Noir, Rouge, Argenté, Bleu
PROTECTION: 0.75 mm Pb

- Compatible avec tous les types de prescription
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 + et aux normes de résistance aux chocs ASTM F803.
- Les branches unisexes et les ponts de nez ont un rembourrage intérieur caoutchouté doux pour plus de confort.
- Légère et confortable
- Large zone de vision pour une protection maximale
- Cadre progressif bifocale Rx (nécessite une hauteur de segment)
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



683206 Bleu / Transparent

CYBERFLEX

AVEC CORRECTION

MONTURE : Universelle
POIDS : 85 gr
PRESCRIPTION Correction
N: COLORIS: Bleu / Transparent
PROTECTION: 0.75 mm Pb

- Écrans latéraux optionnels de 0,50 mm Pb
- Branches réglables
- Grande zone de visualisation
- Protections latérales intégrées pour une meilleure protection contre les éclaboussures
- Peut être commandé avec des écrans latéraux de protection contre les rayonnements
- Zone de protection surdimensionnée
- Protection contre les éclaboussures
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



800230 Noir mat



800240 Métalisé



800235 Vert foncé

FITOVERS RAZOR

PLAN

MONTURE : Universelle
POIDS : 82 gr
PRESCRIPTION: Plan
COLORIS: Noir mat, Métalisé - Vert
PROTECTION: foncé 0.75 mm Pb

- Convient aux cadres ne dépassant pas 132 mm de largeur x 38 mm de hauteur.
- Protection contre les rayonnements
- Cadre hypoallergénique en cristal Nylon TM
- Conçues pour être portées par-dessus des formes de monture de lunettes de prescription petites, carrées ou rectangulaires
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



800304 Noir mat



800306 Noir marbré



800307 Rouge marbré

FITOVERS LOTUS

PLAN

MONTURE : Universelle
POIDS : 83 gr
PRESCRIPTION: Plan
COLORIS: Noir mat, Noir marbré, Rouge
PROTECTION: marbré 0.75 mm Pb

- Convient aux cadres ne dépassant pas 141 mm de largeur x 40 mm de hauteur.
- Protection contre les rayonnements
- Cadre hypoallergénique en cristal Nylon TM
- Conçues pour être portées par-dessus des montures de lunettes de prescription de moyenne, ovale ou ronde
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



ORION-01 Noir



ORION-02 Bleu Marbré

FITOVERS ORION

PLAN

MONTURE : Universelle
POIDS : 84 gr
PRESCRIPTION: Plan
COLORIS: Noir - Bleu marbré
PROTECTION: 0.75 mm Pb

- Convient aux cadres ne dépassant pas 141 mm de largeur x 40 mm de hauteur.
- Protection contre les rayonnements
- Cadre hypoallergénique en cristal Nylon TM
- Conçues pour être portées par-dessus des montures de lunettes de prescription de moyenne, ovale ou ronde
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



832001 Tortue



832000 Noir

FITOVERS ECOFIT

PLAN

MONTURE : Universelle
POIDS : 89 gr
PRESCRIPTION: Plan
COLORIS: Noir, Tortue
PROTECTION: 0.75 mm Pb

- Protection contre les rayonnements
- Protection latérale de 0,35 mm Pb
- Cadre hypoallergénique en cristal Nylon TM
- Conçues pour être portées sur des lunettes de vue
- Spray anti-buée, extension de sangle de sécurité, étui de protection



- Élimine les angles morts causés par les verres standards et offre une zone d'observation large et dégagée.
- La visière protectrice avec revêtement anti-rayures offre une équivalence de 0,10 mm Pb.
- Revêtement anti-rayures.
- Ce masque comporte une sangle de tête à cliquet qui s'adapte à toutes les tailles et est particulièrement utile pour les personnes qui portent des lunettes ou qui ont besoin de protéger leur visage.



- Taille du cadre: réglable
- Poids: 386gr
- Cadre non Rx

Référence	Description
FS-HALF	Demi-visière acrylique plombée



- Taille du cadre: réglable
- Poids: 460gr
- Cadre non Rx

Référence	Description
FS-FULL	Visière acrylique plombée

GANTS REVOLUTION

Les gants Révolution sont conçus pour être les gants les plus confortables, les plus souples et les plus légers. Ces gants sont dotés de doigts tactiles. La prise tactile permet de bien saisir les instruments pendant une longue procédure.



TAILLES: 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

COLORIS: Noir

ATTENUATION Leger (60kV:40%, 80kV:35%, 100kV:30%)
Medium (60kV:68%, 80kV:61%, 100kV:54%)
Lourd (60kV:75%, 80kV:69%, 100kV:63%)

- Sans latex
- Sans poudre
- Tactile
- Stérile
- Restérilisable avec du gaz EO
- Caoutchouc plombé
- Ajustement anatomique
- Boîtes de 5 unités

GANTS REVOLUTION MAXI-FLEX

Le moyen idéal pour protéger entièrement vos mains et vos avant-bras. Ces gants sont les plus flexibles et les plus confortables du marché. Doublure intérieure amovible, lavable et remplaçable. Le revêtement extérieure en vinyle amovible peut être remplacé lorsqu'il est usé.

TAILLE: 38 cm

COLORIS: Noir, Rouge, Fuchsia, Taupe, Rose, Bleu,

PROTECTION: Turquoise .50 mm Pb

- Équivalence de 0,50 mm Pb
- Revêtements extérieurs en vinyle robustes et durables
- Doux, flexible et confortable
- Doublures intérieures amovibles et lavables
- Revêtements intérieurs et extérieurs remplaçables



GANTS CONTRE LE RAYONNEMENT NEOPRÈNE, SANS PLOMB ET SANS LATEX

Conçus pour réduire la quantité de rayonnement diffusé dans les mains durant les procédures radiologiques.

TAILLES: 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

ATTENUATION: 60kVp:44.9%, 80kVp:36.3%, 100kVp:30.6%, 120kVp 26.8%
Niveaux d'énergie directe du faisceau. Peut varier de + 5%

- Sans plomb
- Sans latex
- Haute sensibilité
- Protection maximale contre les radiations sans latex
- Emballé dans un sachet stérile



GANTS MAXI-FLEX

Ajustement confortable avec une dextérité maximale. Les doublures intérieures amovibles, lavables et remplaçables réduisent les odeurs et permettent des lavages fréquents. Les couvertures extérieures en vinyle sont amovibles et permettent leurs remplacements lorsqu'elles sont usées.

TAILLE: 38 cm

COLORIS: Gris, Bleu, Bordeaux

- Équivalence de 0,50 mm Pb
- Des doublures anti-humidité Cool Wear
- Revêtements extérieurs en vinyle robustes et durables
- Doux, flexible et confortable
- Doublures intérieures amovibles
- Revêtements intérieurs et extérieurs remplaçables



MITAINES OUVERTES

- Dextérité manuelle exceptionnelle
- Mitaine fendue permettant aux doigts de sortir
- Protection complète des mains et des bras
- 0,50 mm équivalent Pb
- Précision moulée pour un ajustement parfait
- 38 cm de longueur
- 3 coloris disponibles (gris, bordeaux et bleu)

683700 Mitaines ouverte - la paire

683701 Mitaine droite ouverte

683702 Mitaine gauche ouverte



MITAINES OUVERTES AVEC RABAT

- Rabat spécial pour fermer l'ouverture de la moufle lorsque l'extension des doigts n'est pas souhaitée
- 0,50 mm équivalent Pb
- Précision moulée pour un ajustement parfait
- 38 cm de longueur
- 3 coloris disponibles (gris, bordeaux et bleu)

683710 Mitaines ouverte avec rabat - la paire

683711 Mitaine droite ouverte avec rabat

683712 Mitaine gauche ouverte avec rabat



BOUCLERS A MAIN

- Équivalence de 0,50 mm Pb
- Paire durable, confortable et entièrement réglable
- Protection totale de la main supérieure
- Mobilité totale de la main et des doigts
- Fermetures à crochet et à boucle au poignet
- Taille unique

684000 Boucliers à main



MITAINES MAXI-FLEX

Le meilleur moyen pour protéger vos mains et vos avant-bras. Ces moufles sont les plus flexibles et les plus confortables du marché.

- Équivalence de 0,50 mm Pb
- Revêtements extérieurs en vinyle robustes et durables
- Doux, flexible et confortable
- 3 coloris disponibles (gris, bordeaux et bleu)
- Doublures intérieures amovibles
- Revêtements intérieurs et extérieurs remplaçables

683303 Mitaines Maxi-Flex - la paire

683308 Mitaine droite Maxi-Flex

683309 Mitaine gauche Maxi-Flex



CHAMPS OPERATOIRES



*Polyvalent
et diagnostic*




*Polyvalent et
fenêtré*



*Avec accès
claviculaire*




Angiographies

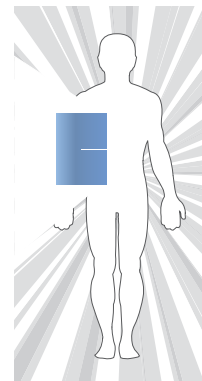

Biopsies



Dialyse

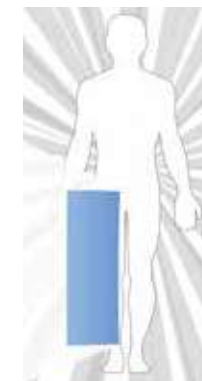

Autres chirurgies



CHAMPS OPERATOIRES	Boîte de 10	Boîte de 15	Carton de 3 boîtes
Champ opératoire polyvalent absorbant - Non fenêtré - 30 x 43 cm		SA-MPS	SA-MPS-CS
Champ opératoire polyvalent absorbant - Fenêtré - 30 x 43 cm		SA-MPF	SA-MPF-CS
Champ opératoire polyvalent absorbant - Fenêtré demi-cercle - 30 x 43 cm		SA-EPS	SA-EPS-CS
Champ opératoire angiographie absorbant - Fenêtré cercle - 30 x 43 cm		SA-AGS	SA-AGS-CS
Champ opératoire biopsie absorbant - Fenêtré fine - 30 x 43 cm		SA-BSS	SA-BSS-CS
Champ opératoire dialyse absorbant - Fenêtré - 96 x 91 cm	SA-DDD		SA-DDD-CS
Champ opératoire autres chirurgies - 30 x 86 cm	SA-PER		SA-PER-CS

CLASSIC PARAVENTS


Paravent mobile avec un châssis en acier et panneau de verre.

Base opaque 1.5mm de plomb recouverte de plastique "Sintra" pour un nettoyage facile et une durabilité.

Les différentes pièces peuvent être facilement remplacées, y compris le verre si nécessaire.

Verre : équivalent 2.0mm Pb

Acrylique : équivalent 0.50mm Pb

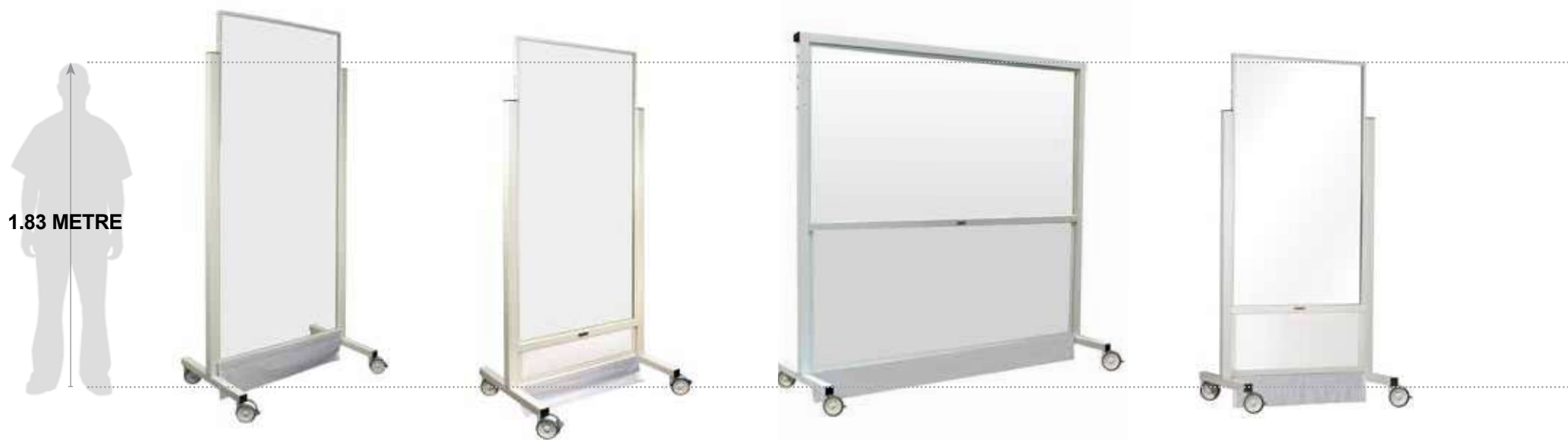

683492

PARAVENT MOBILE - LARGE FENETRE

TAILLE : H 208 x L 102 x l 64 cm

FENETRE : H 183 x L 91 cm

VERRE : Plomb ou acrylique

DIMENSIONS ENVOI : 76 x 203 x 122 cm

204 kg

683476

PARAVENT MOBILE - X-TALL

TAILLE : H 193 x L 102 x l 64 cm

FENETRE : H 152 x L 91 cm

VERRE : Plomb ou acrylique

DIMENSIONS ENVOI : 76 x 198 x 122 cm

204 kg

683488

PARAVENT MOBILE - X-WIDE

TAILLE : H 193 x L 196 x l 64 cm

FENETRE : H 91 x L 183 cm

VERRE : Plomb ou acrylique

DIMENSIONS ENVOI : 81 x 216 x 216 cm

204 kg

683473

PARAVENT MOBILE - MID-TALL

TAILLE : H 190 x L 86 x l 64 cm

FENETRE : H 152 x L 76

VERRE : Plomb ou acrylique

DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 112

177 kg

CLASSIC PARAVENTS

- Tous les paravents Classic comprennent quatre roulettes de qualité hospitalière, dont deux avec des freins verrouillables.
- Verre entièrement fermé avec des panneaux anti-commotion pour protéger le verre au plomb.
- Base en plastique "Sintra" facile à nettoyer et cadres en acier enduits de poudre de haute qualité.



683482

PARAVENT MOBILE
WIDE

TAILLE : H 188 x L 132 x l 64 cm
FENETRE : H 91 x L 122 cm
VERRE : Plomb ou acrylique
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 152 cm
 218 kg



683465

PARAVENT MOBILE -
PETITE FENETRE

TAILLE : H 188 x L 132 x l 64 cm
FENETRE : H 30 x L 30 cm
VERRE : Plomb ou acrylique
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 152 cm
 218 kg



683468

PARAVENT MOBILE -
MOYENNE FENETRE

TAILLE : H 188 x L 132 x l 64 cm
FENETRE : H 30 x L 30 cm
VERRE : Plomb ou acrylique
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 152 cm
 218 kg



683460

PARAVENT
MOBILE STANDARD

TAILLE : H 185 x L 86 x l 64
FENETRE : H 76 x L 61
VERRE : Plomb ou acrylique
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 107 cm
 218 kg

683484

PARAVENT MOBILE
- REGULAR

TAILLE : H 185 x L 86 x l 64 cm
FENETRE : H 76 X L 61 cm
VERRE : Plomb ou acrylique
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 107 cm
 218 kg



683458

PARAVENT MOBILE
"SHORTY"

TAILLE : H 117 x L 86 x l 64 cm
FENETRE : H 61 x L 76 cm
VERRE : Plomb ou acrylique
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 114 x 107 cm
 100 kg



683462 & 683461

CARACTERISTIQUES :

- Design incliné pour une meilleure vue
- Cadre en acier enduit de poudre
- Panneaux à impact en acrylique, enfermés dans un cadre soudé TIG de précision, renfermant complètement le panneau de verre en plomb pour une durabilité et une sécurité accrues
- 2 roulettes de haute qualité à verrouillage
- Base opaque équivalente à 1,50 mm de plomb recouverte de plastique «Sintra» pour un nettoyage et une durabilité faciles. Les pièces modulaires peuvent être facilement remplacées, y compris le verre si nécessaire.
- Zone de visualisation ergonomique




683462 PARAVENT INCLINÉ AVEC RIDEAU DE PORTÉE

FENÊTRE : 2.0mm Pb verre ou 0.50mm Pb acrylique
TAILLE FENÊTRE : H 61 x L 76 cm
TAILLE GLOBALE : H 178 x L 86 X l 64 cm
TAILLE RIDEAU : H 51 x L 76 cm
COLORIS : Blanc - gris ou noir
CADRE : Métal ou acier inoxydable
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 112 cm
 177 kg

683461 PARAVENT MOBILE INCLINÉ

FENÊTRE : 2.0mm Pb verre ou 0.50mm Pb acrylique
TAILLE FENÊTRE : H 61 x L 76 cm
TAILLE GLOBALE : H 178 x L 86 X l 64 cm
COLORIS : Blanc - gris ou noir
CADRE : Métal ou acier inoxydable
DIMENSIONS ENVOI : 76 x 183 x 112 cm
 177 kg

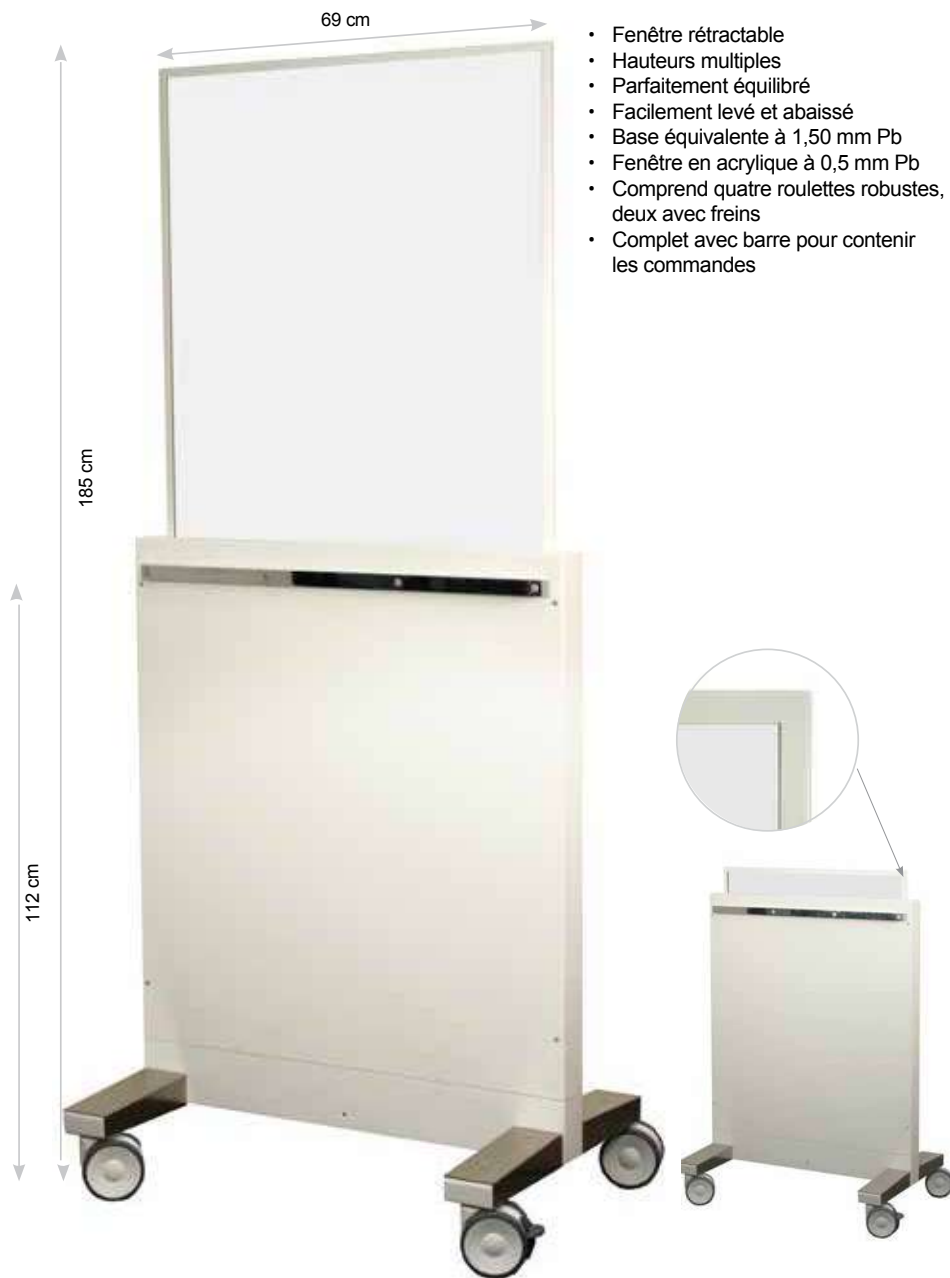

076993 ECRAN MOBILE - PROTECTION TECHNICIEN


TAILLE ELEVE : H 189 x L 76 cm
TAILLE ABAISSE : H 118 x L 76 cm
TAILLE FENETRE: H 95 x L 70 X l 64 cm
COULEURS : Blanc - gris ou noir
CADRE : Métal ou acier inoxydable
DIMENSIONS ENVOI : 81 x 132 x 36 cm - 77 kg



076994 ECRAN MOBILE - PROTECTION MEDECIN

FENTRE : 0.50mm Pb acrylique
TAILLE FENETRE: H 116 x L 50 cm
TAILLE GLOBALE : H 146 x L 177 cm
COULEURS : Blanc - gris ou noir
COULEURS RIDEAU : Gris
CADRE : Métal ou acier inoxydable
DIMENSIONS ENVOI : 122 x 102 x 31 cm - 73 kg



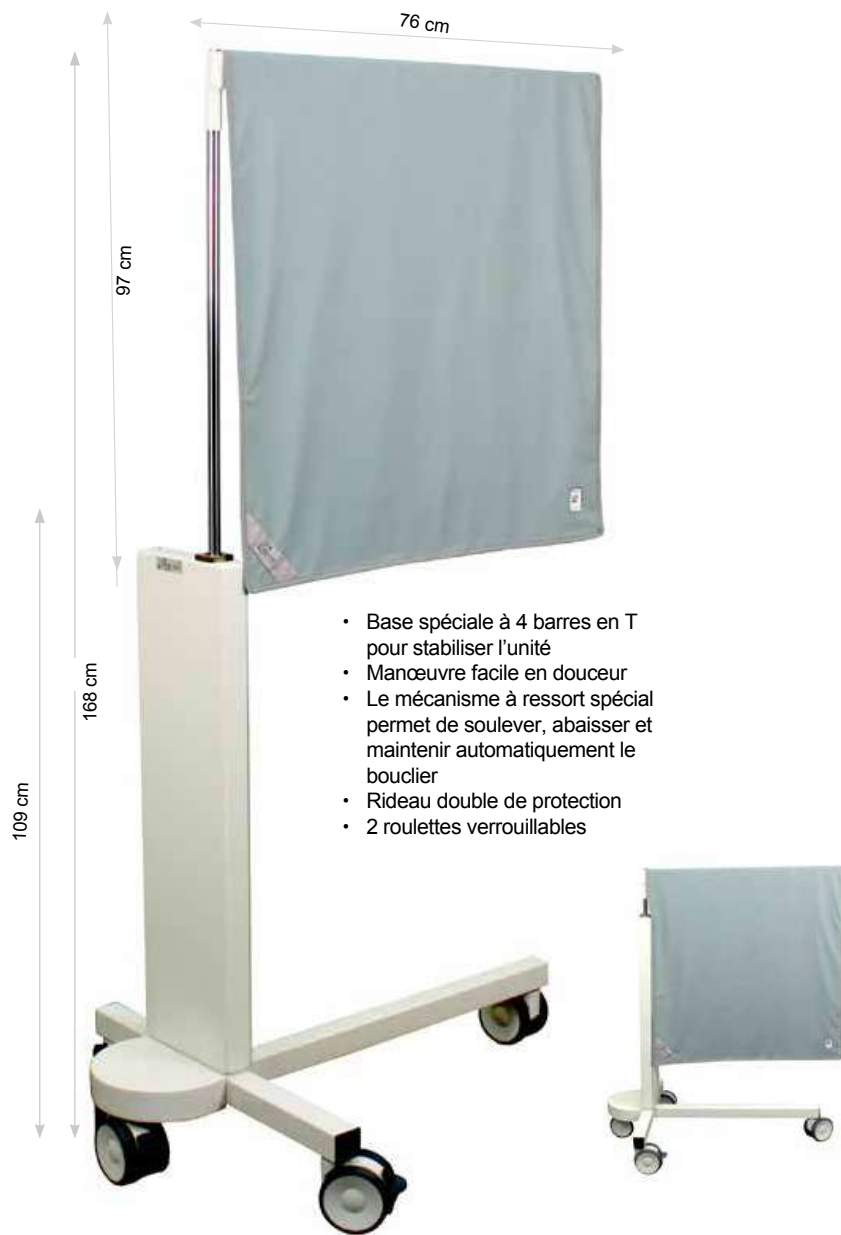

- Base spéciale à 4 barres en T pour stabiliser l'unité
- Manœuvre facile en douceur
- Le mécanisme à ressort spécial permet de soulever, abaisser et maintenir automatiquement le bouclier
- Rideau double de protection
- 2 roulettes verrouillables

REV-PMC RIDEAU MOBILE REVOLUTION

TAILLE : 168 cm - ajustable
RIDEAU : H 97 x L 76 - 0.50mm Pb
COULEURS : Blanc - gris ou noir
COULEURS RIDEAU : Gris
CADRE : Acier ou acier inoxydable



- Robuste
- Hauteur réglable entre 94 et 142 cm
- Rideau en vinyle - 76 x 76 cm
- 4 roulettes
- Manœuvre facile et en douceur

REV-SPMC RIDEAU MOBILE REVOLUTION - SOLIDE

TAILLE : H 142 x 76 cm
RIDEAU : H 76 x L 76 - 0.50mm Pb
PROTECTION : 0.50mm, 1.0mm Pb
COULEURS : Blanc - gris ou noir
COULEURS RIDEAU : Gris
CADRE : Acier ou acier inoxydable



- Manœuvre facile en douceur
- Le mécanisme à ressort spécial permet de soulever, abaisser et maintenir automatiquement le bouclier
- Double rideau de protection équivalent de 0,50 mm Pb
- 2 roulettes verrouillables



Facile à ajuster

- Cadre en acier enduit de poudre
- 2 roulettes verrouillables



REV-MC RIDEAU MOBILE - ECONOMIQUE

TAILLE : 172 cm
RIDEAU : H 76 x L 76 cm - 0.50mm Pb
COULEURS : Blanc - gris ou noir
COULEURS RIDEAU : Gris
CADRE : Acier ou acier inoxydable

683495 RIDEAU MOBILE

TAILLE : 107 cm - H 140 x L 92 X l 64 cm
PROTECTION : 0.50mm Pb
COULEURS : Tous

REV-MRK-10

PORTANT MOBILE REVOLUTION

DIMENSIONS : H 150 x L 110x l 79 cm

COLORIS : Blanc

- Peut contenir jusqu'à 10 tabliers
- Zone de stockage pratique sur la base
- Cintres robustes pivotant
- Durable

Dimensions envoi : Caisse 1: 25 kg

(81x116x33) Caisse 2: 25 kg (40x147x22)



683435

PORTANT MOBILE VALET

DIMENSIONS : H 150 x L 61 x l 63 cm

COLORIS : Blanc

- Gain de place; fournissant un stockage important tout en occupant un minimum d'espace.
- Construction en acier avec finition en émail.
- 4 roulettes de qualité hospitalière
- 10 cintres pour tabliers inclus

Existe aussi en version 20 cintres (683438)

Taille : H 150 x L 122 x l 61 cm



683419

PETIT PORTANT AVEC SUSPENSION

DIMENSIONS : H 198 x L 69 x l 63 cm

COLORIS : Blanc

- Six cintres pour tablier inclus
- Acier laminé
- Finition attrayante et durable
- Roulettes de qualité hospitalière
- Peut contenir jusqu'à six tabliers, une paire de gants et deux paires de lunettes de radioprotection




683407

PORTANT DELUXE

DIMENSIONS : H 137 x L 94 x l 68 cm

COLORIS : Blanc

- Super résistant
- 4 roulettes de qualité hospitalière
- Peut contenir jusqu'à dix tabliers
- Adaptateur veste et jupe en option
- Peut contenir jusqu'à 90 kg

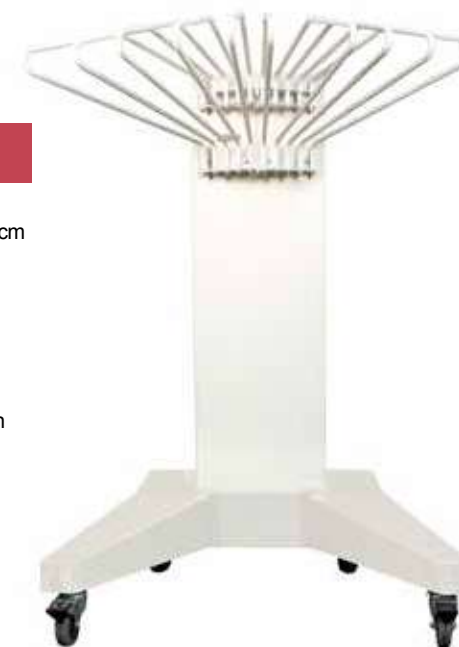

REV-LOCKER

PORTANT MOBILE REVOLUTION AVEC CODE

- Peut contenir jusqu'à 20 tabliers
- Poignée en T avec système de loquet à 2 câbles pour un verrouillage en haut et en bas
- Verrouillage numérique par code
- Plusieurs codes => Administrateur et utilisateur
- Le système de verrouillage est à piles avec une batterie de secours et alimentation de secours
- 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins

DIMENSIONS : H 165.10 x L 121.92 x l 66.04 cm

POIDS : 136 KG

COLORIS : Blanc, Gris ou Noir

OPTIONS : Acier inoxydable



683426

PORTANT SAVER

DIMENSIONS : H 142 x L 76 x l 66 cm

COLORIS : Blanc

- Economique
- Acier épais
- Roulettes durables de qualité hospitalière
- Stocke jusqu'à 5 tabliers
- Stockage supplémentaire sur la base
- Adaptateur veste et jupe en option

*Existe aussi en version 20 cintres
(683438) Taille : H 150 x L 122x l 61 cm*




683000


Adaptateur veste & jupe

L'adaptateur se monte facilement sur le portant grace à un outil fourni.
Il offre un rangement pratique pour les vestes et jupes.

PORTANT MURAL - 5 BRAS

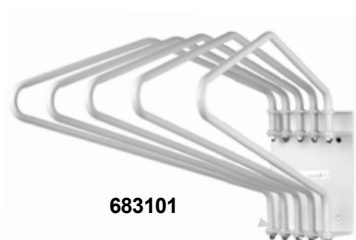

683101

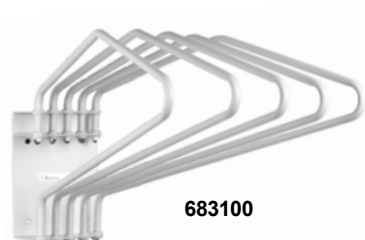

683100

DIMENSIONS : H 20 x L 15 x l 69c m

COLORIS : Blanc

- Stocke cinq tabliers
- Support en acier
- Bras avec bagues en nylon
- Les bras se plient au mur
- Pivote pour un accès facile
- Peut être monté côte à côte
- Adaptateur veste et jupe en option

683429 PORTANT MURAL - 10 BRAS



DIMENSIONS : H 20 x L 91 x l 69 cm

COLORIS : Blanc

- Acier épais
- Peut contenir jusqu'à 90 kg
- Résistant aux rayures
- Facile à installer
- Stocke jusqu'à 10 tabliers
- Adaptateur veste et jupe en option

683415 PORTANT - TOUR MURAL

DIMENSIONS : H 122 x L 33 x l 69 cm

COLORIS : Blanc

- Comprend les supports droits et gauches
- Acier épais
- Résistant aux rayures
- Facile à installer
- Matériel d'installation fourni
- Idéal pour un petit espace

Dimensions envoi

683115 Tour mural sans bras

Caisse : 5 kg (30x76x15)

683415 Tour mural avec bras

Caisse : 5 kg (30x76x15)



683430 PORTANT POUR TABLIERS & GANTS

DIMENSIONS : H 43 x L 71 x l 25 cm

COLORIS : Blanc

- Coins arrondis pour éviter les déchirures accidentelles du tablier
- Stockage rapide et pratique
- Robuste et compact
- Se monte rapidement et facilement
- Acier épais

Dimensions envoi

Caisse 1: 4 kg (48x76x28)



683420 PORTANT POUR TABLIERS & GANTS

COLORIS : Blanc

- Stockage rapide et pratique
- Robuste
- Compact
- Se monte rapidement et facilement
- Acier épais

Dimensions envoi

Caisse 1: 7 kg (66x78x20)



683102 PORTANT POUR TABLIERS GANTS ET LUNETTES



DIMENSIONS : H 46 x L 10 cm

COLORIS : Blanc

- Unité de rangement pour deux tabliers, une paire de lunettes et une paire de gants en plomb
- Se monte rapidement et facilement
- 46cm de large
- Ne contient pas de bords tranchants
- Parfaitement adapté aux petites zones
- Portant en acier

Dimensions envoi

Caisse 1: 4 kg (48x58x20)

683424 SINGLE BAR APRON RAC



DIMENSIONS : H 46 x L 10 cm

COLORIS : Blanc

- Unité de stockage pour un tablier
- Se monte rapidement et facilement
- Ne contient pas de bords tranchants
- Parfaitement adapté aux petites zones
- Portant en acier

683452 CINTRE



DIMENSION : 35 cm

COLORIS : Blanc

- Conçu pour tenir dans un casier



Crochet en option

683450 CINTRE DELUXE



DIMENSION : 56 cm

COLORIS : Blanc

- Bon maintien des tabliers
- Cintre anti-glissement



Crochet en option

683412 SUPPORT MURAL - 2 TABLIERS



Dimensions envoi
Caisse 1: 3 kg (28x43x23)

683412
Portant mural pour 2 tabliers

683412-LS
Portant mural pour 2 tabliers avec système de verrouillage

683410 SUPPORT MURAL - 6 TABLIERS



DIMENSIONS : H 23 x L 86 x l 18 cm
COLORIS : Blanc

Dimensions envoi
Caisse 1: 7 kg (28x94x23)

683410
Portant mural pour 6 tabliers

683410-LS
Portant mural pour 6 tabliers avec système de verrouillage

683411 SUPPORT MURAL - 8 TABLIERS



DIMENSIONS : H 23 x L 117x l 18 cm
COLORIS : Blanc

Dimensions envoi
Caisse 1: 10 kg (33x119x25)

683411
Portant mural pour 8 tabliers

683411-LS
Portant mural pour 8 tabliers avec système de verrouillage

LS SYSTEME DE VERROUILLAGE



- Peu coûteux, mais très efficace
- Barres de stockage inclinées, les tabliers ne peuvent pas glisser
- Nécessite un espace minimal
- S'installe sur les murs existants



RIDEAUX

La gamme de rideaux de radioprotection offre le plus haut niveau de qualité tout en offrant une personnalisation. Les rideaux de radioprotection sont disponibles avec un rail robuste. Nos tringles à rideaux sont disponibles soient droites soient courbées. Les rideaux de radioprotection sont disponibles dans toutes les tailles, dans toutes nos couleurs et dans tous les tissus et dans une équivalence de plomb de 0,25, 0,5, 0,75 et 1,0 mm Pb.

Tailles personnalisées

Nos rideaux de radioprotection sont fabriqués sur mesure aussi rapidement que possible.

Rails personnalisés

Si vous avez besoin d'un rail courbe pour vos rideaux de radioprotection, nous sommes heureux de le construire pour vous, selon vos spécifications exactes.

RIDEAU DE PLOMB



Le rideau en plomb comprend un trou à œillet tous les 15.24 CM. Crochet "S" pour chaque œillet.

COLORIS : Coloris CLASSIC

GAMME : Régular - Kiamor Lead Free

PROTECTION : 0.25mm - 0.35mm - 0.50mm - 1.0mm Pb


TAILLE : par cm²

683650 0.25mm Pb rideau avec crochets (par cm²)

683660 0.50mm Pb rideau avec crochets (par cm²)

683670 0.75mm Pb rideau avec crochets (par cm²)

683675 1.0mm Pb rideau avec crochets (par cm²)

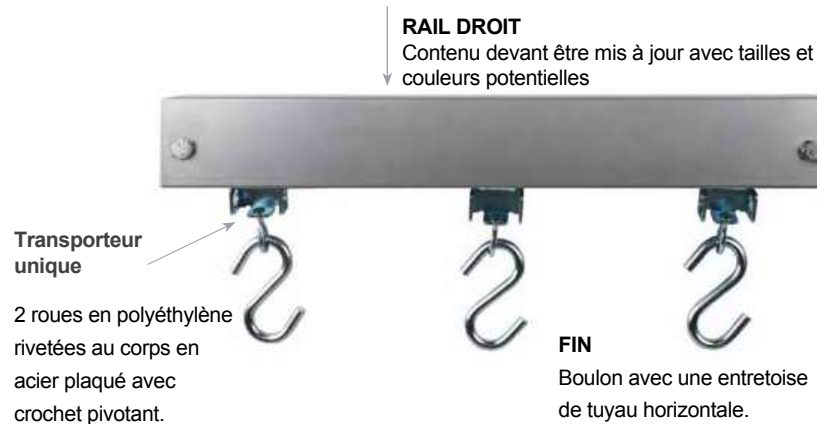

683680 RAIL DROIT POUR RIDEAU

INCLUS : 1 Rail droit
2 Fins
1 Transporteur unique pour chaque crochets

OPTION : Serre joint
Épissure
Chaine

683690 RAIL COURBE POUR RIDEAU



077035 BAS VOLET MULTIPLE



PARTIE SUPERIEURE :

- Équivalent 5 mm PB avec support rigide
- H 28 x L 66 cm
- S'accroche au bras mobile qui peut être facilement retiré

PARTIE INFÉRIEURE :

- 0.5 mm Pb équivalent, composé de 4 bandes
- L 76 x l 66 cm
- Bandes supplémentaires
- Ajout de joint intermédiaire
- L 76 x l 25 cm

077036 BAS VOLET



PARTIE SUPERIEURE :





- Équivalent 5 mm PB avec support rigide
- H 28 x L 66 cm
- Recouvert de matériel lavable
- S'accroche au bras mobile qui peut être facilement retiré

PARTIE INFÉRIEURE :

- 0.5 mm Pb équivalent, composé de 1 bande
- L 76 x l 66 cm

990007 TAPIS DE TABLE

- Dimensionnement et configuration personnalisés disponibles
- Facile à installer, extrêmement efficace pour réduire considérablement le rayonnement diffusé.
- Disponible dans toutes les couleurs standard

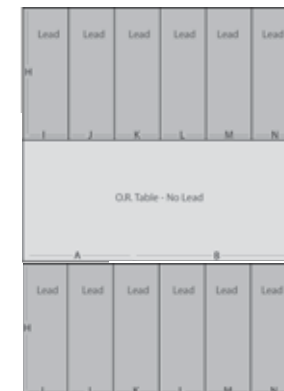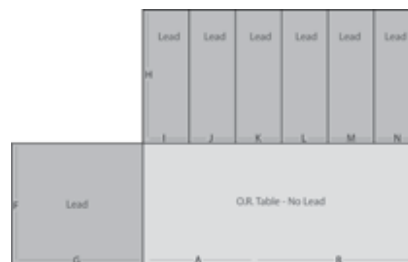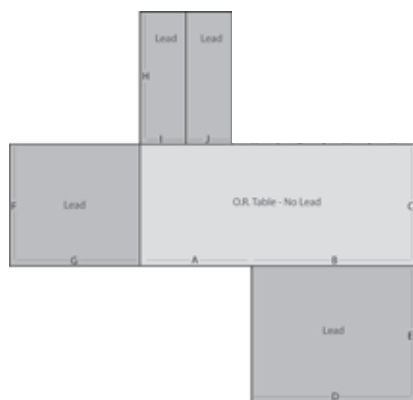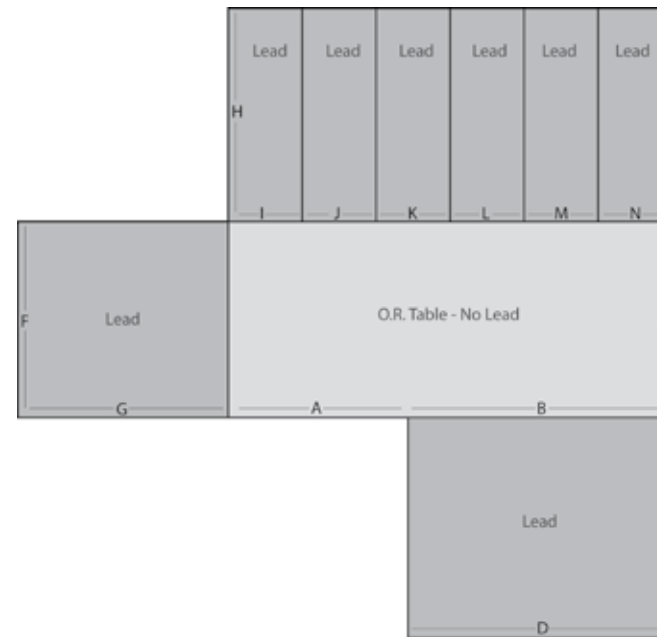

683400 SET PROTECTION PATIENT

INCLUS : Rangement pour 4 tabliers

COLORIS : Coloris CLASSIC

GAMME : Régular - Kiarmor Lead Free

PROTECTION : 0.25mm, 0.35mm, 0.50mm Pb

TAILLE : Bébé - enfant - adolescent - adulte



683401
20 x 25 cm
Bébé



683402
30 x 30 cm
Enfant



683403
35 x 40 cm
Adolescent



683404
40 x 50 cm
Adulte



GND PROTEGE GONAGE



- Set de 3 (bébé - adolescent et adulte)
- Attache
- Fixation facile à la taille
- 0,50 mm équivalent Pb
- Lavable

PP-ES PROTECTION YEUX JETABLE



- Réduction de dose minimale de 40%
- Boîte de 50
- Les protections sont sans latex et 100% jetables

PGS PROTEGE GONADE



- Set de 3 (bambin - adolescent et adulte)
- Attache
- Fixation facile à la taille
- 0,50 mm équivalent Pb
- Lavable

PP-TS PROTECTION THYROÏDE JETABLE



- Réduction de dose minimale de 60%
- Boîte de 50
- Les protections sont sans latex et 100% jetables

684120 PROTEGE OVAIRE



- Set de 3 (bambin - adolescent et adulte)
- Conçu spécialement pour les procédures ovariennes
- 1,0 mm équivalent Pb
- Facile à utiliser
- En nylon
- Durable
- Nettoyage facile

DEMI CHASUBLE PATIENT



HSV - FERMETURE VELCRO

HSV-S1 31 x 61 cm
HSV-M1 46 x 61 cm
HSV-L1 61 X 61 cm



ASB - FERMETURE BOUCLE

ASB-S1 31 x 61 cm
ASB-M1 46 x 61 cm
ASB-L1 61 X 61 cm



Rétracteurs autostatiques Bookwalter*

**Documentation complète à la demande



Bookwalter®

INDEX

COMPOSANTS

Barres horizontales et barres de fixation à la table d'opération	6 - 8
Valves et éléments de couplage	9 - 13
Anneaux	14 - 15
Anneau de rétraction	16 - 18
Accessoires pour laparoscopie	19
Accessoires pour configuration Magrina	20 - 21

KITS

Kit Bookwalter® Spinal	22 - 23
Kit Bookwalter® Abdominal	24 - 30
Kit Bookwalter® Gynécologie	31
Kit Bookwalter® Laparoscopie	32 - 33
Kit Bookwalter® Artère thoracique interne	34



CONTENEURS DE STERILISATION

Conteneurs de stérilisation pour rétracteur BOOKWALTER® et accessoires	35
------------------------------------------------------------------------	----

Rétracteur autostatique Bookwalter®



Anneau de rétraction

Les nouveaux anneaux de rétraction articulés apportent un soutien précieux dans toutes les disciplines chirurgicales.

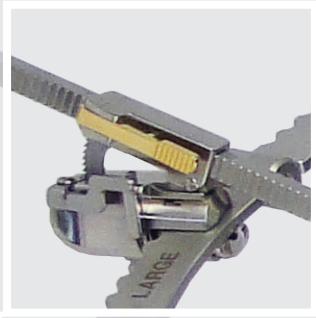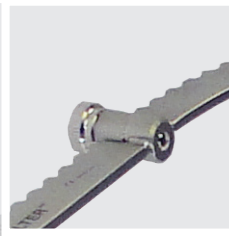

Éléments de fixation pour valves (ratchets)

Le nouveau cliquet fourni une maniabilité maximale et un bon positionnement de la valve.

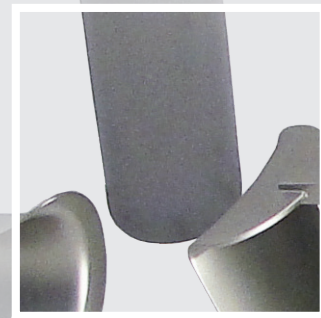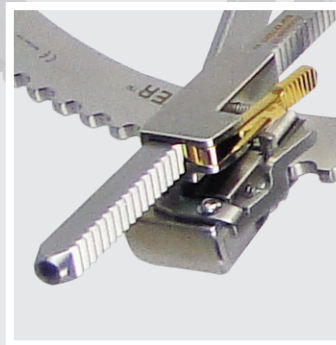


Valves de rétraction

Les nouvelles valves permettent à l'utilisateur d'avoir le meilleur instrument pour chaque discipline chirurgicale.

Meilleure maniabilité

Le nouveau cliquet permet de positionner la valve et d'assurer une rétraction optimale dans chaque situation.

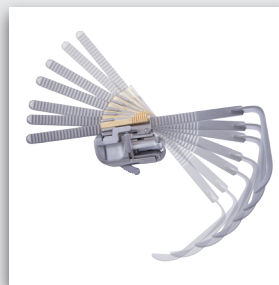

Nouveaux éléments de fixation pour valves (ratchets)

Les nouveaux mécanismes au profil réduit mettent à profit toutes les fonctionnalités du rétracteur BOOKWALTER®.



Matériaux ultra-légers

Le système de rétraction BOOKWALTER® est enrichi de nouveaux composants fabriqués à partir de matériaux légers (caractérisés par la couleur bleue) qui réduisent le poids global du système garantissant moins de contraintes sur les composants eux-mêmes lors de leur utilisation et pendant le processus de stérilisation. Les nouveaux matériaux légers sont utilisés dans la construction des composants les plus sujets à l'usure.



Nouveaux adaptateurs

Le système auto statique de rétraction BOOKWALTER® est enrichi avec de nouveaux adaptateurs pour instruments laparoscopiques, optiques des caméras endoscopiques, etc. qui offrent à l'utilisateur un soutien précieux dans chaque discipline chirurgicale.





CORMEDICA SAS
Greenpark, Immeuble A1, Rue Claude Chappe, 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 94 34 43 Fax : 04 74 94 34 25
E-mail : contact@cormedica.fr
www.cormedica.fr