


| NOM DU PRODUIT<br><b>ERCESOLVANT<sup>®</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESIGNATION<br><b>SOLVANT UNIVERSEL A USAGE MEDICAL</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>REFERENCE(S) : 07125</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>INDICATIONS</b><br><b>Décollement :</b><br>Sparadraps. Bandes élastiques adhésives. Contentions adhésives. Patches. Dissolution de pansements pelliculaires type Ercefilm <sup>®</sup> .<br>Dissolution de vernis chirurgicaux type Erciplex <sup>®</sup> .<br><b>Nettoyage :</b><br>Résidus d'adhésifs sur la peau. Résidus d'adhésifs sur des produits textiles. Résidus d'adhésifs sur l'instrumentation.<br><b>Préparation :</b><br>Dégraissage de la peau avant l'application d'un adhésif.                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>COMPOSITION</b><br>Acétate d'éthyle - Alcools : Ethanol, Isopropanol - Huile de ricin - Huiles essentielles.<br>Acétate d'éthyle : T° d'auto-inflammation 460°C. (Ether : T° d'auto-inflammation 170°C.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>DESCRIPTION</b><br>Solvant conçu pour dissoudre les films, vernis et adhésifs divers, d'origine naturelle ou synthétique.<br>Permet de préparer la peau sans trop l'assécher avant la mise en place d'un adhésif.<br>Permet de décoller aisément les adhésifs lors du renouvellement des pansements.<br>La volatilité d' <b>Ercesolvant<sup>®</sup></b> est particulièrement étudiée pour faciliter son utilisation :<br>-Inférieure à celle de l'éther, elle permet l'essuyage avant évaporation du solvant.<br>-Supérieure à celle de l'alcool et des autres solvants, elle permet un séchage rapide de la peau après essuyage.<br>Ne nécessite pas de rinçage après utilisation |                                                         |
| <b>CONDITIONNEMENT</b><br>Unitaire : 1 Flacon de 125 ml<br>Boîte : 25 Flacons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>STERILISATION/ PEREMPTION</b><br>Produit non stérile<br>Date de validité : 2 ans à compter de la date de fabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>NETTOYAGE/ DECONTAMINATION</b><br>Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>CONTRE-INDICATIONS</b><br>Ne pas utiliser sur les surfaces en plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>CLASSEMENT CE/ LPPR</b><br>Classe I<br>Fabricant français<br><br>Péters Surgical est certifié ISO 9001 version 2000, NF EN ISO 13485 version 2004 et EN 550, et répond aux exigences réglementaires de la Directive Européenne 93/42/CEE du Conseil de 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |