



LA PRESSION ENFIN VISIBLE!

CUFF PILOT™ – LA SÉCURITÉ DE GONFLAGE DU COUSSINET EST UNE QUESTION DE PRESSION ET NON DE VOLUME!

Le Cuff Pilot contrôle en permanence la pression du coussinet et détecte les changements de température, de niveaux de protoxyde d'azote ainsi que tout mouvement à l'intérieur des voies aériennes.

Conçu pour garantir le contrôle des valeurs d'un simple coup d'œil, ce système vous avertit immédiatement en cas de changements, avant que ceux-ci n'affectent la sécurité du patient.

La mise au point du Cuff Pilot a été motivée par le nombre de preuves attestant de la nécessité de contrôler la pression du coussinet sur les masques laryngés. Des revues scientifiques ont, en effet, mis en évidence un nombre croissant d'effets indésirables liés au gonflage excessif, susceptible de provoquer des lésions.¹

Doté d'une valve de gonflage, le dispositif comporte quatre zones qui vous renseignent de manière constante sur le niveau de pression à l'intérieur du ballonnet. La pression optimale maximale du coussinet est conforme aux recommandations applicables aux masques laryngés, à savoir 60 cmH₂O.²



ZONE JAUNE

indique un gonflage insuffisant potentiel ou une réduction de la pression de gonflage du coussinet

ZONE VERTE

pression de gonflage optimale

ZONE TRANSPARENTE

gonflage légèrement supérieur


ZONE ROUGE

gonflage excessif ou augmentation de pression au niveau du coussinet

(1) Impact of laryngeal mask airway cuff pressures on the incidence of sore throat in children. Paediatr Anaesth. 2009 Mar 5. Wong JG, Heaney M, Chambers NA, Erb TO, VON Ungern-Sternberg BS. Department of Anaesthesia, Princess Margaret Hospital for Children, Subiaco, WA, Australie.


(2) pour adultes

**CUFF PILOT™ EST DISPONIBLE AVEC LES
MASQUES LARYNGES SURE SEAL® TELEFLEX
SUIVANTS :**

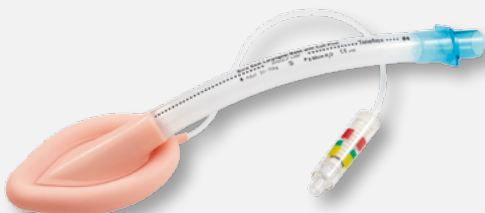


SURE SEAL MASQUE LARYNGÉ, 100% SILICONE

Usage unique, 8 tailles : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Réf. 105210

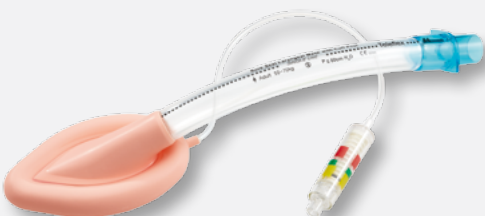

**SURE SEAL MASQUE LARYNGÉ,
COUSSINET EN SILICONE ET TUBE EN PVC**

Usage unique, 8 tailles : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Réf. 105200

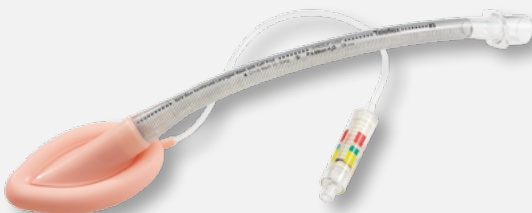

SURE SEAL MASQUE LARYNGÉ, 100% SILICONE, ARMÉ

Usage unique, 8 tailles : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Réf. 105220

Pour plus de détails, visitez la page du Service Informations sur
www.teleflexmedical.eu

TELEFLEX MEDICAL SIEGE SOCIAL EMEA, IRLANDE

Teleflex Medical Europe Ltd.

IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath

Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00

Fax +353 (0)14 37 07 73

orders.intl@teleflexmedical.com

FRANCE +33 (0)5 62 18 79 40

BELGIQUE +32 (0)2 333 24 60

SUISSE +41 (0)31 818 40 90

Pour de plus amples informations, visitez le site

www.teleflexmedical.com/contact

MC/SF - 06 10 02